

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Реутовский экспериментальный завод средств протезирования»
Минздравсоцразвития России
(ФГУП «РЭЗ СП» Минздравсоцразвития России)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ФГУП «РЭЗ СП»
Минздравсоцразвития России



П.И.Махонин

« » 2011г.


КУПАЛЬНИК ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЭКЗОПРОТЕЗА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Модель 1021

Инструкция по назначению

Главный инженер
ФГУП «РЭЗ СП»
Минздравсоцразвития России

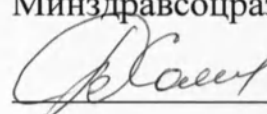
В.В.Холин

Главный технолог

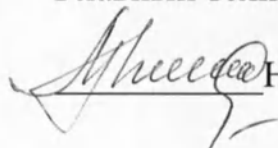
Н.В.Максименко

2011г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ЧЕХЛА

1.1. Купальник предназначен для крепления экзопротезов при занятиях плаванием женщин, перенесших мастэктомию

2. ОПИСАНИЕ

2.1. Купальник представляет собой текстильное изделие, с изнаночной стороны которого в районе чашки встроена полиамидная сетчатая ткань, внизу ограниченная лентой эластичной бретелечной для более надежной фиксации экзопротеза.

2.2. Купальник изготавливается из полиамидной ткани семи типоразмеров (с 44-го по 56-й).

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

3.1. Не оставлять мокрый купальник свернутым.

3.2 Прополоскать тщательно купальник после каждого ношения.

3.3 Не отжимать, просто осторожно промокнуть, чтобы избавиться от избыточной влаги.

3.4 Стирать в холодной или чуть теплой водой с мягким моющим средством.

3.5 Обращать внимание на то, чтобы режим стиральной машины соответствовал требованиям по уходу.


3.6 Не сушить под прямыми солнечными лучами.

4. ГАРАНТИЯ

4.1 Гарантийный срок эксплуатации – двенадцать месяцев.


4.2 Срок службы – три года.

Разработал: инженер-технолог

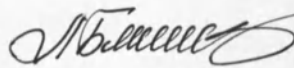

Л.А.Бекенева

Нормоконтроль:

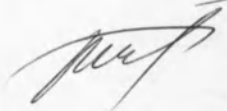

Г.И.Маслова