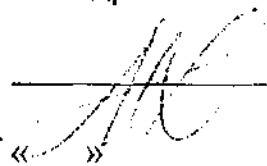


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Реутовский экспериментальный завод средств протезирования»
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
(ФГУП «РЭЗ СП» Росздрава)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГУП «РЭЗ СП»
Росздрава

 П.И.Махонин
« » 2007г.

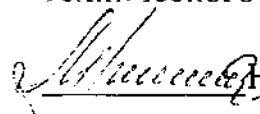
БЮСТГАЛЬТЕР ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЭКЗОПРОТЕЗА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
(МОДЕЛИ ЛФ 0011Т, ЛФ 0012Т)

Инструкция по назначению

Главный инженер
ФГУП «РЭЗ СП» Росздрава

 В.В.Холин

Начальник производственно-
технического отдела

 Н.В.Максименко

2007г.  КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР ЗАВОДА
П.И. МАХОНИН

1. ОПИСАНИЕ

1.1 Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы изготавливается из: хлопковой ткани – 80%, полиамидной ткани – 20%.

1.2 Передняя часть бюстгальтера изготавливается из вышитой ткани, нижняя часть чашки – на подкладке. Внутренние чашки бюстгальтера оснащены карманами из трикотажного полотна для крепления экзопротезов.

1.3 Задняя часть бретели эластичная, с регулятором длины; застежка сзади на «крючки-петли».

2. НАЗНАЧЕНИЕ БЮСТГАЛЬТЕРОВ

2.1 Бюстгальтер применяется для фиксации экзопротеза молочной железы в период реабилитации после мастэктомии, а также предупреждения заболеваний позвоночника, связанных с перераспределением нагрузки, для восстановления симметрии фигуры и приобретения комфорта и уверенности.

3. МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Бюстгальтер рекомендуется надевать утром на весь день, снимать в течение дня на время проведения процедур и полностью снимать на ночь.

3.2 Подбирать размер бюстгальтера необходимо непосредственно по окружности под грудью согласно таблице, приведенной ниже.

Размер бюстгальтера	Размеры экзопротеза молочной железы													
	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	B	C	D	E	F	G								
70	A	B	C	D	E	F	G							
75		A	B	C	D	E	F	G						
80			A	B	C	D	E	F	G					
85				A	B	C	D	E	F	G				
90					A	B	C	D	E	F	G			
95						A	B	C	D	E	F	G		
100							A	B	C	D	E	F	G	
105								A	B	C	D	E	F	G
110									A	B	C	D	E	F
115										A	B	C	D	E
120											A	B	C	D

3.3 Бретели снабжены специальными регуляторами, благодаря которым возможно индивидуально изменить высоту чашки. Объем бюстгалтера регулируется застежкой на спине

3.4 Экзопротез молочной железы помещается в чехол из трикотажного полотна, который входит в комплект поставки экзопротеза, затем вкладывается в карман, который шит с внутренней стороны бюстгалтера.

3.5 При ношении изделие должно плотно прилегать к телу и не сковывать движений. Малейшие признаки неудобства являются показателем того, что был неверно подобран размер. Если последующее использование изделия все же вызывает дискомфорт, необходимо проконсультироваться у специалиста.

3.6 Чтобы правильно надеть бюстгалтер, необходимо вставить в карман экзопротез молочной железы (при двухсторонней ампутации вставить в карманы чашек оба экзопротеза), затем надеть на плечи бретели, слегка наклониться вперед, вставить в чашку бюстгалтера здоровую грудь. Застегнуть застежку сзади. Распрямить спину и расправить, при необходимости, образовавшиеся на бюстгалтере складки.

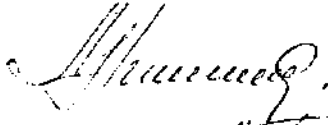
4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ

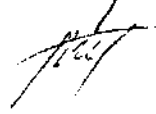
4.1. Индивидуальная несовместимость с компонентами сырья изделия.

5. УХОД ЗА ЭКЗОПРОТЕЗОМ И ЕГО ХРАНЕНИЕ

5.1. Бюстгалтер следует обрабатывать в мыльном растворе при температуре от +35°C до +40°C и не использовать отбеливатели. Не применять чистку с химическими препаратами. Запрещены отжим и сушка в стиральной машине. Рекомендовано аккуратное отжимание без выкручивания, сушка в расправленном виде. Разрешено гладить при максимальной температуре 110°C.

Разработал: инженер-технолог  Л.А.Бекенева

Проверил: начальник ПТО  Н.В.Максименко

Нормоконтроль:  Г.И.Маслова

Федеральное государственное унитарное предприятие
"ВЛАДИМИРСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
ФГУП «Владимирское ПРОП» Росздрава

600022, г. Владимир
пр. Ленина, д. 65А

БИК 041708706, ИНН 3327101034, р/с 40502810000000000010
к/с 30101810100000000706 в ЗАО "Владбизнесбанк" г. Владимир
ОКПО 03151636, ОКОГУ - 13228, ОКАТО - 17401365000, ОКФС - 12, ОКОПФ - 42,
ОКВЭД - 33.10.1 19.30 85.11.1

☎ (0922): Директор-240497 Зам.директора-245316 Гл.бухгалтер-245220 Общий-242919 Т/Факс-245316
E-Mail: prop@vtsnet.ru

«2» 11 2007 г. № 497
На № _____ от " " 2007 г.

**Директору Реутовского
экспериментального завода средств
протезирования П.И.Махонину**

Отзыв о качестве продукции
Реутовского экспериментального завода средств протезирования

ФГУП «Владимирское ПРОП» Росздрава благодарит Вас за высокое качество и большое разнообразие поставляемой продукции.

Особенно хочется отметить изделия, изготавливаемые из силиконовых композиций и швейные изделия, такие как бюстгальтеры для фиксации экзопротезов молочных желез. Все эти изделия пользуются большим успехом у наших пациенток. Экзопротезы полностью отвечают своему функциональному назначению – максимально компенсируют постмастэктомический дефицит тканей, эстетичны, удобны при использовании, не вызывают чувство дискомфорта. Бюстгальтеры отличаются надежностью, функциональностью и комфортом. Изделия имеют хорошую форму, поддерживающую грудь и протез по всему периметру.

Директор *С.А.Макаров* С.А.Макаров

**КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР ЗАВОДА
П.И. МАХОНИН**