

ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ходунки металлические ХМ-01.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ходунки металлические модели ХМ-01 (далее ходунки), предназначены для опоры при ходьбе и облегчения самостоятельного передвижения пользователя.

2. ОСОБЫЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ

Конструкция ходунков обеспечивает удобство пользования им и свободу действия пользователя, плавность перемещения и отсутствие дребезжания ходунка в процессе эксплуатации, а также ремонтпригодность, включая взаимозаменяемость деталей, при необходимости их замены.

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Ходунки соответствуют требованиям ГОСТ Р 51078(ИСО 11199-1-96), ГОСТ Р 50444, настоящим техническим условиям и комплекту документации.

Ходунки выдерживают номинальную нагрузку массой не менее 75 кг. Рукоятки ходунка изготавливаются из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и имеют такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата, а также легкость чистки и санитарной обработки. На рукоятки ходунков надета труба защитная изготовленная из полиэтилена низкого давления.

Конструкция наконечников обеспечивает легкость их замены и исключает создание эффекта «присоски» при прикосновении к поверхности, по которой происходит движение ходунка.

Устройство регулировки высоты имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения.

Устройство регулирования высоты ходунка не имеет свободного хода при нагрузке $800\text{Н} \pm 2\%$.

Ходунки устойчивы к дезинфекции 3%-м раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0.5%-го моющего средства по ГОСТ 25644-88, либо 1%-м раствором моноклорамина ХБ по ГОСТ 14193-78.

Масса ходунка не превышает 8 кг.

4.МАРКИРОВКА

Маркировка ходунков соответствует ГОСТ Р 50444-92.

Маркировка содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование;
- наименование изделия;
- обозначение настоящих ТУ;
- год изготовления изделия;
- штамп ОТК.

Маркировка наносится на этикетку, прикрепленную к ходункам любым способом, обеспечивающим его сохранность.

Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-77.

5. УПАКОВКА.

Упаковка ходунка соответствует ГОСТ Р 50444-92.

Ходунки оборачивают бумагой по ГОСТ 8273-75.

6.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

Ходунки транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444-92.

Хранение ходунков по ГОСТ Р 50444-92.

7.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие ходунков требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня покупки.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

Класс 1 изделие медицинского назначения с низкой степенью риска (по ГОСТ Р 51609-2000).

Исполнитель



Нечушкина И.Е.