


4. Описание изделия медицинского назначения.

DGM SA 2/1, DGM SA 2/2

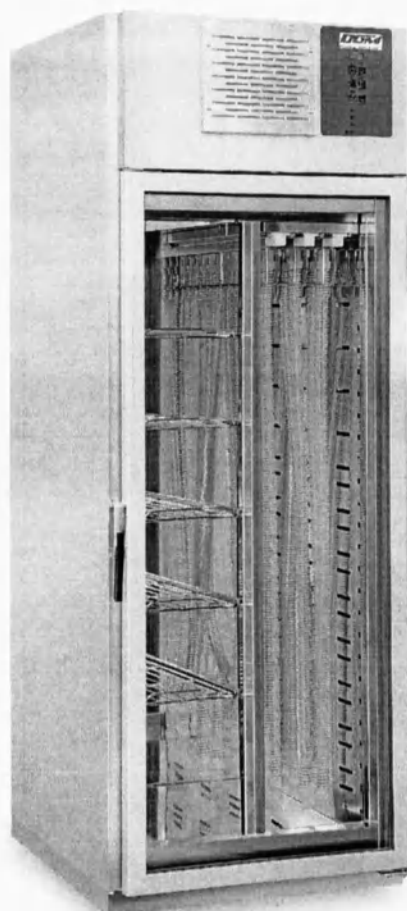

МЕНЮ


Путь к меню

Для того чтобы попасть в меню, нажмите кнопку «PRG» и удерживайте ее в течение пяти секунд.

Нажимайте кнопку «PRG», чтобы прокрутить список меню:
Параметры – Услуги (Parameters-Services).

Нажмите кнопку «START», чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку «STOP», чтобы выйти из меню и вернуться в режим ожидания или выключения.

DGM SI 1/1, DGM SI 1/2

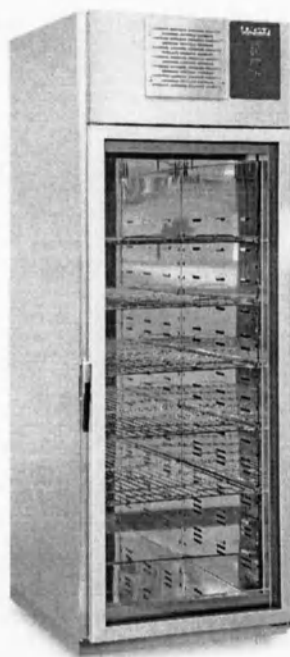

МЕНЮ

Путь к меню


Для того чтобы попасть в меню, нажмите кнопку «PRG» и удерживайте ее в течение пяти секунд.

- Нажимайте кнопку «PRG», чтобы прокрутить список меню: Параметры – Услуги (Parameters-Services).
- Нажмите кнопку «START», чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку «STOP», чтобы выйти из меню и вернуться в режим ожидания или выключения.

СОЧЕТАНИЕ КЛАВИШ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В «ПАРАМЕТРЫ МЕНЮ»

ДЕЙСТВИЕ	ФАЗА	ДИСПЛЕЙ
Нажмите кнопку «PRG» и удерживайте в течение 5 секунд		Par
Нажмите кнопку «START»		PAS
Нажмите кнопку «P1»	Пароль XXX	
Нажмите кнопку «START»	Изменение параметров с помощью P1 и P2	Value (значение)

DGM SS 8/1, DGM SS 8/2

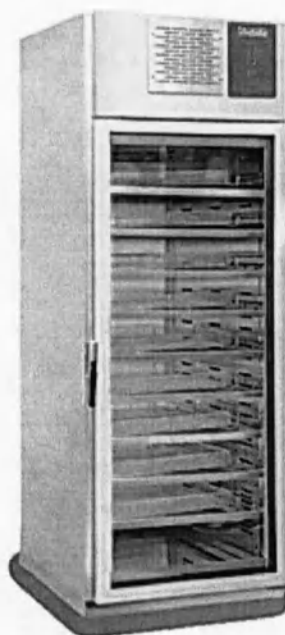

МЕНЮ

Путь к меню

Для того чтобы попасть в меню, нажмите кнопку «PRG» и удерживайте ее в течение пяти секунд.

Нажимайте кнопку «PRG», чтобы прокрутить список меню:

Параметры – Услуги (Parameters-Services).

Нажмите кнопку «START», чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку «STOP», чтобы выйти из меню и вернуться в режим ожидания или выключения.

СОЧЕТАНИЕ КЛАВИШ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ПАРАМЕТРЫ МЕНЮ

ДЕЙСТВИЕ	ФАЗА	ДИСПЛЕЙ
Нажмите кнопку «PRG» и удерживайте в течение 5 секунд		P a r
Нажмите кнопку «START»		PAS
Нажмите кнопку «P1»	Введите пароль «XXX»	
Нажмите кнопку «START»	Изменение параметров с помощью P1 и P2	Value (значение)