

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ФГУП
«Московское ПрОП»
Минздравсоцразвития России


« 25 »  2010 г.
"М.В. Давыдов"
протезно-ортопедическое
предприятие
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ * МОСКВА * ОКОЛОМОСКОВСКИЙ РАЙОН * МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Корсет (ленинградского типа) КРО-105»

Памятка по пользованию

Настоящая памятка предназначена для ознакомления с правилами эксплуатации корсета (ленинградского типа) КРО-105 и содержит сведения о его назначении, правилах пользования и ухода.

1. Медицинское назначение корсета КРО-105.

1.1 Корсет ленинградского типа КРО-105 предназначен для детей и взрослых для фиксации поясничного отдела позвоночника в физиологически выгодном положении, удержание мышц передней брюшной стенки и, за счет делордозирования, смещать нагрузку на тела позвонков при одновременной разгрузке межпозвонковых суставов.

1.2 Корсет ленинградского типа КРО-105 может быть использован в центрах восстановительного лечения, упреждениях социальной защиты и здравоохранения, а также для реабилитации на дому в условиях повседневной жизни.

1.3 Корсет может изготавливаться как по индивидуальным размерам, так и по типоразмерам. Корсет выпускается по шести типоразмерам (01-06), при этом определяется обхватом талии (52-130см) и ростом пациента.

2. Надевание и пользование корсетом КРО-105.

2.1 На тело человека надевают хлопчатобумажную майку.

2.2 В положении «стоя» корсет надевают на пациента и фиксируют его.

1.3 Приемная полость не должна оказывать болевого воздействия на мягкие ткани туловища, отрегулировать натяжение шнуровкой.

1.4 Для снятия корсета расфиксировать застежки, расстегнуть «молнию» развести в стороны края приемной полости корсета, снять корсет.

3. Уход за корсетом КРО-105.

3.1 Корсет необходимо оберегать от механических повреждений.

3.2. В случае загрязнения постирать корсет в теплой воде с добавлением нейтральных моющих средств или детского мыла.

4. Уход за телом.

Ежедневно, после пользования корсетом, необходимо проводить общепринятую гигиеническую обработку кожных покровов, обмывание теплым

мыльным раствором с последующим вытиранием насухо. После обмывания показан массаж и гимнастика тела, обработка кожи защитными лосьонами.

5. Гарантии предприятия

Срок службы корсета составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации корсета составляет 7(семь) месяцев со дня выдачи в эксплуатацию

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит ремонт или замену корсета за свой счёт при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, прописанных в памятке по пользованию корсета.