

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГУП
«Московский ЦПОП»
Министерства здравоохранения России
М.В. Давыдов
2011г.



«Реклинатор эластичный КР1-25»

Памятка по пользованию

Настоящая памятка предназначена для ознакомления с правилами эксплуатации «Реклинатора эластичного КР1-25 и содержит сведения о его назначении, правилах пользования и ухода.

1. Медицинское назначение реклинатора.

- 1.1 Реклинатор эластичный КР1-25 (далее - реклинатор) предназначен для всех половозрастных групп потребителей, для коррекции ранних стадий нарушения осанки, врожденной или приобретенной сутулости верхнего грудного отдела позвоночника.
- 1.2 Реклинатор используется в учреждениях социальной защиты и здравоохранения, а также для реабилитации в условиях повседневной жизни.
- 1.3. Реклинатор изготавливается по размерам и имеет 6 типоразмеров (определяется окружностью талии).

2. Надевание и пользование реклинатором.

- 2.1 На пациента надевают хлопчатобумажную майку.
- 2.2 В положении «стоя» надевают реклинатор.
- 2.3 Осуществить вертикальное нагружение и отрегулировать крепление реклинатора.
- 2.4 Приемная гильза, а также детали реклинатора не должны ограничивать дыхательное движение грудной клетки.
- 2.5 При нарушении удержания реклинатора и неудобном креплении, обратиться на предприятие-изготовитель для дополнительной подгонки.

3. Уход за реклинатором.

- 3.1 Реклинатор необходимо оберегать от поломок и деформаций отдельных элементов, нельзя бросать.
- 3.2 Допускается стирка реклинатора в теплой воде с использованием раствора моющих средств.
- 3.3 Нельзя хранить реклинатор вблизи источника тепла, сушить на солнце.

4. Уход за кожей тела

Ежедневно, после пользования реклинатором, необходимо проводить общепринятую гигиеническую обработку кожных покровов, обмывание теплым мыльным раствором с последующим вытиранием насухо. После обмывания показан массаж, обработка кожи защитными лосьонами.

5. Ремонт реклинатора.

Средний срок службы реклинатора составляет 12 (двенадцати) месяцев.


Средний срок сохраняемости реклинатора 6 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации реклинатора составляет 6 (шесть) месяцев со дня выдачи в эксплуатацию.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит ремонт или замену реклинатора за свой счёт при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, прописанных в памятке по пользованию «Реклинатор эластичный КР1-25»

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

(3)

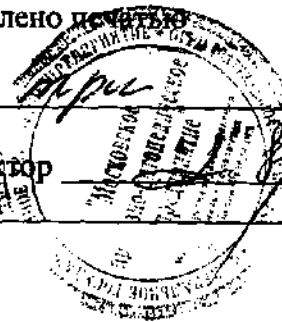

листов

Директор

М.В. Давыдов