

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор ФГУП
«Московское ПрОП»
Минздравсоцразвития России
М.В. Давыдов
_____ 2010г.

«Корсет ортопедический КРО-107»

Памятка по пользованию

Настоящая памятка предназначена для ознакомления с правилами эксплуатации корсета ортопедического КРО-107 и содержит сведения о его назначении, правилах пользования и ухода.

1. Медицинское назначение корсета КРО-107.

1.1 Корсет ортопедический КРО-107 предназначен для детей и взрослых для фиксации поясничного отдела позвоночника в период восстановительного лечения после травм позвоночника, спондилезах.

1.2 Корсет КРО-107 может быть использован в упреждениях социальной защиты, здравоохранения и образования, а также для реабилитации на дому и в условиях повседневной жизни.

1.3 Корсет может изготавливаться как по индивидуальным размерам, так и по типоразмерам. Для детей используются четыре типоразмера по окружности талии от 45 до 65см. Для взрослых используются восемь типоразмеров по окружности талии от 66 до 140см.

2. Надевание и пользование корсетом КРО-107.

1.1 На тело человека надевают хлопчатобумажную майку.

1.2 В положении «стоя» корсет надевают на пациента и фиксируют его.

1.3 Приемная полость не должна оказывать болевого воздействия на мягкие ткани туловища, отрегулировать натяжение крепления застежек.

1.4 Для снятия корсета расфиксировать застежки, развести в стороны края приемной полости корсета, снять корсет.

1.5 При нарушении удержания корсета или неудобном креплении, необходимо прекратить пользование корсетом и обратиться на предприятие-изготовитель для дополнительной подгонки корсета.

3. Уход за корсетом КРО-107.

2.1 Корсет необходимо оберегать от поломок и деформаций отдельных элементов. Корсет нельзя бросать.

2.2. Внутреннюю полость периодически 1-2 раза в неделю рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной нейтральным раствором моющих средств, не содержащих красящих добавок с последующей просушкой.

2.3. Нельзя хранить корсет вблизи источника тепла, сушить на солнце.

4. Уход за телом.

Ежедневно, после пользования корсетом, необходимо проводить общепринятую гигиеническую обработку кожных покровов, обмывание теплым мыльным раствором с последующим вытиранием насухо. После обмывания показан массаж и гимнастика тела, обработка кожи защитными лосьонами.

5. Гарантии предприятия

Срок службы корсета составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации корсета составляет 6 (шесть) месяцев со дня выдачи корсета в эксплуатацию.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит ремонт или замену корсета за свой счёт при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, прописанных в памятке по пользованию корсета ортопедического КРО-107.

