


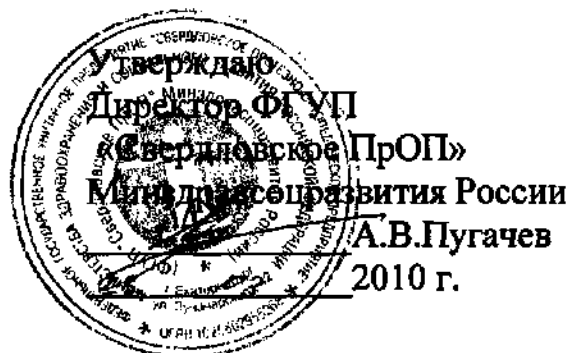

ФГУП «Свердловское ПрОП» Минздравсоцразвития России



Реклинатор ортопедический КР1-51

Памятка по пользованию

КР1-51.00.00.ПП

Версия 0

2010

Инв. №	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
Подл.				

Реклинатор ортопедический КР1-51 (далее реклинатор) для детей и взрослых предназначен для профилактики деформаций грудного отдела позвоночника при сколиозе, остеопорозе и остеохондрозе, а также для лечения последствий неосложненных компрессионных переломов верхнего грудного отдела позвоночника. Он предупреждает образование кифоза путем отведения надплечий кзади и медиального смещения лопаток

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Реклинатор выполнен из материала «Неопрен» или из эластичной ленты с застежкой ворсовой «Контакт», капроновой тесьмы, на которую надевают смягчающие элементы. Реклинатор усилен планшетами, которые обеспечивают равномерное прилегание изделия по форме тела в корригированном положении позвоночника. Реклинатор изготавливается по типоразмерам, указанным в таблице или по индивидуальным размерам пациента.

Размер	Рост, см.	Окружность талии, см.
Детский		
00	100-130	45-55
01	130-145	50-60
02	145-160	55-65
Взрослый		
00	150-160	60-70
01	160-170	60-70
02	160-170	70-80
03	170-180	70-80
04	170-180	80-90
05	170-190	90-110

НАДЕВАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ КОРСЕТОМ

Реклинатор надевают на трикотажную майку с рукавами в положении пациента «Стоя» после установки пациента в положение самокоррекции. Для этого пациент должен, стоя на выпрямленных ногах, развести надплечья, свести лопатки, подтянуть живот. Сначала застегивают реклинатор спереди, затем капроновую тесьму проводят, охватывая плечевые суставы спереди, через подмышечные впадины и, обогнув туловище, застегивают с боков.

УХОД ЗА КОРСЕТОМ

Стирать изделие ручным способом в теплой воде при помощи щетки с применением нейтральных моющих средств. Сушить в расправленном виде вдали от нагревательных приборов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Тугоподвижная форма туловищности, выраженный лордоз поясничного отдела позвоночника, выпуклый живот.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок - 40 дней с момента выдачи изделия потребителю.

КР1-51.00.00.ПП

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разработал		Зинченко	<i>[Подпись]</i>	13.05.10
Проверил		Климова	<i>[Подпись]</i>	13.05.10
Согласовано		Поспелова	<i>[Подпись]</i>	13.05.10

**Реклинатор
ортопедический КР1-51**
Памятка по пользованию

Лит.	Лист	Листов
А	2	3
ФГУП «Свердловское ПрОП»		

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

КР1-51.00.00.ПП

ДНСТ

3