



ФГУП «Свердловское ПрОП» Минздравсоцразвития России ,



Утверждаю
Директор ФГУП
«Свердловское ПрОП»
Минздравсоцразвития России
А.В.Пугачев
2010 г.

Бандаж ортопедический на коленный сустав БН6-35

Памятка по пользованию
БН6-35.00.00.ПП

Версия 1

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2010

Бандаж ортопедический на коленный сустав предназначен для фиксации коленного сустава при повреждении мениска и связок, артрозе, артрите и других заболеваниях, которые требуют частичного ограничения подвижности в коленном суставе.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ.



Бандаж изготовлен из материала «Неопрен» или аналогов. Спереди имеется надпатellarное отверстие. Фиксация коленного сустава осуществляется с помощью пружинных планшетоk, расположенных по боковым поверхностям бандажа. В области коленной чашечки с внутренней стороны располагается вкладыш из пенополиэтилена, закрытый настрочкой из основного материала. Фиксация бандажа на конечности осуществляется с помощью застежек ворсовых «Контакт».

Лицам, страдающим тяжелой степенью заболевания сосудов нижних конечностей необходимо проконсультироваться с лечащим врачом о возможности использования данного изделия.

ПОЛЬЗОВАНИЕ БАНДАЖОМ

Бандаж надевают на ногу и фиксируют на ней, последовательно застегивая крепления на бедре и голени. Бандаж не должен оказывать болезненного давления на мягкие ткани конечности и не должен затруднять кровообращение.

Режим пользования бандажом определяет лечащий врач.

УХОД ЗА БАНДАЖОМ

Стирать изделие в теплой воде при помощи щетки с применением нейтральных моющих средств. Сушить в расправленном виде вдали от нагревательных приборов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации бандажа – 40 дней со дня выдачи потребителю.

В течение этого срока, в случае выявления производственного дефекта, предприятие производит замену или ремонт бандажа бесплатно.

Бандаж ортопедический на коленный сустав БН6-35

Размер	00	01	02	03	04
Обхват колена, см	28-34	35-41	42-48	49-55 инд.	Свыше 55 инд.

БН6-35.00.00.ПП

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит. Лист Листов		
Разраб.		Зинченко	<i>[Signature]</i>	13.03.10			
Проверил		Климова	<i>[Signature]</i>	23.03.10	A	2	3
Согласовано		Поспелова	<i>[Signature]</i>	13.04.10	ФГУП «Свердловское ПрОП»		

Бандаж ортопедический на коленный сустав БН6-35
Памятка по пользованию

[illegible]

№ в. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата