


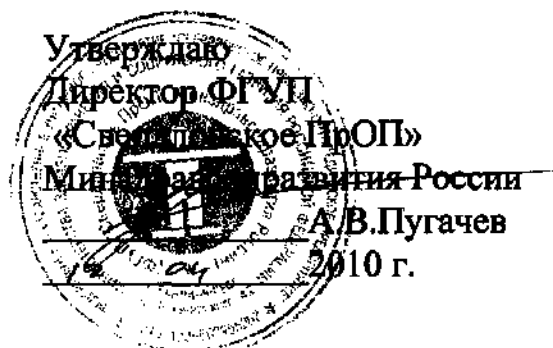

ФГУП «Свердловское ПрОП» Минздравсоцразвития России



Корсеты ортопедические

КРО-171 – на пояснично-крестцовый отдел позвоночника
КРО-172 – на грудо-поясничный отдел позвоночника

Памятка по пользованию

КРО-171(2).00.00.ПП

Версия 1

2010

Корсеты предназначены для разгрузки, стабилизации и фиксации поясничного отдела позвоночника при его заболеваниях, а также для реабилитации после перенесенных травм и операций. Корсеты помогают предотвратить и снять боли, уменьшают вертикальную нагрузку на позвоночник, дисциплинируют осанку, согревают мышцы поясничной области, делая их сократимыми, менее подверженными травмам, особенно во время физической нагрузки. Они также применяются для закрепления лечебного эффекта на время вытяжения позвоночника.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Корсеты выполнены из эластичного материала цельнокроенные или из нескольких стачиваемых между собой деталей с застежками ворсовыми «Контакт». Фиксация и разгрузка позвоночника осуществляется за счет металлических планшетонок – ребер жесткости (6-8 шт. в зависимости от размера), которые обеспечивают упругое прилегание по форме тела потребителя. Для дополнительной фиксации на теле пациента имеются пояса-подхваты, вшитые с двух сторон и состоящие из сдвоенной эластичной ленты с застежками ворсовыми «Контакт».

НАДЕВАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ КОРСЕТОМ

Корсет надевают поверх х/б белья в положении лежа на спине, сначала застегивают сам корсет, затем фиксируют пояса-подхваты. (Пояса-подхваты необходимо заново фиксировать при каждом надевании корсета).

Время ношения корсета определяется лечащим врачом. Если не указано иначе, носить 4-6 часов или на момент физической нагрузки.

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Ежедневно необходимо проводить общепринятую обработку кожных покровов – обмывание теплым мыльным раствором с последующим вытиранием насухо.

По назначению врача показана лечебная физкультура, массаж.

УХОД ЗА КОРСЕТОМ


Стирать изделие в теплой воде при помощи щетки с применением нейтральных моющих средств. Сушить в расправленном виде вдали от нагревательных приборов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок - 40 дней с момента выдачи изделия потребителю.

Размер	00	01	02	03	04	05	06
Обхват	75	85	91	101	111	121	Свыше
бедер, см	84	90	100	110	120	130	130 (инд.)

КРО-171(2).00.00.ПП

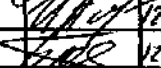Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разработал		Зимченко		12.04.10	Корсеты ортопедические КРО-171 – на пояснично-крестцовый отдел позвоночника КРО-172 – на грудно-поясничный отдел позвоночника Памятка по пользованию	Лит.	Лист
Проверил		Климова		12.04.10		А	2
Согласовано		Поспелова		12.04.10			3
					ФГУП «Свердловское ПрОП»		

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

КРО-171(2).00.00.ПП

Лист

3