


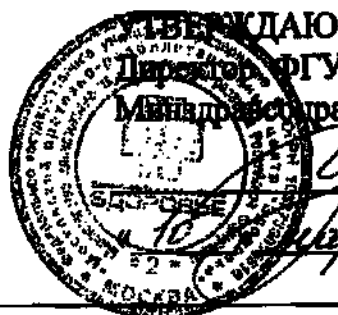

Директор ФГУП «МПРЦ «Здоровье»
Минздравсопразвита России

В. С. Гуторов

2010 г.

ФГУП «МПРЦ «Здоровье» Минздравсопразвита России

ПАМЯТКА

по пользованию бандажами грыжевыми (суспензориями)

ПИ-01, ПИ-02 А, ПИ-03, ПИ-04, ПИ-05

Регистрационное удостоверение № ФС 01012004/2015 - 05

Бандажи-суспензории из эластичных материалов или хлопчатобумажных тканей применяются при следующих заболеваниях:

- заболевания мошонки, яичек и их оболочек;
- неуправляемые пахово-мошоночные грыжи.

Применение:

Бандаж-суспензорий надевается в положении «лежа», и на ночь снимается. Продолжительность носки бандажа – суспензория определяется индивидуально по медицинским показаниям, лечащим врачом.

Противопоказания:

- наличие открытых ран (потертостей, порезов и т.д.);
- дерматиты;
- гнойничковые инфекции.

По мере загрязнения рекомендуется ручная стирка при $t\ 40^{\circ}\text{C}$ с использованием мягких моющих средств.

Не рекомендуется применять другие виды чистки, не указанные на маркировке изделия.

Бандажи-суспензории транспортируются всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 7000.

Бандажи-суспензории должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Изготовитель гарантирует соответствие бандажей-суспензориов требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 40 дней со дня покупки.

Срок службы изделия - 1 год.

И.о. зав. ОМР

Т.Ф.Перевезенцева