



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГУП «МПРЦ «Здоровье»
Минздравсоцразвития России

В. С. Гуторов

2010г.

ФГУП «МПРЦ «Здоровье» Минздравсоцразвития России

ПАМЯТКА

**по пользованию бандажами ортопедическими
поддерживающими
БНЗ-**

Регистрационное удостоверение № ФС 01012004/2450-05

Бандажи ортопедические поддерживающие (далее по тексту - бандажи) имеют широкий спектр применения и назначаются:

- для поддержания передней брюшной стенки в послеоперационном периоде,
- для профилактики грыжеобразования, или компенсации грыжевого дефекта при его наличии,
- для фиксации области почек при их опущении и других заболеваниях почек,
- фиксации прямой кишки при ее выпадении,
- с целью разгрузки плеча, предплечья и кисти при травмах и переломах верхней конечности.

Применение:

- 1) Бандаж надевается на хлопчатобумажное белье, в положении «лежа» на спине, на ровной поверхности. Застегивать бандаж необходимо с помощью пуговиц снизу вверх. Поддержание живота снизу осуществляется резиновым подхватом путем фиксации его на крючки по бокам бандажа. Степень натяжения бандажа регулируется при помощи шнуровки, расположенной сзади. Перед сном бандаж снимается также в положении «лежа».
- 2) Бандаж фиксируется на теле при помощи пояса с застежкой на петли и пуговицы и двух подбедренников, которые пристегиваются к поясу.
- 3) Бандаж при помощи лямки через шею фиксируется на теле. Предплечье размещается и фиксируется в основной детали бандажа, что обеспечивает неподвижность верхней конечности.

Продолжительность носки бандажей определяется индивидуально по медицинским показаниям, лечащим врачом.

Противопоказания:

- наличие открытых ран (потертости, порезы и т.д.);
- дерматиты;
- гнойничковые инфекции.

По мере загрязнения бандажей рекомендуется ручная стирка при $t 40^{\circ}\text{C}$ с использованием мягких моющих средств. Не рекомендуется применять другие виды чистки, не указанные на маркировке изделия.


Бандажи транспортируются всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 15150.

Бандажи должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Изготовитель гарантирует соответствие бандажей требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 40 дней со дня покупки.

Срок службы изделия - 1 год.

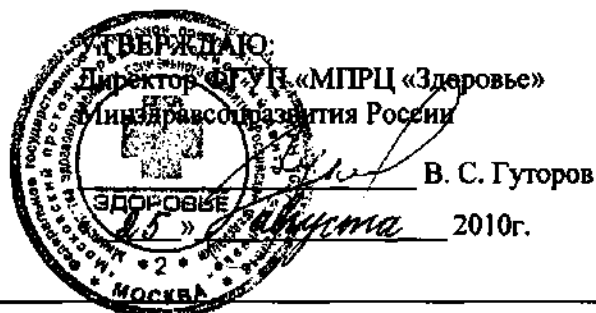

ФГУП «МПРЦ «Здоровье» Минздравсоцразвития России
ПАМЯТКА
по пользованию биндом ортопедическим фиксирующим
БНЗ-

Регистрационное удостоверение № ФС 01012004/2450 - 05

Бинды ортопедические фиксирующие (далее по тексту - бинды) из хлопчатобумажных тканей или эластичных материалов имеют широкий спектр применения и назначаются:

- для фиксации мышечно-апоневротических структур передней брюшной стенки;
- при опущении органов брюшной полости и малого таза, а также для его профилактики;
- при опущении почек (нефроптозе), других заболеваниях почек, где требуется фиксация и стабилизация поясничного отдела позвоночника;
- для фиксации тазового кольца при расхождении лонных костей, травмах костей малого таза;
- для элевации опущенного живота, при ослаблении мышц брюшной стенки живота;
- для реабилитации в послеоперационном периоде на органах брюшной полости;
- для снижения болевого синдрома;
- для устранения грыжевого дефекта при грыжах послеоперационных, диафрагмальных, пупочных, белой линии живота;
- при энурезе для фиксации памперса;
- для фиксации калоприемника;
- для профилактики грыжеобразования в послеоперационном периоде.

Применение:

Бинд из хлопчатобумажных тканей надевается на хлопчатобумажное белье в положении «лежа» на спине, на ровной поверхности. Желательно сделать 5-6 поглаживающих движений по поверхности живота по часовой стрелке. Застегивать бинд необходимо с помощью пуговиц снизу вверх. Поддержание живота снизу осуществляется резиновым подхватом путем фиксации его на крючки по бокам бинда. Степень натяжения (объем) бинда регулируется при помощи шнуровки, расположенной сзади. Перед сном бинд снимается также в положении «лежа».

Бинд из эластичных материалов надевается (или застегивается спереди на ленту «контакт», ленту «контакт» через рамку, застежку «молния», или крючки и петли на ленте) на хлопчатобумажное белье в положении «лежа» на спине, на ровной поверхности. Поддержание живота снизу осуществляется за счет применения фигурных усилительных накладок, настроенных на передние и задние детали, и/или подхватом (подхватами) путем фиксации его (их) на крючки и петли, или на ленту «контакт», ленту «контакт» через рамку по бокам бинда. Перед сном бинд снимается также в положении «лежа».

Противопоказания:

- наличие открытых ран (потертости, порезы и т.д.),
- дерматиты,
- гнойничковые инфекции.

По мере загрязнения рекомендуется ручная стирка при $t\ 40^{\circ}\text{C}$ с использованием мягких моющих средств. Не рекомендуется применять другие виды чистки, не указанные на маркировке изделия.

Бинды транспортируются всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 15150.

Бинды должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Изготовитель гарантирует соответствие биндов требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок - 40 дней со дня покупки.

Срок службы изделия - 1 год.

Заведующий отделом ПиО

В.П. Петров



В. С. Гуторов

августа 2010 г.

ФГУП «МПРЦ «Здоровье» Минздравсоцразвития России

ПАМЯТКА

**по пользованию бандажом-грацией-трусами ортопедическим
БНЗ-**

Регистрационное удостоверение № ФС 01012004/2450 - 05

Бандаж-грация-трусы ортопедический (далее по тексту - бандаж) применяется:

- для фиксации мышечно-апоневротических структур передней брюшной стенки с целью предотвращения опущения органов брюшной полости, малого таза, птозировании живота;
- при наличии высоких послеоперационных швов;
- при наличии грыж после операции на органах брюшной полости, малого таза, в том числе высоких грыж малых размеров;
- для профилактики грыжеобразования в послеоперационном периоде;
- для поддержки мышечного корсета в тонусе и физиологически правильном положении.

Применение:

Продолжительность носки бандажа определяется индивидуально по медицинским показаниям, лечащим врачом.

Противопоказания:

- наличие открытых ран (потертости, порезы и т.д.);
- дерматиты;
- гнойничковые инфекции.

По мере загрязнения рекомендуется ручная стирка при $t\ 40^{\circ}\text{C}$ с использованием мягких моющих средств.

Не рекомендуется применять другие виды чистки, не указанные на маркировке изделия.

Бандажи транспортируются всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 15150.

Бандажи должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.


Изготовитель гарантирует соответствие бандажей требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 40 дней со дня покупки.

Срок службы изделия - 1 год.

Заведующий отделом ПиО

В.П. Петров

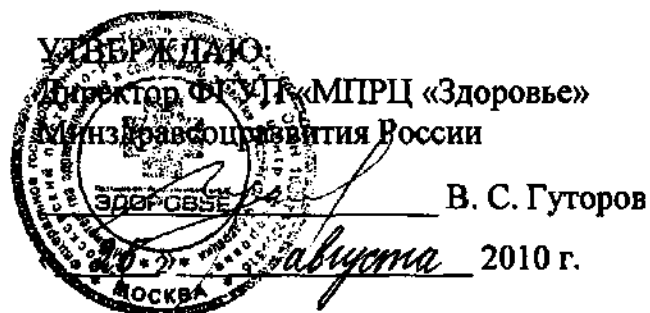

ФГУП «МПРЦ «Здоровье» Минздравсоцразвития России

ПАМЯТКА

**по пользованию бандажом-пantalонами ортопедическим
БНЗ-**

Регистрационное удостоверение № ФС 01012004/2450 - 05

Бандаж – pantalоны ортопедический (далее по тексту бандаж) назначается при заболеваниях органов брюшной полости:

- опущение органов брюшной полости, малого таза;
- наличие грыжи - послеоперационной, пупочной, белой линии живота и т.д.;
- для фиксации мышечно-апоневротических структур передней брюшной стенки;
- для профилактики грыжеобразования после оперативного лечения органов брюшной полости.

Применение:

Бандаж надевается на хлопчатобумажное белье в положении «лежа» на спине, на ровной поверхности. Поддержание живота снизу осуществляется за счет применения фигурных усилительных накладок, настроенных на передние и задние детали, и/или подхватом (подхватами) путем фиксации его на крючки и петли по бокам бандажа. Перед сном бандаж снимается также в положении «лежа».

По мере загрязнения рекомендуется ручная стирка при $t\ 40^{\circ}\text{C}$ с использованием мягких моющих средств.

Не рекомендуется применять другие виды чистки, не указанные на маркировке изделия.

Бандажи транспортируются всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 15150

Бандажи должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Изготовитель гарантирует соответствие бандажей требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 40 дней со дня покупки.

Срок службы изделия - 1 год.

Заведующий отделом ПиО

В.П. Петров



В. С. Гуторов

августа 2010 г.

ФГУП «МПРЦ «Здоровье» Минздравсоцразвития России

ПАМЯТКА

по пользованию бандажом - трусами ортопедическим

Регистрационное удостоверение № ФС 01012004/2450 - 05

Бандажи - трусы ортопедические (далее по тексту - бандажи) имеют широкий спектр применения в лечении заболеваний органов брюшной полости и назначаются:

- для фиксации мышечно-апоневротических структур передней брюшной стенки;
- при опущении органов брюшной полости и органов малого таза, а также для его профилактики;
- при опущении почек (нефроптозе), других заболеваниях почек, где требуется фиксация и стабилизация поясничного отдела позвоночника;
- для элевации опущенного живота, при ослаблении мышц брюшной стенки живота;
- для компенсации грыжевого дефекта при грыжах послеоперационных, диафрагмальных, пупочных, белой линии живота и т.д., малых размеров;
- для реабилитации в послеоперационном периоде на органах брюшной полости;
- для снижения болевого синдрома;
- для профилактики грыжеобразования в послеоперационном периоде.

Применение:

Бандаж надевается на хлопчатобумажное белье в положении «лежа» на спине, на ровной поверхности. Поддержание живота снизу осуществляется за счет применения фигурных усилительных накладок, настроенных на передние и задние детали, и/или подхватом путем фиксации его на крючки по бокам бандажа. Перед сном бандаж снимается также в положении «лежа».

По мере загрязнения рекомендуется ручная стирка при $t\ 40^{\circ}\text{C}$ с использованием мягких моющих средств.

Не рекомендуется применять другие виды чистки, не указанные на маркировке изделия.

Бандажи транспортируются всеми видами закрыты транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 15150.

Бандажи должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 и правилам пожарной безопасности.

Изготовитель гарантирует соответствие бандажей требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 40 дней со дня покупки.

Срок службы изделия - 1 год.

Заведующий отделом ПиО

В.П.Петров



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГУП «МПРЦ «Здоровье»
Минздравсоцразвития России

В. С. Гуторов

августа 2010 г.

ФГУП «МПРЦ «Здоровье» Минздравсоцразвития России

ПАМЯТКА

**по пользованию бандажом торакальным ортопедическим
БНЗ-**

Регистрационное удостоверение № ФС 01012004/2450 - 05

Бандажи торакальные ортопедические (далее по тексту - бандажи) предназначены для фиксации реберно-мышечного каркаса в реабилитационном периоде после операции на грудной клетке, на сердце, после травм грудной клетки.

Применение:

Бандаж надевается на асептическую повязку или на хлопчатобумажное белье в положении «лежа» на спине.

Противопоказания:

Выраженная сердечно-легочная недостаточность.

По мере загрязнения рекомендуется ручная стирка при $t\ 40^{\circ}\text{C}$ с использованием мягких моющих средств.

Не рекомендуется применять другие виды чистки, не указанные на маркировке изделия.

Бандажи транспортируются всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 15150.

Бандажи должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Изготовитель гарантирует соответствие бандажей требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 40 дней со дня покупки.

Срок службы изделия- 1 год.

Заведующий отделом ПиО

В.П. Петров



Директор ФГУП «МПРЦ «Здоровье»
Минздравсоцразвития России

В. С. Гуторов

августа 2010 г.

ФГУП «МПРЦ «Здоровье» Минздравсоцразвития России

ПАМЯТКА

**по пользованию бандажами ортопедическими для подводного
вытяжения позвоночника
БНЗ-**

Регистрационное удостоверение № ФС 01012004/2450 - 05

Бандажи ортопедические для подводного вытяжения позвоночника (далее по тексту - бандажи) применяются при:

- вертеброгенных болях, связанных с возникновением функциональных блокад двигательных сегментов;
- локальных гипертонусах;
- алгических миотендинозах;
- вертеброгенных тракалгиях.

Применение:

Бандаж на нижние конечности фиксируется на нижних конечностях при помощи застежки на ленту протезную через два полукольца.

Бандаж грудной на теле при помощи шнуровки и застежки спереди на ленту протезную через два полукольца.

Бандаж - пояс фиксируется на теле при помощи шнуровки.

Противопоказания:

- наличие открытых ран, порезов, потертостей на коже;
- наличие гнойно-септического поражения кожи;
- наличие аллергических высыпаний на коже и других дерматологических заболеваний.

По мере загрязнения рекомендуется ручная стирка при $t\ 40^{\circ}\text{C}$ с использованием мягких моющих средств.

Не рекомендуется применять другие виды чистки, не указанные на маркировке изделия.

Бандажи транспортируются всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 15150.

Бандажи должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Изготовитель гарантирует соответствие бандажей требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 40 дней со дня покупки.

Срок службы изделия - 1 год.

Заведующий отделом ПиО

В.П. Петров



СВЕРЖДАЮ:
Директор ФГУП «МПРЦ «Здоровье»
Минздравсоцразвития России

В. С. Гуторов

августа 2010 г.

ФГУП «МПРЦ «Здоровье» Минздравсоцразвития России

ПАМЯТКА

**по пользованию биндом ортопедическим на верхнюю
конечность**

БНЗ-

Регистрационное удостоверение № ФС 01012004/2015 - 05

Бинд ортопедический на верхнюю конечность (далее по тексту - бинд) используется после мастэктомии с целью компрессии на отечную руку и для улучшения лимфотоксического оттока при лимфостазе.

Применение:

Бинд надевается утром после проведения санитарно-гигиенических процедур, лечебной физкультуры и «сдаивающего» массажа отечной руки. Рука присыпается тальком и здоровой рукой, одетой в резиновую перчатку, натягивается бинд.

Противопоказания:

- наличие открытых ран, порезов, потертостей на коже;
- наличие гнойно-септического поражения кожи;
- наличие аллергических высыпаний на коже и других дерматологических заболеваний.

При наличии отека 1 – 2 степени бинд ортопедический используется только при выполнении физической работы (мытьё посуды, уборка помещения, работа по даче и т.д.).

При наличии отека 3 – 4 степени бинд ортопедический носится в течение дня и снимается перед сном.

По мере загрязнения рекомендуется ручная стирка при $t\ 40^{\circ}\text{C}$ с использованием мягких моющих средств.

Не рекомендуется применять другие виды чистки, не указанные на маркировке изделия.

Бинды транспортируются всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 15150.

Бинды должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Изготовитель гарантирует соответствие биндов требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 40 дней со дня покупки.

Срок службы изделия - 1 год.

Заведующий отделом ПиО

В.П. Петров

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ФГУП «МПРЦ «Здоровье»
Минздравсоцразвития России

В. С. Гуторов

августа 2010 г.

ФГУП «МПРЦ «Здоровье» Минздравсоцразвития России

ПАМЯТКА

**по пользованию бандажом ортопедическим на голеностопный
сустав
БНЗ-**

Регистрационное удостоверение № ФС 01012004/2450 - 05

Бандаж ортопедический на голеностопный сустав (далее по тексту - бандаж) предназначен для фиксации голеностопного сустава при легкой нестабильности, при артрозах, артритах, теносиневитах, ахиллобурситах, в реабилитационный период после травм капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава, для профилактики травм во время занятий спортом.

Применение:

Бандаж надевается на хлопчатобумажное чулочно-носочное изделие. Сустав должен быть удобно фиксирован. Наружная фиксация голеностопного сустава осуществляется с целью стабилизации. Эффективное тепловое воздействие уменьшает болевые ощущения.

Противопоказания:

- наличие открытых ран (потертости, порезы и т.д.);
- дерматиты;
- наличие выраженной нестабильности голеностопного сустава.

При использовании бандажа недопустимо:

- наличие болевых ощущений;
- нарушение кровообращения в области фиксации (посинение кожи).

По мере загрязнения рекомендуется ручная стирка при $t\ 40^{\circ}\text{C}$ с использованием мягких моющих средств.

Не рекомендуется применять другие виды чистки, не указанные на маркировке изделия.

Бандажи транспортируются всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 15150.

Бандажи должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Изготовитель гарантирует соответствие бандажей требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 40 дней со дня покупки.

Срок службы изделия - 1 год.

Заведующий отделом ПиО

В.П. Петров



Директор ФГУП «МПРЦ «Здоровье»
Минздравсоцразвития России

В. С. Гуторов

августа 2010 г.

ФГУП «МПРЦ «Здоровье» Минздравсоцразвития России

ПАМЯТКА

**по пользованию бандажом ортопедическим на коленный сустав
БНЗ-**

Регистрационное удостоверение № ФС 01012004/2450 - 05

Бандаж ортопедический на коленный сустав (далее по тексту - бандаж) предназначен в реабилитационный период после травм и операций в области коленных суставов, для профилактики травм капсульно-связочного аппарата коленного сустава, при легкой нестабильности коленного сустава вследствие относительной недостаточности боковых и крестообразных связок, при артрозо-артритах, бурситах, гемартрозах, хронических подвывихах коленных суставов.

Применение:

Бандаж одевается на хлопчатобумажное чулочно-носочное изделие. Колено должно быть удобно фиксировано. Наружная фиксация коленного сустава осуществляется с целью стабилизации. Эффективное тепловое воздействие уменьшает болевые ощущения в положении «сидя» или «лежа».

Противопоказания:

- наличие открытых ран (потертости, порезы и т.д.);
- дерматиты;
- наличие выраженной нестабильности коленного сустава.

При использовании бандажа недопустимо:

- наличие болевых ощущений;
- нарушение кровообращения в области фиксации (посинение кожи).

По мере загрязнения рекомендуется ручная стирка при $t\ 40^{\circ}\text{C}$ с использованием мягких моющих средств.

Не рекомендуется применять другие виды чистки, не указанные на маркировке изделия.

Бандажи транспортируются всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 15150.

Бандажи должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.


Изготовитель гарантирует соответствие бандажей требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 40 дней со дня покупки.

Срок службы изделия - 1 год.

Заведующий отделом ПиО

В.П. Петров

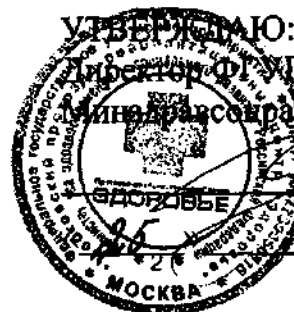

УТВЕРЖАЮ:
Директор ФГБУП «МПРЦ «Здоровье»
Минздравсопразвития России

В. С. Гуторов

августа 2010 г

ФГУП «МПРЦ «Здоровье» Минздравсопразвития России
ПАМЯТКА
по пользованию бюстгалтелями или полуграциями для фиксации
экзопротеза молочной железы ЛФ-к, ЛФ-

Регистрационное удостоверение № ФС 01012004/2450 - 05

Бюстгалтель или полуграция для фиксации экзопротеза молочной железы предназначены для женщин после одно- или двусторонней мастэктомии, радикальной резекции. Изготавливаются с одним или двумя хлопчатобумажными или трикотажными клапанами, втачанными в чашки бюстгалтера.

Размер изделия регулируется застежкой сзади или спереди на крючки и петли, или на обметанные петли и пуговицы, или на воздушные петли и пуговицы. Длина бретелей регулируется с помощью регуляторов для бретелей, или крючками и петлями на ленте, или обметанными петлями и пуговицами.

Применение:

Бюстгалтель или полуграция надевается утром после проведения санитарно-гигиенических процедур, предварительно вложив в карман бюстгалтера экзопротез молочной железы.

По мере загрязнения рекомендуется ручная стирка при t 40°C с использованием мягких моющих средств.

Не рекомендуется применять другие виды чистки, не указанные на маркировке изделия.

Бюстгалтеры, полуграции транспортируются всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 15150.

Бюстгалтеры, полуграции должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Изготовитель гарантирует соответствие бюстгалтеров, полуграций требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 40 дней со дня покупки.

Срок службы изделия - 1 год.

Заведующий отделом ПиО

В.П. Петров

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГУП «МПРЦ «Здоровье»
Минздравсоцразвития России
В. С. Гуторов
августа 2010 г.



ФГУП «МПРЦ «Здоровье» Минздравсоцразвития России
ПАМЯТКА
по пользованию купальником, или купальным костюмом для
фиксации экзопротеза молочной железы

К-

Регистрационное удостоверение № ФС 01012004/2450 - 05

Купальник, купальный костюм для фиксации экзопротеза молочной железы изготавливается с кармашком для экзопротеза молочной железы и назначается женщинам после мастэктомии.

Применение:

Купальник, купальный костюм применяется для плавания и занятий в бассейне.

По мере загрязнения рекомендуется ручная стирка (без замачивания!) при $t 40^{\circ}\text{C}$ с использованием мягких моющих средств.

Не рекомендуется применять другие виды чистки, не указанные на маркировке изделий.

Купальники, купальные костюмы транспортируются всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 15150.

Купальники, купальные костюмы должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Изготовитель гарантирует соответствие купальников, купальных костюмов требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 40 дней со дня покупки.

Срок службы изделия - 1 год.

Заведующий отделом ПиО

В.П. Петров





В. С. Гуторов

августа 2010 г.

ФГУП «МПРЦ «Здоровье» Минздравсоцразвития России

ПАМЯТКА

по пользованию чехлом трикотажным на экзопротез молочной железы ЧТ-

Регистрационное удостоверение № ФС 01012004/2450 - 05

Чехол трикотажный на экзопротез молочной железы (далее по тексту - чехол) предназначен женщинам после мастэктомии, и применяется для повседневной носки. Чехол необходим в гигиенических целях и с целью предохранения экзопротеза молочной железы от различных повреждений.

Применение:

Чехол надевается на экзопротез молочной железы, затем экзопротез в чехле вкладывается в карман бюстгальтера для фиксации экзопротеза молочной железы.

По мере загрязнения рекомендуется бережная стирка при $t\ 60^{\circ}\text{C}$ с использованием мягких моющих средств. Отжимать не выкручивая. Сушить в расправленном виде.

Не рекомендуется применять другие виды чистки, не указанные на маркировке изделия.

Чехлы транспортируются всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 15150.

Чехлы должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 и правилам пожарной безопасности.

Изготовитель гарантирует соответствие чехлов требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 40 дней со дня покупки.

Срок службы изделия - 1 год.

Заведующий отделом ПиО

В.П.Петров

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ФГУП «МПРЦ «Здоровье»
Минздравсоцразвития России

В. С. Гуторов

августа 2010 г.

ФГУП «МПРЦ «Здоровье» Минздравсоцразвития России

ПАМЯТКА

по пользованию чехлом на головодержатель ЧТ-

Регистрационное удостоверение № ФС 01012004/2450 - 05

Чехол на головодержатель (далее по тексту - чехол) предназначен для защиты головодержателя от загрязнений, и применяется для повседневной носки. Чехол необходим в гигиенических и декоративных целях.

Применение:

Чехол надевается на головодержатель, затем головодержатель фиксируется на шее пациента.

По мере загрязнения рекомендуется бережная стирка (без замачивания!) при t 40°C с использованием мягких моющих средств. Отжимать не выкручивая. Сушить в расправленном виде.

Не рекомендуется применять другие виды чистки, не указанные на маркировке изделия.

Чехлы транспортируются всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 15150.

Чехлы должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 и правилам пожарной безопасности.

Изготовитель гарантирует соответствие чехлов требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 40 дней со дня покупки.

Срок службы изделия - 1 год.

Заведующий отделом ПиО

В.П.Петров