

Назначение изделия

Корсеты ортопедические КРО-14, КРО-115, КРО-116, КРО-117, КРО-134, КРО-135 (далее - корсеты) применяются для фиксации грудного, ниже-грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника при травмах позвоночника, остеохондрозе, спондилолистезе, радикулите, при воспалении мышц спины, а также в качестве технических средств реабилитации для коррекции патологических изменений позвоночника.

Особые свойства изделия

Ребра жесткости (кости) в корсетах дозированно фиксируют и разгружают позвоночник, снижают болевой синдром, предотвращают патологические изменения в позвоночнике. Жесткость фиксации позвоночника зависит от количества костей, применяется от 5 до 9 штук в зависимости от показаний к назначению корсета. Кости вставляются под настроенную тесьму.

Техническая спецификация

Изготавливаются корсеты из следующих материалов:

КРО-14 из хлопчатобумажной ткани АСТ (состоит из 12 деталей) с клапаном из основной ткани; с левой стороны застежка на пуговицах, спереди и сзади на шнуровке (возможна шнуровка только сзади). Для лучшей фиксации верхне-грудного отдела позвоночника корсет КРО-14 снабжен тягами.

КРО-115 из ортопрена (неопрена), состоит из одной детали; КРО-116 и КРО-117 из ленты эластичной, состоят из двух деталей, которые стачиваются на специальной машине, швы стачивания уплотнены тесьмой.

КРО-134 и КРО-135 из ленты эластичной корсетной, состоят из трех деталей, которые стачиваются на специальной машине, швы стачивания уплотнены тесьмой.

Корсеты снабжены эластичными усилительными подхватами (КРО-115, КРО-116, КРО-117 и КРО-135 из ленты эластичной корсетной шириной 80 мм, КРО-134 из ленты эластичной корсетной шириной 60 мм), пристегивающимися к передним деталям на ленту «контакт» или на ленту «контакт» через рамку.

Корсеты застегиваются спереди на ленту «контакт».

Корсет индивидуального производства КРО-14 изготавливается по меркам заказчика, а корсеты серийного производства имеют следующие размеры: КРО-115, КРО-116 и КРО-117 с 62-70 по 158-166; КРО-134 и КРО-135 с 70-78 по 118-126.

В комплект поставки корсетов должно входить:

- корсет – 1 шт.;
- памятка по пользованию – 1 экз.;
- упаковка – 1 шт.

Для потребительского маркирования корсетов, изготовленных по индивидуальным заказам, должен применяться товарный ярлык с указанием следующих реквизитов:

- товарного знака предприятия-изготовителя;
- наименования предприятия-изготовителя и его почтовый адрес;
- наименования изделия;
- обозначения (номера модели);
- обозначения технических условий;
- состава сырья;
- информации о сертификации;
- символов по уходу за корсетом;
- даты изготовления (месяц, год);
- информации о приемке (штамп ОТК).

Номер заказа и дата изготовления должны быть вписаны шариковой ручкой.

Номер заказа и дата изготовления должны быть вписаны шариковой ручкой.

Для потребительского маркирования корсетов массового производства должен применяться товарный ярлык с указанием следующих реквизитов:

- товарного знака предприятия-изготовителя;
- наименования предприятия-изготовителя и его почтовый адрес;
- наименования изделия;
- обозначения (номера модели);
- обозначения технических условий;
- размера;
- состава сырья;
- информации о сертификации;
- информации о приемке (штамп ОТК);
- даты изготовления (месяц, год);
- штрих-кода.

К каждому корсету должна быть прикреплена контрольная лента с указанием:

- товарного знака предприятия-изготовителя;
- размера;
- символов по уходу.

Транспортировка

Транспортирование корсетов производится всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 15150, раздел 10, хранение 5.

Упаковка

Каждый корсет индивидуального изготовления упаковывается в пакет из бумаги оберточной по ГОСТ 8273. На каждом пакете указываются следующие данные, нанесенные шариковой ручкой:

- наименование изделия;
- обозначение (номер модели);
- номер заказа;
- фамилия заказчика.

Упаковочный ярлык изготавливается из бумаги по ГОСТ 6656 и печатается компьютерным способом.

Корсеты серийного производства упаковываются в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354. Корсеты одного обозначения складываются в пачку по 5 или 10 штук и упаковываются в бумагу оберточную по ГОСТ 8273. Пачка с корсетами заклеивается лентой клеевой на бумажной основе по ГОСТ 18251. На пачку с боковой стороны приклеивается упаковочный ярлык из бумажной самоклеящейся ленты с указанием следующих реквизитов:

- товарного знака предприятия-изготовителя;
- наименования предприятия-изготовителя и его почтовый адрес;
- наименования изделия;
- обозначения (номера модели);
- размера;
- количества корсетов;
- номера упаковщика;
- даты упаковки (месяц, год);
- штрих-кода.

Номер упаковщика проставляется штампом непосредственно на упаковке. Упаковочный ярлык изготавливается из бумаги по ГОСТ 6656 и печатается компьютерным способом.

Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие корсетов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации на корсеты – 40 дней со дня выдачи потребителю. В течение этого срока, в случае выявления производственного дефекта предприятие-изготовитель производит замену корсетов бесплатно.

Хранение

Корсеты хранятся на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий, при температуре от 18 до 20°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Средний срок сохранности 2 года.

Начальник ЭКТЛ



И.В.Фролова

Техник-конструктор



Ю.Ю.Фролова

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 4 листа
Директор ФГУП «МПРЦ «Здоровье»
Министерства здравоохранения России

В.С.Гуторов

