

**Федеральное государственное унитарное предприятие "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
(ФГУП "Кировское ПРОП" Росздрава)**

**Памятка по пользованию
Бандаж лечебный БЛП-«Грация»-«КПрОП»**

Киров, 2009

Бандаж лечебный х/б БЛП-«Грация»-«КПрОП» при опущении и заболевании почек предназначен для использования в лечебно-профилактических целях в условиях повседневной жизни.

Назначается при оперативных вмешательствах, послеоперационных грыжах почечной области и опущении почек. Изделие обеспечивает надежную поддержку и локальное прижатие патологических выпячиваний брюшной стенки, обеспечивает необходимую фиксацию почек в нужном положении и уменьшает их подвижность.

I. Описание конструкции.

Бандаж лечебный БЛП-«Грация»-«КПрОП» изготовлен из хлопчатобумажной ткани «Грация» на подкладке из бязи с двумя планшетами сзади, застежкой на пуговицах или контактной ленте, шнуровкой сзади для регулирования при изменении объема. В боковые швы по всей высоте бандажа втачена эластичная бандажная лента шириной 8см – 3 штуки. В нижней передней части бандажа пришит пояс-подхват из эластичной бандажной ленты.

Бандаж изготавливается с высокой спинкой во избежание давления верхнего края бандажа на область почек. Боковая резина в верхней части имеет скос.

II. Надевание и пользование бандажом.

Перед надеванием бандажа производится легкий массаж живота всей ладонью в направлении снизу вверх, при наличии грыжи ее следует сначала вправить.

Бандаж надевается на сорочку, лежа, при положении таза выше плеч.

Застегивается бандаж, начиная с нижней пуговицы, затем пристегиваются на крючки пояс-подхват и к чулкам подвязочные резинки или подбедренники.

Бандаж необходимо носить в течение всего дня.

Перед сном бандаж снимается, при грыжах, склонных к ущемлению, бандаж на ночь не снимается (по консультации с лечащим врачом).

Регулировка шнуровки рекомендуется только по мере надобности при похудении, нарастающей полноте или растяжении материала.

III. Уход за бандажом.

При загрязнении бандаж можно постирать в теплой воде до 40° с щеткой с мылом или с добавлением моющих средств типа «Лютос». Сушить в расправленном виде.

Бандаж следует оберегать от влаги и не хранить вблизи источника тепла.

IV. Транспортировка и хранение.

Бандажи транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 7000, при условии хранения 5 ГОСТ 15150.

Бандажи в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150 при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 70% при 25°C.

V. Указания по эксплуатации.

После транспортировки в условиях отрицательных температур бандаж в транспортной упаковке должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.

Правила эксплуатации бандажей отражены в этикетке.

VI. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие бандажей требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи при условии проведения не более 5 стирок.

610020, г.Киров, ул.Карла Маркса, д.28

телефон: (8332) 64-49-28