

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ДОКТОР МЕБЕЛЬ»

Якимов Ю.В.

2022 г.



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021

Руководство по эксплуатации

ДМ.69573749.006.РЭ

Дата последнего пересмотра: 25.11.2022 г.

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	6
2 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	46
3 УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	47
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	49
5 УТИЛИЗАЦИЯ	50
6 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ	51
7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	52
8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ	53
9 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	54
ПРИЛОЖЕНИЕ А	55
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	56
ПРИЛОЖЕНИЕ В	57
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	58
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	62
ПРИЛОЖЕНИЕ Е	65

Данное руководство по эксплуатации распространяется на медицинское изделие «Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021» (далее по тексту - Шкаф), предназначенный для размещения и хранения инструментов, стерильных расходных материалов, и других устройств/изделий, используемых во время хирургических обследований/операций в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Область применения: Использование в специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20 (например: помещение для ректороманоскопии (колоноскопии), палата (блок) реанимации и интенсивной терапии, процедурный кабинет, перевязочный кабинет, операционная, малая операционная, реанимационная).

Шкаф предназначен для использования квалифицированным медицинским и лабораторным персоналом в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Показания к применению шкафа: Размещение и хранение инструментов, стерильных расходных материалов, и других устройств/изделий, используемых во время хирургических обследований/операций.

Противопоказания к применению шкафа: Не установлены в рамках предусмотренного производителем применения.

Ожидаемые и предсказуемые побочные эффекты, связанные с применением шкафа по назначению: Не выявлены.

Риски применения шкафа: Анализ рисков применения был произведен ООО «Доктор мебель» в полном объеме и представлен в Файле менеджмента риска. Меры по снижению рисков применения шкафа приведены в мерах предосторожности.

Шкаф выпускается в сериях ДМ-1 и ДМ-6 в зависимости от используемых материалов.

Шкаф серии ДМ-1 представляют собой жёсткую каркасную конструкцию из алюминиевого профиля, с заполнением панелями полипропилена. Петли дверей и направляющие ящика выдвижного в данной серии оснащены доводчиками. Шкаф оснащается дверями распашными сплошными или дверями распашными со стеклом в раме из алюминиевого профиля. Наружная сторона дверей распашных сплошных и фасады выдвижных ящиков выполнены из гнутого оцинкованного листа, покрытого порошковой краской. Шкафы оснащены опорами, регулируемые для компенсации возможной неровности пола до 10 мм.

Шкафы серии ДМ-6 выполнены из нержавеющей стали, представляют собой жесткую каркасную конструкцию из стального профиля с или без заполнения боковых стенок. Шкаф с заполнением боковых стенок, оснащается дверями распашными сплошными из стали или дверями распашными со стеклом в раме из стального профиля. Шкафы установлены на опоры, регулируемые для компенсации возможной неровности пола до 10 мм.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508 и Приказу Минздрава РФ от 6 июня 2012 г. № 4н.

Перечень документов, на которые даны ссылки в данном руководстве по эксплуатации, приведен в Приложении А.

Принцип формирования артикулов для конкретизированного заказа шкафа приведен в Приложении Б.

Материалы, используемые при изготовлении шкафов одной серии, и обозначение серии для формирования артикула конкретизированного заказа приведены в Приложении В.

Внешний вид вариантов исполнения шкафа приведен в Приложении Г.

Список вариантов исполнения шкафа приведен в Приложении Д.

Расшифровка применяемых в маркировке символов приведена в Приложении Е.

Для записи обозначения шкафа при заказе и/или в документации указывают название изделия, артикул, высоту.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ / ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Средний горизонт – полка между верхней и нижней секциями шкафа, часть каркаса.

Нижний горизонт – нижняя горизонтальная часть каркаса шкафа.

Т x Ш x В – видимые размеры стеклянной вставки в дверь: толщина, ширина, высота. Вставка заходит в профиль двери на 4мм на каждую сторону.

Ш x Г x В – внутренние размеры выдвижного ящика: ширина, глубина, высота.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Шкаф изготавливается в вариантах исполнения согласно Приложению Д.

1.1.2 Внешний вид шкафа приведен в Приложении Г. Корпус шкафа и двери распашной со стеклом изготавливается серого цвета. Наружная сторона двери распашной сплошной (далее дверь) и/или фасада ящика выдвижного изготавливается зеленого цвета.

1.1.3 Габаритные размеры, количество и линейные размеры стеклянной вставки в дверь распашную, полку и /или ящика выдвижного изнутри, высота отделений между полками приведены ниже. Допустимые отклонения габаритных размеров и линейных размеров частей шкафа ± 4 мм, допустимое отклонение высоты отделений между полками ± 12 мм, допустимое отклонение толщины стекла $\pm 0,5$ мм.

Шкаф артикулов ДМ-1-101-01:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота – 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм x 347 мм – 4 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 425 мм x 355 мм – 1 шт.;

Отделения между полками высотой 293 мм - 5 шт.;

Дверь распашная размером по ширине и высоте 1526 мм x 421 мм. – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером по толщине, ширине, высоте (далее – Т x Ш x В) 4 мм x 1433 мм x 328 мм. – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм x 347 мм – 5 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 425 мм x 355 мм – 1 шт.;

Отделения между полками высотой 284 мм – 6 отд.

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1776 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклопанельная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 1683 мм х 328 мм – 1 шт.;

Шкаф артикулов ДМ-1-101-02:

Габаритные размеры шкафа: ширина- 475 мм, глубина-400 мм, высота-1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 355 мм – 1 шт.;

Отделения между полками высотой 293 мм - 5 шт.;

Дверь распашная размером по ширине и высоте 1526 мм х 421 мм. – 1 шт.;

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 5 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 355 мм – 1 шт.;

Отделения между полками высотой 284 мм – 6 отд.

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1776 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-1-101-03:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота - 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 744 мм х 328 мм – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 994 мм х 328 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-1-101-04:

Габаритные размеры шкафа: ширина- 475 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 1 шт.;

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-1-101-05:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота – 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 1 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 1 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 494 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклопанель в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 744 мм х 328 мм – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 4 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 235 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 1 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 1 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 494 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклопанель в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 994 мм х 328 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-1-101-06:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота - 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 1 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 1 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 494 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 4 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 235 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 1 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 1 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 494 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине

Шкаф артикулов ДМ-1-101-09:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота – 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 744 мм х 328 мм - 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 394 мм х 330 мм х 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 994 мм х 328 мм - 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-1-101-10:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота - 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм x 347 мм – 3 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 425 мм x 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш x Г x В) 394 мм x 330 мм x 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм x 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм x 421 мм – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм x 347 мм – 3 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 425 мм x 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш x Г x В) 394 мм x 330 мм x 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм x 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм x 421 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-1-101-11:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота – 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм x 347 мм – 2 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 425 мм x 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 425 мм x 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Ящик потайной внутренними размерами (Ш x Г x В) 413 мм x 302 мм x 276 мм – 1 шт.

Верхняя поверхность ящика потайного (Ш x Г x В) 429 мм x 302 мм – 1 шт.

Отделения в нижней секции шкафа высотой 170 мм – 2 отд.;

Дверь распашная потайная размерами по высоте и ширине 408 мм x 272 мм – 1 шт.

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм x 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм x 421 мм – 1 шт.;

Стеклопанель в дверь размером (Т x В x Ш) 4 мм x 744 мм x 328 мм – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм x 347 мм – 3 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 425 мм x 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 425 мм x 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 4 отд.;

Ящик потайной внутренними размерами (Ш x Г x В) 413 мм x 302 мм x 276 мм – 1 шт.

Верхняя поверхность ящика потайного (Ш x Г x В) 429 мм x 302 мм – 1 шт.

Отделения в нижней секции шкафа высотой 170 мм – 2 отд.;

Дверь распашная потайная размерами по высоте и ширине 408 мм x 272 мм – 1 шт.

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 1 шт.;

Стеклопанель в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 994 мм х 328 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-1-101-12:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота - 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 2 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Ящик потайной внутренними размерами (Ш х Г х В) 413 мм х 302 мм х 276 мм – 1 шт.

Верхняя поверхность ящика потайного (Ш х Г х В) 429 мм х 302 мм – 1 шт.

Отделения в нижней секции шкафа высотой 170 мм – 2 отд.;

Дверь распашная потайная размерами по высоте и ширине 408 мм х 272 мм. – 1 шт.

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 3 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 425 мм х 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 4 отд.;

Ящик потайной внутренними размерами (Ш х Г х В) 413 мм х 302 мм х 276 мм – 1 шт.

Верхняя поверхность ящика потайного (Ш х Г х В) 429 мм х 302 мм – 1 шт.

Отделения в нижней секции шкафа высотой 170 мм – 2 отд.;

Дверь распашная потайная размерами по высоте и ширине 408 мм х 272 мм.
– 1 шт.

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-1-101-13:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота – 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 3 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 825 мм х 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 825 мм х 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклопанель в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 744 мм х 328 мм - 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 825 мм х 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 825 мм х 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклопанельная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 994 мм х 328 мм – 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-1-101-14:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота - 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 3 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 825 мм х 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 825 мм х 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 825 мм х 355 мм – 1 шт.;
Средний горизонт по ширине и глубине 825 мм х 335 мм – 1 шт.;
Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 3 отд.;
Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;
Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 2 шт.;
Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-1-101-15:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина – 400 мм, высота – 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 4 шт.;
Нижний горизонт по ширине и глубине 825 мм х 355 мм – 1 шт.;
Отделения между полками высотой 293 мм - 5 шт.;
Дверь распашная размером по ширине и высоте 1526 мм х 421 мм. – 2 шт.;
Стеклянная вставка в дверь размером (Т х Ш х В) 4 мм х 1433 мм х 328 мм – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 5 шт.;
Нижний горизонт по ширине и глубине 825 мм х 355 мм – 1 шт.;
Отделения между полками высотой 284 мм – 6 отд.
Дверь распашная размером по высоте и ширине 1776 мм х 421 мм– 2 шт.;
Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 1683 мм х 328 мм – 2 шт;

Шкаф артикулов ДМ-1-101-16:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина – 400 мм, высота - 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 825 мм x 347 мм – 4 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 825 мм x 355 мм – 1 шт.;

Отделения между полками высотой 293 мм - 5 шт.;

Дверь распашная размером по ширине и высоте 1526 мм x 421 мм. – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 825 мм x 347 мм – 5 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 825 мм x 355 мм – 1 шт.;

Отделения между полками высотой 284 мм – 6 отд.

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1776 мм x 421 мм– 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-1-101-17:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота – 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм x 347 мм – 2 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 416 мм x 355 мм – 2 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 825 мм x 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм x 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш x Г x В) 386 мм x 330 мм x 102 мм – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм x 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 494 мм x 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм x 421 мм – 2 шт.;

Стеклопанель в дверь размером (Т x В x Ш) 4 мм x 744 мм x 328 мм – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм x 347 мм – 3 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 416 мм x 355 мм – 2 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 825 мм x 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 4 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм x 355 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш x Г x В) 386 мм x 330 мм x 102 мм – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм x 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 494 мм x 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм x 421 мм – 2 шт.;

Стеклопанель в дверь размером (Т x В x Ш) 4 мм x 994 мм x 328 мм – 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-1-101-18:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота - 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм x 347 мм – 2 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 416 мм x 355 мм – 2 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 825 мм x 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм x 347 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш x Г x В) 386 мм x 330 мм x 102 мм – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм x 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 494 мм x 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм x 421 мм – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм x 347 мм – 3 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 416 мм x 355 мм – 2 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 825 мм x 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 4 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм x 355 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 4 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш x Г x В) 386 мм x 330 мм x 102 мм – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм x 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 494 мм x 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм x 421 мм – 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-1-101-19:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота – 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм x 347 мм – 2 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 416 мм x 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 825 мм x 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм x 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш x Г x В) 386 мм x 330 мм x 281 мм – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 329 мм x 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклопанельная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 744 мм х 328 мм – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 3 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 416 мм х 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 825 мм х 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 4 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 281 мм – 2шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 329 мм х 421 мм – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклопанельная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 994 мм х 328 мм – 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-1-101-20:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота - 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм x 347 мм – 2 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 416 мм x 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 825 мм x 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм x 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш x Г x В) 386 мм x 330 мм x 281 мм – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 329 мм x 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм x 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм x 421 мм – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 855 мм x 344 мм – 3 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 416 мм x 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 860 мм x 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 262 мм – 4 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм x 344 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами по ширине, глубине, высоте (далее Ш x Г x В) 386 мм x 330 мм x 281 мм – 2шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 329 мм х 421 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-1-101-21:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота – 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 2 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 416 мм х 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 825 мм х 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм – 4 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклопанель в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 744 мм х 328 мм – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 3 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 416 мм х 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 825 мм х 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 4 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 386 мм х 330 мм х 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм х 421 мм – 4 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм х 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм х 421 мм – 2 шт.;

Стеклопанель в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 994 мм х 328 мм – 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-1-101-22:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота - 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм х 347 мм – 2 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 416 мм х 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 825 мм х 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 3 отд.;
Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм x 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;
Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш x Г x В) 386 мм x 330 мм x 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм x 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм x 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 837 мм x 421 мм – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка в верхней секции шкафа размером по ширине и глубине 825 мм x 347 мм – 3 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 416 мм x 355 мм – 1 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 825 мм x 335 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 269 мм – 4 отд.;

Полка в нижней секции шкафа размером по ширине и глубине 416 мм x 347 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 320 мм – 2 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш x Г x В) 386 мм x 330 мм x 102 мм – 4 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 163 мм x 421 мм. – 4 шт.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 660 мм x 421 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1087 мм x 421 мм – 2 шт.

Шкаф артикула ДМ-1-101-27:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота - 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 416 мм х 347 мм – 7 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 416 мм х 355 мм – 2 шт.;

Отделения между полками в левой секции шкафа высотой 278 мм – 6 отд.;

Отделение между полками в правой секции шкафа сверху высотой 200 мм – 1 отд.;

Отделение между полками в правой секции шкафа высотой 1182 мм – 1 отд.;

Отделение между полками в правой секции шкафа снизу высотой 355 мм – 1 отд.;

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1776 мм х 421 мм – 2 шт.

Шкаф артикулов ДМ-6-101-01:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота - 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 433 мм х 364 мм – 5 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 433 мм х 379 мм – 1 шт.;

Отделения между полками высотой 284 мм - 5 шт.;

Дверь распашная размером по ширине и высоте 1533 мм х 469 мм. – 1 шт.;

Стеклопанель в дверь размером (Т х Ш х В) 4 мм х 1433 мм х 369 мм. – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 433 мм х 364 мм – 6 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 433 мм х 379 мм – 1 шт.;

Отделения между полками высотой 275 мм – 6 отд.

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1783 мм х 469 мм – 2 шт.;
Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 1683 мм х 369 мм – 1 шт;

Шкаф артикулов ДМ-6-101-02:

Габаритные размеры шкафа: ширина- 475 мм, глубина-400 мм, высота-1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 433 мм х 364 мм – 5 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 433 мм х 379 мм – 1 шт.;

Отделения между полками высотой 284 мм - 5 шт.;

Дверь распашная размером по ширине и высоте 1533 мм х 469 мм. – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 433 мм х 364 мм – 6 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 433 мм х 379 мм – 1 шт.;

Отделения между полками высотой 275 мм – 6 отд.

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1783 мм х 469 мм– 2 шт.

Шкаф артикула ДМ-6-101-03:

Габаритные размеры шкафа: ширина- 475 мм, глубина - 400 мм, высота - 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 443 мм х 364 мм – 4 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 433 мм х 378 мм – 1 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 433 мм х 379 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 233 мм – 3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 360 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 765 мм х 469 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 765 мм х 469 мм – 1 шт.;

Стеклопанельная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 665 мм х 369 мм – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 364 мм – 6 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 433 мм х 378 мм – 1 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 433 мм х 379 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 232 мм – 4 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 360 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 765 мм х 469 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 765 мм х 469 мм – 1 шт.;

Стеклопанельная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 915 мм х 369 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-6-101-04:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота – 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 433 мм х 364 мм – 2 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 433 мм х 378 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 233 мм – 3 отд.;

Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 389 мм х 324 мм х 159 мм – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 381 мм х 469 мм – 2 шт.;
Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 765 мм х 469 мм – 1 шт.;
Стеклопанель в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 665 мм х 369 мм – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 433 мм х 364мм – 3 шт.;
Средний горизонт по ширине и глубине 433 мм х 378 мм – 1 шт.;
Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 232 мм – 4 отд.;
Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 389 мм х 324 мм х 159 мм – 2 шт.;
Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 381 мм х 469 мм – 2 шт.;
Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1015 мм х 469 мм – 1 шт.;
Стеклопанель в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 915 мм х 369 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-6-101-05:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 475 мм, глубина - 400 мм, высота - 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 433 мм х 364 мм – 2 шт.;
Средний горизонт по ширине и глубине 433 мм х 378 мм – 1 шт.;
Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 233 мм – 3 отд.;
Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 389 мм х 324 мм х 159 мм – 2 шт.;

Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 381 мм х 469 мм. – 2 шт.;
Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 765 мм х 469 мм – 1 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 433 мм х 364мм – 3 шт.;
Средний горизонт по ширине и глубине 433 мм х 378 мм – 1 шт.;
Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 232 мм – 4 отд.;
Ящик выдвижной внутренними размерами (Ш х Г х В) 389 мм х 324 мм х 159 мм – 2 шт.;
Фасад ящика выдвижного размером по высоте и ширине: 381 мм х 469 мм. – 2 шт.;
Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1015 мм х 469 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-6-101-13.:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота - 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 858 мм х 364 мм – 3 шт.;
Средний горизонт по ширине и глубине 858 мм х 378 мм – 1 шт.;
Нижний горизонт по ширине и глубине 858 мм х 379 мм – 1 шт.;
Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 233 мм – 3 отд.;
Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 360 мм – 2 отд.;
Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 765 мм х 445 мм – 2 шт.;
Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 765 мм х 445 мм – 2 шт.;

Стеклопанель в дверь размером (Т x В x Ш) 4 мм x 665 мм x 345 мм – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм x 347 мм – 4 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 858 мм x 378 мм – 1 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 858 мм x 379 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 232 мм – 4 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 360 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 765 мм x 445 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1015 мм x 445 мм – 1 шт.;

Стеклопанель в дверь размером (Т x В x Ш) 4 мм x 915 мм x 345 мм – 1 шт.

Шкаф артикулов ДМ-6-101-14:

Габаритные размеры шкафа: ширина- 900 мм, глубина - 400 мм, высота -1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 858 мм x 364 мм – 3 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 858 мм x 378 мм – 1 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 858 мм x 379 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 233 мм – 3 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 360 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 765 мм x 445 мм – 2 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 765 мм x 445 мм – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 425 мм х 347 мм – 4 шт.;

Средний горизонт по ширине и глубине 858 мм х 378 мм – 1 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 858 мм х 379 мм – 1 шт.;

Отделения между полками в верхней секции шкафа высотой 232 мм – 4 отд.;

Отделения между полками в нижней секции шкафа высотой 360 мм – 2 отд.;

Дверь распашная нижняя размером по высоте и ширине 765 мм х 445 мм – 1 шт.;

Дверь распашная верхняя размером по высоте и ширине 1015 мм х 445 мм – 1 шт.

Шкаф артикула ДМ-6-101-15:

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина - 400 мм, высота – 1700 мм или 1950 мм;

Шкаф высотой 1700 мм:

Полка размером по ширине и глубине 858 мм х 364 мм – 4 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 858 мм х 378 мм – 1 шт.;

Отделения между полками высотой 284 мм - 5 отд.;

Дверь распашная размером по ширине и высоте 1533 мм х 445 мм – 2 шт.;

Стеклянная вставка в дверь размером (Т х В х Ш) 4 мм х 1433 мм х 345 мм – 2 шт.

Шкаф высотой 1950 мм:

Полка размером по ширине и глубине 858 мм х 364 мм – 5 шт.;

Нижний горизонт по ширине и глубине 858 мм х 378 мм – 1 шт.;

Отделения между полками высотой 275 мм – 6 отд.

Дверь распашная размером по высоте и ширине 1783 мм х 445 мм – 2 шт.;

Стеклопанель в дверь размером (Т x В x Ш) 4 мм x 1683 мм x 345 мм – 1 шт;

Шкаф артикула ДМ-6-103-01

Габаритные размеры шкафа: ширина - 600 мм, глубина – 400 мм, высота – 1700 мм;

Полка размером по ширине и глубине 600 мм x 400 мм – 5 шт.;

Отделения между полками высотой 312 мм – 4 отд.

Шкаф артикула ДМ-6-103-03

Габаритные размеры шкафа: ширина - 600 мм, глубина – 400 мм, высота - 1950 мм;

Полка размером по ширине и глубине 600 мм x 400 мм – 1 шт.;

Полка размером по ширине и глубине 550 мм x 354 мм – 4 шт.;

Отделения между полками высотой 352 мм – 4 отд.

Шкаф артикула ДМ-6-103-05

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина – 400 мм, высота – 1700 мм;

Полка размером по ширине и глубине 900 мм x 400 мм – 1 шт.;

Полка размером по ширине и глубине 845 мм x 350 мм – 4 шт.;

Отделения между полками высотой 312 мм – 4 отд.

Шкаф артикула ДМ-6-103-07

Габаритные размеры шкафа: ширина - 900 мм, глубина – 400 мм, высота – 1900 мм;

Полка размером по ширине и глубине 900 мм x 400 мм – 1 шт.;

Полка размером по ширине и глубине 845 мм x 350 мм – 4 шт.;

Отделения между полками высотой 352 мм – 4 отд.

1.1.4 Масса шкафа приведена в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	Высота	Масса шкафа, кг, $\pm 10\%$
ДМ-1-101-01	1700	51,2
	1950	56,2
ДМ-1-101-02	1700	54
	1950	59,6
ДМ-1-101-03	1700	52,3
	1950	57,6
ДМ-1-101-04	1700	53,7
	1950	59,2
ДМ-1-101-05	1700	56,2
	1950	67,4
ДМ-1-101-06	1700	57,1
	1950	62,2
ДМ-1-101-09	1700	64
	1950	70,9
ДМ-1-101-10	1700	65,4
	1950	72,5
ДМ-1-101-11	1700	57,5
	1950	62,8
ДМ-1-101-12	1700	58,8
	1950	64,4
ДМ-1-101-13	1700	85,9
	1950	93,7
ДМ-1-101-14	1700	88,6
	1950	103,5
ДМ-1-101-15	1700	84,1
	1950	98
ДМ-1-101-16	1700	89,9
	1950	105
ДМ-1-101-17	1700	96,9
	1950	112,2
ДМ-1-101-18	1700	99,6

Артикул	Высота	Масса шкафа, кг, $\pm 10\%$
	1950	116,3
ДМ-1-101-19	1700	95,7
	1950	110,7
ДМ-1-101-20	1700	98,4
	1950	118,3
ДМ-1-101-21	1700	100,8
	1950	116,1
ДМ-1-101-22	1700	103,5
	1950	120,1
ДМ-1-101-27	1950	102,9
ДМ-6-101-01	1700	50
	1950	55,4
ДМ-6-101-02	1700	51
	1950	56,4
ДМ-6-101-03	1700	51
	1950	56,4
ДМ-6-101-04	1700	49
	1950	54,4
ДМ-6-101-05	1700	50
	1950	55,4
ДМ-6-101-13	1700	77
	1950	82,8
ДМ-6-101-14	1700	78
	1950	83,8
ДМ-6-101-15	1700	64,2
	1950	80,9
ДМ-6-103-01	1700	24
ДМ-6-103-03	1950	19,6
ДМ-6-103-05	1700	23
ДМ-6-103-07	1900	25,1

1.1.5 Полка шкафа выдерживает предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку ($15 \pm 1,0$) кг.

1.1.6 Полка шкафа артикулов ДМ-6-102-01, ДМ-6-102-02, ДМ-6-103-01, ДМ-6-103-03, ДМ-6-103-05, ДМ-6-103-07 выдерживает предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку ($30 \pm 1,0$) кг.

1.1.7 Дно ящика выдвижного выдерживает предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку ($15,0 \pm 1,0$) кг;

1.1.8 Шкаф выдерживает совокупную предельную рабочую нагрузку с учетом предельной равномерно распределенной нагрузки на каждую полку и ящик выдвижной в соответствии со значениями, приведенными в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Высота	Совокупная предельная рабочая нагрузка, кг
ДМ-1-101-01	1700	75
	1950	90
ДМ-1-101-02	1700	75
	1950	90
ДМ-1-101-03	1700	75
	1950	90
ДМ-1-101-04	1700	75
	1950	90
ДМ-1-101-05	1700	90
	1950	105
ДМ-1-101-06	1700	90
	1950	105
ДМ-1-101-09	1700	105
	1950	120
ДМ-1-101-10	1700	105
	1950	120
ДМ-1-101-11	1700	90
	1950	105
ДМ-1-101-12	1700	90
	1950	105
ДМ-1-101-13	1700	75
	1950	90

Артикул	Высота	Совокупная предельная рабочая нагрузка, кг
ДМ-1-101-14	1700	75
	1950	90
ДМ-1-101-15	1700	75
	1950	90
ДМ-1-101-16	1700	75
	1950	90
ДМ-1-101-17	1700	135
	1950	150
ДМ-1-101-18	1700	135
	1950	150
ДМ-1-101-19	1700	105
	1950	120
ДМ-1-101-20	1700	105
	1950	120
ДМ-1-101-21	1700	135
	1950	150
ДМ-1-101-22	1700	135
	1950	150
ДМ-1-101-27	1950	135
ДМ-6-101-01	1700	150
	1950	180
ДМ-6-101-02	1700	150
	1950	180
ДМ-6-101-03	1700	150
	1950	180
ДМ-6-101-04	1700	150
	1950	180
ДМ-6-101-05	1700	150
	1950	180
ДМ-6-101-13	1700	150
	1950	180
ДМ-6-101-14	1700	150

Артикул	Высота	Совокупная предельная рабочая нагрузка, кг
	1950	180
ДМ-6-101-15	1700	150
	1950	180
ДМ-6-103-01	1700	150
ДМ-6-103-03	1950	150
ДМ-6-103-05	1700	150
ДМ-6-103-07	1900	150

1.1.9 Шкаф оснащен ножками с опорами регулируемой высотой 120мм для установки на поверхности пола с перепадом высот не более 1 см. Шкафы артикулов ДМ-6-101-01, ДМ-6-101-02, ДМ-6-101-03, ДМ-6-101-04, ДМ-6-101-05, ДМ-6-101-13, ДМ-6-101-14, ДМ-6-101-15 установлены на ножки с опорами регулируемой высотой 141мм спереди и на опоры колесные сзади, обеспечивающие устойчивость на твердой поверхности.

1.1.10 Шкаф на опорах колесных соответствует следующим требованиям:

1.1.10.1 Зазор между поверхностью пола и одной из опор колесных составляет не более 3 мм.

1.1.10.2 Усилие перемещения шкафа на опорах колесных без нагрузки по твердой плоской поверхности приведено в таблице 3.

Таблица 3

Артикул	Высота шкафа, номинальная, мм	Усилие перемещения без нагрузки, Н(кгс)
ДМ-6-101-01	1700	45 (4,6)
	1950	50 (5,2)
ДМ-6-101-02	1700	45 (4,6)
	1950	51 (5,3)
ДМ-6-101-03	1700	46 (4,7)
	1950	51 (5,3)
ДМ-6-101-04	1700	47 (4,8)
	1950	49 (5)

Артикул	Высота шкафа, номинальная, мм	Усилие перемещения без нагрузки, Н(кгс)
ДМ-6-101-05	1700	47 (4,8)
	1950	49 (5)
ДМ-6-101-13	1700	68 (7)
	1950	74 (7,6)
ДМ-6-101-14	1700	69 (7,1)
	1950	75 (7,7)
ДМ-6-101-15	1700	67 (6,9)
	1950	73 (7,5)

1.1.11 Зазоры в проемах дверей на сторону составляет не более 4 мм.

1.1.12 Двери распашные имеют механизм фиксации, предотвращающий их самопроизвольное открывание.

1.1.13 Двери распашные установлены на петли, обеспечивающие их плавное, без перекосов, открывание и закрывание с усилием не более 20 Н (2 кгс).

1.1.14 Зазоры в проемах между фасадом ящика выдвижного и проемом корпуса ящика выдвижного не превышают 4 мм.

1.1.15 Ящик выдвижной выдвигается по направляющим частичного выдвижения и имеет механизм фиксации, предотвращающий выпадение ящика из корпуса при выдвижении.

1.1.16 Ящик выдвижной имеет свободный ход без заеданий и перекосов. Усилие выдвигания ящика выдвижного без нагрузки составляет не более 25 Н (2,5 кгс).

1.1.17 Цвет лакокрасочных покрытий шкафов, изготовленных по одному заказу, должен быть одного цветового ряда.

1.1.18 Поверхности шкафа, полок, ящиков выдвижных устойчивы к многократной дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644.

1.1.19 Средний срок службы шкафа до списания составляет 8 лет с учётом срока службы покупных изделий и компонентов со сроком службы меньшим, чем срок службы шкафа.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

1.2 Сведения о сырье, материалах и покупных изделиях

1.2.1 Покупные опоры регулируемые изготовлены из полиэтилена высокого давления (ПЭВД, ПВД) или низкой плотности (ПЭНП, LDPE) и оцинкованной стали. Диапазон регулировки покупных опор регулируемых составляет не менее 10 мм.

1.2.2 Покупные опоры колесные изготовлены из стали с гальваническим покрытием, полиамида, полипропилена, ПЭВД, ПВД, ПЭНП с колесом из термопластичной резины. Диаметр опор колесных составляет 100 мм с допустимым отклонением $\pm 5\%$.

1.2.3 Шкаф изготовлен из материалов в соответствии с Приложением В.

1.3 Комплектность

1.3.1 В комплект поставки шкафа входят:

1 Шкаф одного артикула в соответствии с Приложением Б 1 шт.;

2 Руководство по эксплуатации ДМ.69573749.006.РЭ 1 шт.

1.3.2 Шкаф по желанию заказчика может поставляться в собранном и разобранном виде. Сборка шкафа должна осуществляться только представителями предприятия-изготовителя.

1.4 Упаковка

1.4.1 Перед упаковкой металлические части шкафа подвергаются обезжириванию и консервированию по группе II-1 ГОСТ 9.014 для условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

1.4.2 Потребительская упаковка представляет собой ящик из гофрированного картона, оклеенный клейкой лентой. Фасадные части шкафа укрываются воздушно-пузырчатой плёнкой из полиэтилена, шкаф оборачивается стрейч-плёнкой из полиэтилена, на углах устанавливаются уголки из полиуретана либо трубка из пенополиэтилена, затем шкаф упаковывается в ящик из гофрированного картона. Изнутри ящик выложен упаковочной бумагой или гофрированным картоном для предотвращения самопроизвольного перемещения шкафа внутри упаковки при транспортировании.

1.4.3 Не установленные на шкаф детали (механизмы, крепеж и пр.), а также эксплуатационная и товаросопроводительная документация упаковываются в пакет из полиэтилена и затем помещаются в потребительскую упаковку вместе со шкафом.

1.4.4 Для транспортирования шкаф в потребительской упаковке помещают в деревянный ящик. Перед упаковкой в транспортный ящик потребительская упаковка шкафа прокладывается поролоном. Для фиксации может быть использован шпагат и/или уголки.

1.4.5 Шкаф может транспортироваться в контейнерах в упаковке ВУ-1 по ГОСТ 9.014.

1.4.6 В транспортную упаковку вкладывается упаковочный лист, на котором указано:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование шкафа;
- количество мест;
- условный номер упаковщика;
- контролер ОТК;
- дата упаковывания.

2 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

2.1 Транспортирование шкафа должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

2.1.1 Размещение и крепление упаковок со шкафами в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

2.1.2 Транспортирование шкафа крытыми транспортными средствами должно осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от минус 50 до плюс 50 °С;

Относительная влажность до 100 % при температуре плюс 25 °С.

2.2 Шкаф должен храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

2.2.1 Хранение шкафа должно осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от плюс 5 до плюс 40 °С;

Относительная влажность до 80 % при температуре плюс 25 °С.

2.2.2 Хранение шкафа в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

3 УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Шкаф предназначен для эксплуатации внутри помещений в условиях специализированных медицинских помещений с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20 (например, помещение для ректороманоскопии (колоноскопии), процедурный кабинет, перевязочный кабинет, малая операционная и т.д.) в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Поверхности шкафа не предназначены для контакта с телом человека для достижения заявленной эффективности в рамках установленного производителем специфичного медицинского назначения.

3.2 Эксплуатация шкафа должна осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от плюс 10 до плюс 35 °С;

Относительная влажность до 80 % при плюс 25°С.

3.3 Меры предосторожности при применении шкафа:

- **Шкаф предназначен для применения в специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20, при обращении со шкафом необходимо пользоваться защитными медицинскими перчатками.**

- **Шкаф должен быть использован только по прямому назначению.**
- **Шкаф должен быть установлен на ровной горизонтальной поверхности с перепадом высоты не более 10 мм.**

- **Предельная максимальная равномерная нагрузка на горизонтальные поверхности шкафа не должна превышать значений, указанных в п.п. 1.1.5-1.1.7.**

- **Предельная максимальная равномерная нагрузка на шкаф не должна превышать значений, указанных в п. 1.1.8.**

- **Запрещается неравномерное нагружение полок и дна выдвижного ящика шкафа.**

- **Запрещается вставать и/или садиться на/в шкаф.**

- **Запрещается использовать шкаф, если имеются механические повреждения таких частей шкафа, как регулируемые опоры, петли дверей, механизмы фиксации дверей.**

- **При закрывании двери и задвигании ящика выдвижного необходимо соблюдать осторожность во избежание защемления рук.**

3.4 Меры предосторожности при обнаружении неисправностей

При обнаружении в ходе назначенного применения неисправностей (например, при возникновении потрескивания горизонтальных поверхностей, опор колесных или регулируемых опор) и/или механических повреждений частей шкафа, способных снизить устойчивость шкафа к нагружению, способных вызвать нарушение устойчивости шкафа, падение или опрокидывание, необходимо освободить шкаф от нагрузки и обратиться к предприятию-изготовителю.

При возникновении вопросов, связанных с безопасным применением шкафа, необходимо обращаться к предприятию-изготовителю.

3.5 Порядок установки шкафа:

Шкаф по желанию заказчика может поставаться в собранном и разобранном виде. Сборка шкафа осуществляется только представителями предприятия-изготовителя.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Очистка шкафа

Перед применением шкафа его поверхности должны быть подвергнуты предварительной дезинфекции и высушены.

Уход за шкафом заключается в ежедневной влажной уборке с использованием мягких салфеток или ткани и неагрессивных, не содержащих твердых абразивных веществ, моющих средств.

При ежедневной влажной уборке рекомендуется использовать 0,5 % раствор моющего средства по ГОСТ 25644.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать чистящие средства, которые содержат абразивы, хлор, кислоты и соду.

После окончания уборки шкаф следует насухо протереть.

4.2 Дезинфекция шкафа

Дезинфекцию наружных поверхностей шкафа проводят путем однократного протирания поверхностей 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644.

Дезинфекцию шкафа следует проводить перед применением, а также в случае загрязнения поверхностей шкафа биологическими жидкостями и потенциально контаминированными веществами.

Шкаф является нестерильным и не предназначен для стерилизации.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 Шкаф подлежит утилизации в соответствии с действующими на момент утилизации правилами и требованиями, включая требования местных организаций и правила утилизации в данном регионе.

5.2 Шкаф, не имевший контакт с биологическими жидкостями, относится к эпидемиологически безопасным медицинским отходам и должен утилизироваться совместно с твердыми коммунальными отходами.

5.3 Шкаф, имевший контакт с биологическими жидкостями, относится к эпидемиологически опасным медицинским отходам класса Б по СанПиН 2.1.3684-21 и перед утилизацией должен быть подвергнут обеззараживанию. После соответствующего обеззараживания шкаф может быть утилизирован совместно с твердыми коммунальными отходами.

**6 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ**

**ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские.
Общие технические условия»;**

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения и соблюдении мер предосторожности.

7.2 При нарушении мер предосторожности, условий эксплуатации, транспортирования и хранения потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации шкафа составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7.4 Гарантийный срок хранения шкафа составляет 5 лет.

7.5 Средний срок службы шкафа до списания составляет 8 лет с учётом срока службы покупных изделий и компонентов со сроком службы меньшим, чем срок службы шкафа.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Юридический адрес:

**Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Мебель»
(ООО «Доктор Мебель»)**

**108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский),
домовладение 4, строение 4, офис 511/1Д.**

Контактные данные:

Телефоны:

+7 (495) 134-00-22

Сайт:

www.doctormebel.ru

Электронная почта:

info@doctormebel.ru

Адрес производства:

**216400, Смоленская обл., г. Десногорск, территория Коммунально-
складская зона, строение № 82.**

**Рекламации, касающиеся качества шкафа, отправлять по адресу:
info@doctormebel.ru**

9 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Сервисное обслуживание и ремонт шкафа осуществляется по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Мебель»
(ООО «Доктор Мебель»)

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский),
домовладение 4, строение 4, офис 511/1Д.

Контактные данные:

Телефоны:

+7 (495) 134-00-22

Сайт:

www.doctormebel.ru

Электронная почта:

info@doctormebel.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки данным
руководстве по эксплуатации

Обозначение	Наименование
ГОСТ 9.014-78	Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16371-2014	Мебель. Общие технические условия.
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
МУ-287-113 от 30 декабря 1998 года	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
СП 2.1.3678-20	Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
Приказ Минздрава России от 06.06.2012 N 4н	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Принцип формирования артикула для конкретизированного заказа

Артикул варианта исполнения шкафа формируется в виде:

серия-AAA-XX.Кх.Фх,

где:

серия - обозначает материалы шкафа в соответствии с Приложением В
Таблицей В.1, Таблицей В.2 и Таблицей В.3.

AAA – признак вида шкафа:

- Значение 101 обозначает шкаф отдельно стоящий;
- Значение 103 обозначает шкаф с открытыми полками.

XX – признак конструктивного решения шкафа по внешнему виду в соответствии с Приложением Г и линейными размерами в соответствии с требованиями п. 1.1.3 данного руководства по эксплуатации.

Кх – признак цвета корпуса:

Номер обозначения цвета корпуса в соответствии с Таблицей Б.1;

Фхх – признак цвета фасада ящика выдвижного и цвета двери.

Номер обозначения цвета фасада ящика выдвижного и цвета двери в соответствии с Таблицей Б.1

При отсутствии возможности реализации какого-либо исполнения в артикул буква признака не добавляется.

Таблица Б.1 – Таблица идентификации сокращений обозначений цвета корпуса, цвета фасада ящика выдвижного и цвета двери

Признак	Значение признака	Аббревиатура обозначения в артикуле
Цвет каркаса		
	Серый	K2
Цвет фасада ящика выдвижного и цвет двери	Зеленый	Ф1

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Используемые при изготовлении шкафов материалы

Таблица В.1 – Таблица идентификации материалов шкафа серии ДМ-1
для формирования артикула

Материалы шкафа
Каркас: Профиль, прессованный из алюминиевых сплавов 6060 с анодно-окисным покрытием, скреплённый пластиковыми замками из ударопрочного АБС пластика
Корпус: Панель толщиной 16 мм из полипропилена
Фасады ящика выдвижного: Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской с наполнением панели толщиной 16 мм из полипропилена
Дверь распашная: Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской с шумопоглощающим материалом - базальтовые маты.
Дверь со стеклянной вставкой: Профиль, прессованный из алюминиевых сплавов 6060 с анодно-окисным покрытием по ГОСТ 22233, со вставкой из стекла толщиной 4 мм.
Дно и корпус ящика выдвижного: Панель толщиной 16 мм из полипропилена
Полки: Панель из декоративно-бумажного слоистого пластика толщиной 8 мм (HPL-HighPressureLaminate)



Таблица В.2 – Таблица идентификации материалов шкафа серии ДМ-6
для формирования артикула

Материалы шкафа
Каркас, корпус и полки: Металлический профиль высоколегированной нержавеющей стали марки AISI 304 или стали коррозионностойкой, жаропрочной, марки 08X18H10 профильным сечением 25x25, 20x20.
Дверь со стеклянной вставкой: Профиль, прессованный из алюминиевых сплавов 6060 с анодно-окисным покрытием по ГОСТ 22233, со вставкой из стекла толщиной 4 мм

ПРИЛОЖЕНИЕ Г


(обязательное)

Внешний вид шкафа

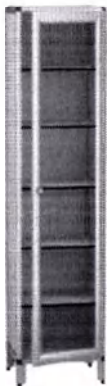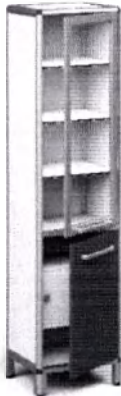
Шкаф серии ДМ-1		
 ДМ-1-101-01	 ДМ-1-101-02	 ДМ-1-101-03
 ДМ-1-101-04	 ДМ-1-101-05	 ДМ-1-101-06
 ДМ-1-101-09	 ДМ-1-101-10	 ДМ-1-101-11




ДМ-1-101-12

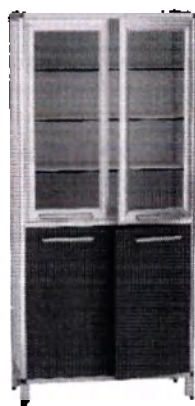


ДМ-1-101-13

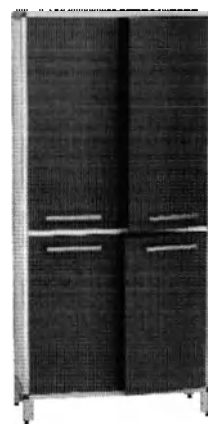


ДМ-1-101-14

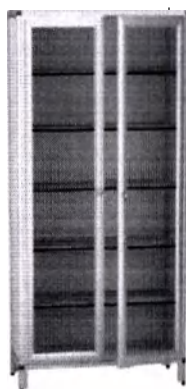


ДМ-1-101-15

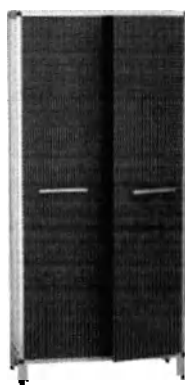


ДМ-1-101-16

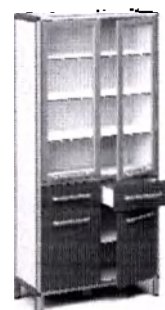


ДМ-1-101-17

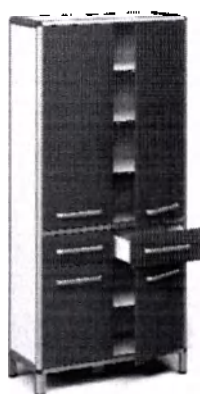


ДМ-1-101-18

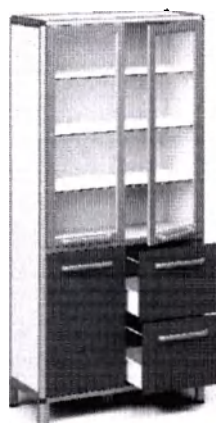


ДМ-1-101-19

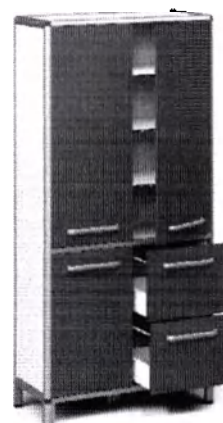

ДМ-1-101-20

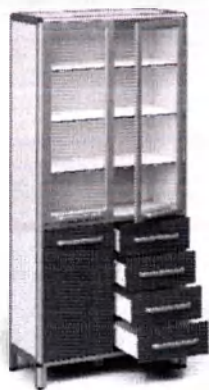

ДМ-1-101-21

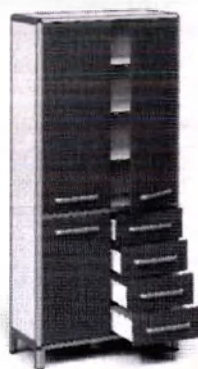


ДМ-1-101-22




ДМ-1-101-27

Шкаф медицинский серии ДМ-6

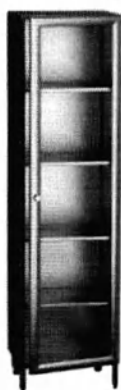

ДМ-6-101-01

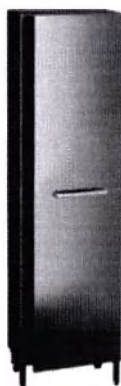

ДМ-6-101-02




ДМ-6-101-03



ДМ-6-101-04



ДМ-6-101-05

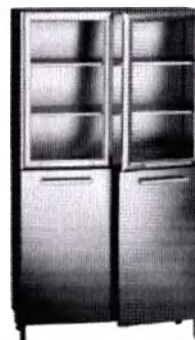

ДМ-6-101-13




ДМ-6-101-14




ДМ-6-101-15




ДМ-6-103-01

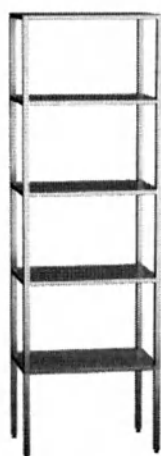

ДМ-6-103-03

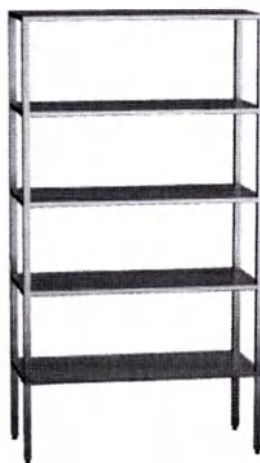

ДМ-6-103-05

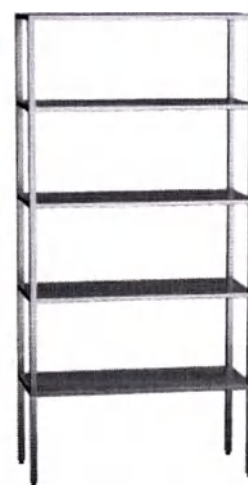

ДМ-6-103-07

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Перечень вариантов исполнения шкафа

№ п.п.	Вариант исполнения	Обозначение документа	конструкторского
1.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-1-101-01.К2	ДМ-1.ШК.69573749.006.001	
2.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-1-101-02.К2.Ф1	ДМ-1.ШК.69573749.006.002	
3.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-1-101-03.К2.Ф1	ДМ-1.ШК.69573749.006.003	
4.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-1-101-04.К2.Ф1	ДМ-1.ШК.69573749.006.004	
5.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-1-101-05.К2.Ф1	ДМ-1.ШК.69573749.006.005	
6.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-1-101-06.К2.Ф1	ДМ-1.ШК.69573749.006.006	
7.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-1-101-09.К2.Ф1	ДМ-1.ШК.69573749.006.007	
8.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-1-101-10.К2.Ф1	ДМ-1.ШК.69573749.006.008	
9.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-1-101-11.К2.Ф1	ДМ-1.ШК.69573749.006.009	
10.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-1-101-12.К2.Ф1	ДМ-1.ШК.69573749.006.010	
11.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-1-101-13.К2.Ф1	ДМ-1.ШК.69573749.006.011	
12.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-1-101-14.К2.Ф1	ДМ-1.ШК.69573749.006.012	
13.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-1-101-15.К2	ДМ-1.ШК.69573749.006.013	

14.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-1- 101-16.К2.Ф1	ДМ-1.ШК.69573749.006.014
15.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-1- 101-17.К2.Ф1	ДМ-1.ШК.69573749.006.015
16.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-1- 101-18.К2.Ф1	ДМ-1.ШК.69573749.006.016
17.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-1- 101-19.К2.Ф1	ДМ-1.ШК.69573749.006.017
18.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-1- 101-20.К2.Ф1	ДМ-1.ШК.69573749.006.018
19.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-1- 101-21.К2.Ф1	ДМ-1.ШК.69573749.006.019
20.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-1- 101-22.К2.Ф1	ДМ-1.ШК.69573749.006.020
21.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-1- 101-27.К2.Ф1	ДМ-1.ШК.69573749.006.025
22.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-6- 101-01	ДМ-6.ШК.69573749.006.034
23.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-6- 101-02	ДМ-6.ШК.69573749.006.035
24.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-6- 101-03	ДМ-6.ШК.69573749.006.036
25.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-6- 101-04	ДМ-6.ШК.69573749.006.037
26.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-6- 101-05	ДМ-6.ШК.69573749.006.038
27.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-6- 101-13	ДМ-6.ШК.69573749.006.039
28.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-6- 101-14	ДМ-6.ШК.69573749.006.040
29.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-6- 101-15	ДМ-6.ШК.69573749.006.041
30.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-6- 103-01	ДМ-6.СТЛ.69573749.006.064
31.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-6- 103-03	ДМ-6.СТЛ.69573749.006.065

32.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-6- 103-05	ДМ-6.СТЛ.69573749.006.066
33.	Шкаф медицинский для инструментов по ТУ 32.50.30-006-69573749-2021 ДМ-6- 103-07	ДМ-6.СТЛ.69573749.006.067

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Символы, применяемые в маркировке

Символ	Обозначение
	Хрупкое. Осторожно
	Беречь от влаги
	Верх
	Знак соответствия при добровольной сертификации

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
65 (Шестидесять) листа(ов)
Генеральный директор
ООО «Доктор Мебель»
Якимов Ю. В.