



ФГУП «Самарское ПрОП»
Минздравсоцразвития
России

ПОДГОЛОВНИК К КРОВАТИ

ПК-010

ТУ 9452-905-03151254-2010

ПАСПОРТ





КОПИЯ ВЕРНА
Федеральное государственное учреждение «Самарское федеральное предприятие»
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
(ФГУП «Самарское ПрОП» Минздравсоцразвития России)

Зав. Самар. ф.з.з.п.

I. Общие сведения об изделии

- 1.1. Подголовник к кровати ПК-010 (рис. 1) предназначен в качестве опоры под голову и спину для инвалидов (или больных с длительным постельным режимом) в учреждениях социального обслуживания населения, медицинских учреждениях и в быту.
2. 1.2. Подголовник состоит из стальной рамы, опорной поверхности из хлопчатобумажной (капроновой) ленты, оснащен упорным устройством, обеспечивающим ручное ступенчатое регулирование угла наклона от 0° до 75° с шагом 15° .

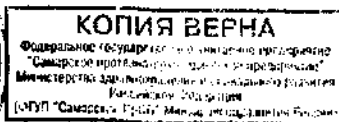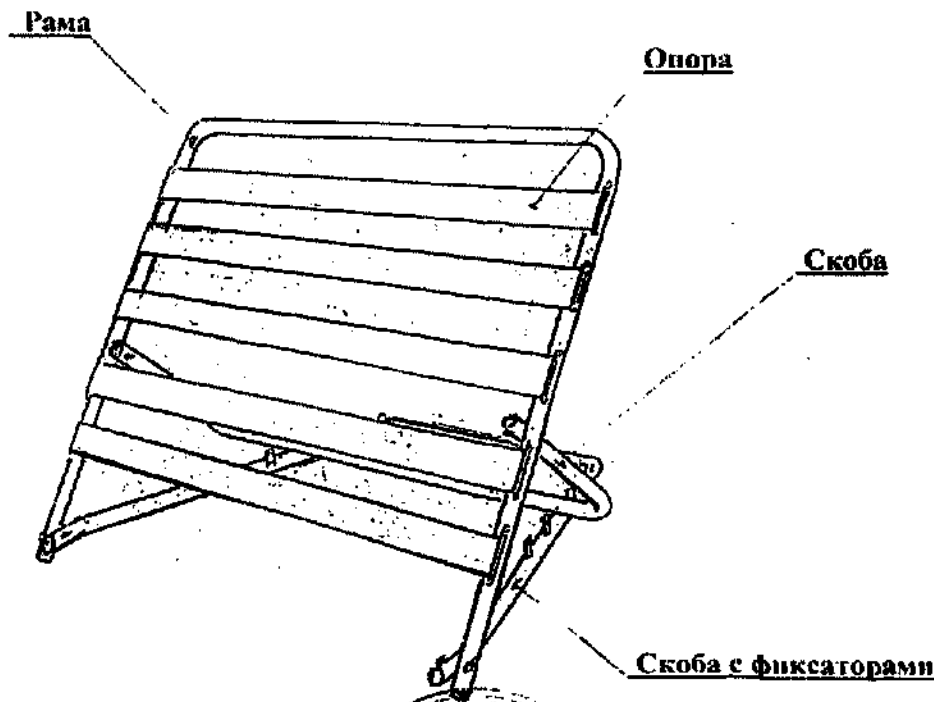

Зав. Кат. Зав.

2. Основные параметры и характеристики

2.1. Габаритные размеры и масса изделия должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Табл. 1

Обозначение типа изделия	Основные параметры			Масса изделия, кг	Масса пользователя, не более, кг
	Длина, мм	Ширина, мм	Угол подъема, град.		
ПК-010	590	680	15-75 (шаг 15)	2,5	125

2.2. В изделии использованы материалы, разрешенные к применению Минздравсоцразвития России.

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- подголовник – 1 шт.
- этикетка – 1 шт.
- паспорт – 1 шт.

4. Транспортировка и хранение

4.1. Транспортировка допускается всеми видами крытого транспорта.

Изделия должны быть надежно упакованы и закреплены от перемещения.

Допускается укладывать упакованные подголовники в штабеля до 10 шт.

4.2. Хранить упакованные изделия необходимо в закрытых помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, - каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и др. хранилища).

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

5. Подготовка изделия к эксплуатации

5.1. Освободить изделие от упаковки.

5.2. Протереть металлические части изделия мягкой влажной салфеткой.

5.3. Установить подголовник на кровать под необходимым углом и положить на него подушку.

6. Обслуживание и уход.


6.1. Необходимо предохранять поверхность изделия от ударов твердыми и острыми предметами.

7. Требования безопасности

7.1. Запрещается эксплуатировать подголовник при его неустойчивом положении.

7.2. Рабочий диапазон температур, при котором допускается эксплуатация изделия, - от +5°C до +50°C.

7.3. Не допускаются к эксплуатации лица, не ознакомленные с требованиями данного паспорта.

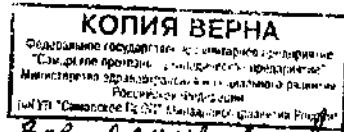

Ваш личный журнал