

Руководство по эксплуатации

КОРСЕТЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
КРО-202, КРО-203, КРО-204, КРО-205, КРО-206
/серийное производство/

1. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Корсеты ортопедические (далее – корсеты), предназначены для ортезирования и взрослых при повреждениях и заболеваниях различных отделов позвоночника. Корсеты назначаются с целью фиксации соответствующего отдела позвоночника в физиологически выгодном или корригированном положении, снятия нагрузки на межпозвонковые диски, предохранения мышц спины от чрезмерного напряжения, иммобилизации позвоночника после травм и оперативных вмешательств.

Корсеты выпускаются следующих типов:

Корсет пояснично-крестцовый **КРО-202**; ► корсет пояснично-крестцовый **КРО-205**;
Корсет противорадикулитный **КРО-203**; ► корсет грудопоясничный **КРО-206**;
Корсет поясничный **КРО-204**;

Корсеты ортопедические состоят из эластичных приемных гильз на соответствующий отдел позвоночника и усилены ребрами жесткости.

Корсеты изготавливаются шести типоразмеров серийно.

Способ фиксации корсетов на теле пользователя – застежка ворсовая типа «такт».

Корсеты (кроме КРО-203) снабжены усиливающим поясом-стяжкой.

2. НАДЕВАНИЕ И СНЯТИЕ КОРСЕТОВ

Корсеты надеваются на соответствующий отдел (отделы) позвоночника поверх хлопчатобельного белья (майки) в положении лежа на спине.


Для достижения стабильной и оптимально комфортной фиксации позвоночника ребра жесткости корсета необходимо предварительно от моделировать в соответствии с его анатомическим изгибом.

При надевании корсеты **КРО-202, КРО-203, КРО-205** ориентируют таким образом, чтобы нижняя граница корсета спереди находилась на уровне тазобедренного сочленения, сзади – на уровне крестцово-копчикового сочленения. Нижняя граница корсета спереди должна находиться под реберными дугами.

Корсет **КРО-204** при надевании ориентируют таким образом, чтобы срединная линия гильзы корсета находилась на уровне талии.

Корсет **КРО-206** при надевании ориентируют таким образом, чтобы нижняя граница корсета сзади находилась на 80-100 мм выше копчика, а верхняя граница – на 30-50 мм ниже углов лопаток. Верхняя граница корсета спереди должна проходить под основанием грудных желез.

Директор

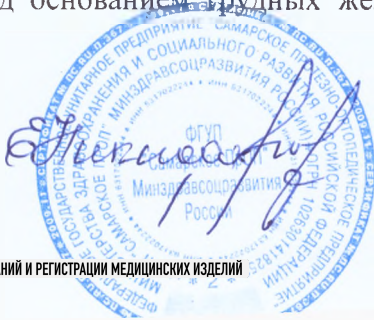

Е. Я. Никифоров

Корсеты фиксируются на теле путем самостоятельного затягивания гильз
спереди ворсовой застежкой «контакт».

Для обеспечения дополнительной регулируемой фиксации изделия на теле
пользователя корсеты (кроме КРО-203) снабжены усиливающим поясом-стяжкой.

Правильно надетый корсет должен плотно прилегать к телу, не оказывая
избыточного давления на костные выступы, кожные покровы, мягкие ткани и
не ограничивая при этом дыхательных движений. Ребра жесткости не должны
давить на позвоночник.

Для снятия корсета необходимо все действия произвести в обратном порядке.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОРСЕТА

Длительность пользования корсетом в течение дня определяется лечащим
врачом, но не должна превышать 8 часов.

Срок пользования корсетом определяется лечащим врачом, назначившим
изделие.

4. УХОД ЗА КОРСЕТОМ

В процессе эксплуатации изделие следует стирать вручную при температуре не
более 40 °С без использования хлорного отбеливателя.

Изделие нельзя замачивать, выкручивать, гладить утюгом.

При сушке избегать воздействия прямого солнечного света.

При соблюдении правил эксплуатации гарантийный срок носки корсета
составляет **6 месяцев** со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт
корсета бесплатно.

Директор



Е. Я. Никифоров

Сброшюровано

Е. Я. Никифоров

Директор

Е. Я. Никифоров
Е. Я. Никифоров

