

ФГУП «Самарское ПрОП»
Минздравсоцразвития
России

ПОРУЧНИ СТАЦИОНАРНЫЕ

ПМ, ПС

ТУ-9452-905-0315-1254-2010

П А С П О Р Т



КОПИЯ ВЕРНА
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Самарское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
(ФГУП "Самарское ПрОП" Минздравсоцразвития России)

Зав. педич. ф-том

I. Общие сведения об изделии

- 1.1. Поручни стационарные ПМ (модульные, прямые), поручни специальные ПС, (далее – поручни, рис. 1-3) предназначены для дополнительной опоры при перемещении и самообслуживании людей с ограничениями жизнедеятельности в учреждениях социального обслуживания населения и в быту.
- 1.2. Поручни изготавливаются из стальной трубы $\Phi 32\text{мм}$, на концах имеют фланцы с отверстиями под крепеж. Поручни имеют защитно-декоративное порошковое покрытие. Форма поручня обеспечивает безопасное расстояние между поручнем и поверхностью места крепления.
- 1.3. Поручни должны крепиться к стене и (или) полу шурупами $A6 \times 50\text{мм}$ с дюбелями.

Рис. 1
Поручень модульный прямой ПМ

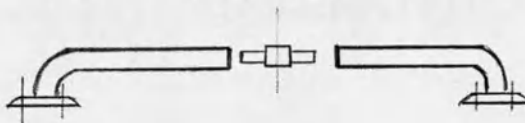


Рис. 2
Поручень специальный ПС (к раковине, напольный)


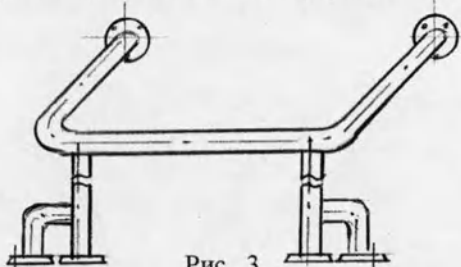


Рис. 3
Поручень специальный ПС (к раковине, настенный)

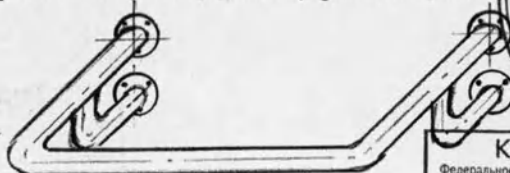

КОПИЯ ВЕРНА

Федеральное государственное унитарное предприятие
"Самарское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
(ФГУП "Самарское ПрОП" Минздрава России)

Зав. п. н. п. Л. Зав.

2. Основные параметры и характеристики

- 2.1. Длину поручней модульных прямых ПМ, конструкцию и назначение поручней специальных ПС определяет заказчик, при этом:
 - максимальная длина поручня модульного прямого ПМ не ограничена;
- 2.2. Минимальная длина свободного участка поручня составляет не менее 120 мм для обеспечения комфортного захвата кистью пользователя.
- 2.3. Форма поручня обеспечивают безопасное расстояние между поручнем и поверхностью места его крепления, равное не менее 56 мм.
- 2.4. В изделии использованы материалы, разрешенные к применению Минздравсоцразвития России.

3. Транспортировка и хранение


- 3.1. Транспортировка допускается всеми видами крытого транспорта. Изделия должны быть надежно закреплены от перемещения. Допускается укладывать поручни друг на друга стопкой до 4-х шт., в коробках – до 12-ти шт.
- 3.2. Хранить упакованные изделия необходимо в закрытых помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, - каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и др. хранилища). Условия хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

4. Подготовка изделия к эксплуатации

- 4.1. Освободить поручень от упаковки.
- 4.2. Промыть изделие теплой водой с добавлением моющих средств.
- 4.3. Закрепить изделие на стене шурупами с дюбелями.

5. Обслуживание и уход

- 5.1. Мыть изделие теплой водой с добавлением моющих средств. Не допускается применение кислот и органических растворителей.
- 5.2. Дезинфекцию проводить 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина.
- 5.3. Необходимо предохранять поверхность изделия от ударов твердыми и острыми предметами.

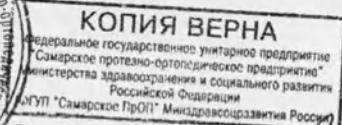

Зав. Рентг.

Handwritten signature

6 Требования безопасности

- 6.1. Запрещается эксплуатировать поручни, плохо закрепленные на стене или полу.
 6.2. Рабочий диапазон температур, при котором допускается эксплуатация изделия, - от +10°C до +40°C.
 6.3. Не допускаются к эксплуатации лица, не ознакомленные с требованиями данного паспорта.

7. Свидетельство о приемке

Поручень стационарный

(наименование изделия) (вариант исполнения)
 соответствует требованиям НД и признан годным к эксплуатации.

М.П. Дата выпуска _____
 (отметка ОКК)

8. Гарантийные обязательства

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативно-технической документации при соблюдении условий хранения, транспортировки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня выдачи изделия потребителю.
 В случае выхода из строя изделия в течение гарантийного срока предприятие – изготовитель при обращении по адресу:
 443031, г. Самара, ул. Демократическая, 47
 обязуется выполнить бесплатный ремонт изделия или произвести замену дефектных узлов.

9. Отметка о выдаче товара потребителю

М.П. торговой организации

Подпись продавца _____ Дата _____
 (без печати не действительно)

10. Дефектная ведомость (заполняется производителем)

№ п/п	Описание дефекта, дата	Устранение дефекта, дата	Отметка ОКК	Примечание

Просим Ваши замечания и отзывы о нашей продукции направлять по вышеуказанному адресу.

