



**ФГУП «Самарское ПрОП»**  
**Минздравсоцразвития**  
**России**

**КРЕСЛО ТУАЛЕТНОЕ**  
**КТУ-010, КТУ-011, КТ-012, КТ-021**

**ТУ 9452-903-03151254-2010**

**ПАСПОРТ**



**КОПИЯ ВЕРНА**  
Федеральное государственное унитарное предприятие  
"Самарское протезно-ортопедическое предприятие"  
Министерства здравоохранения и социального развития  
Российской Федерации  
(ФГУП "Самарское ПрОП" Минздравсоцразвития России)

*Зав. канд. фзгм*

# 1. Общие сведения об изделии.

- 1.1. Кресло туалетное предназначено для взрослых инвалидов и престарелых граждан массой не более 100кг при их самообслуживании и уходе за ними в учреждениях социального обслуживания населения и в быту.
- 1.2. Кресло выпускается в следующих исполнениях:
  - а) кресло туалетное, регулируемое по высоте, со съемной спинкой и подлокотниками – КТУ-010 (Рис. 1);
  - б) кресло туалетное на четырех колесах, оборудованных стояночными тормозами, регулируемое по высоте, со съемной спинкой и подлокотниками – КТУ-011 (Рис. 2);
  - в) кресло туалетное со съемными подлокотниками – КТ-012 (Рис. 3);
  - г) кресло туалетное со съемной спинкой и подлокотниками – КТ-021 (Рис. 4).

Кресла исполнений КТУ-010, КТУ-011, КТ-021 могут быть установлены над унитазом.

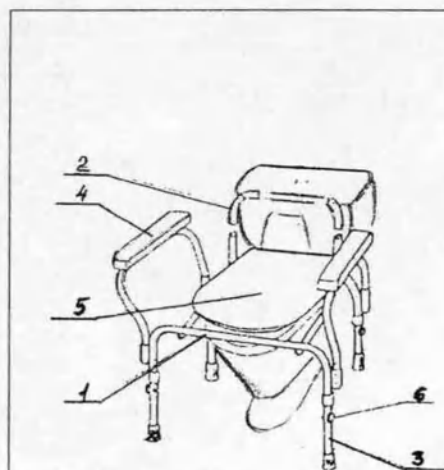


Рис. 1



Рис. 2

1 – каркас

2 – спинка

3 – ножки

4 – подлокотники

5 – сиденье с крышкой

6 – устройство фиксации

7 – колесо

8 – ведро (на рис. № 1, 2 – не показано)



## 10. Гарантийные обязательства

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативно-технической документации при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня выдачи изделия потребителю. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока предприятие – изготовитель при обращении по адресу:

443031, г. Самара, ул. Демократическая, 47

обязуется выполнить бесплатный ремонт изделия или произвести замену дефектных узлов.

## 11. Отметка о выдаче товара потребителю



М.П. торговой организации

Подпись продавца \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_  
(без печати не действительно)

## 12. Дефектная ведомость (заполняется производителем)

| №<br>п/п | Описание дефекта, дата | Устранение<br>дефекта, дата | Отметка<br>ОКК | Примечание |
|----------|------------------------|-----------------------------|----------------|------------|
|          |                        |                             |                |            |
|          |                        |                             |                |            |
|          |                        |                             |                |            |
|          |                        |                             |                |            |
|          |                        |                             |                |            |
|          |                        |                             |                |            |

Просим Ваши замечания и отзывы о нашей продукции направлять по вышеуказанному адресу.

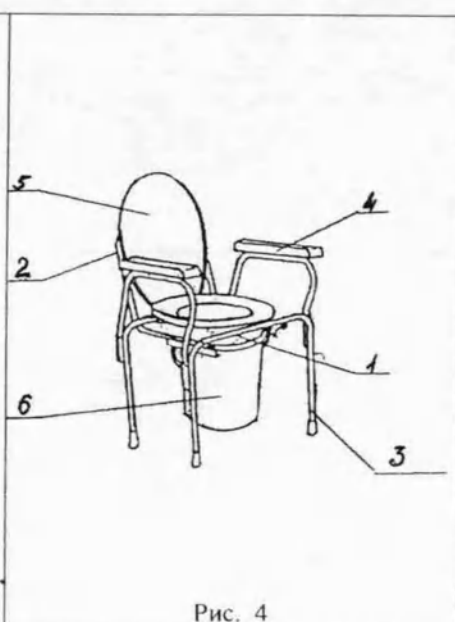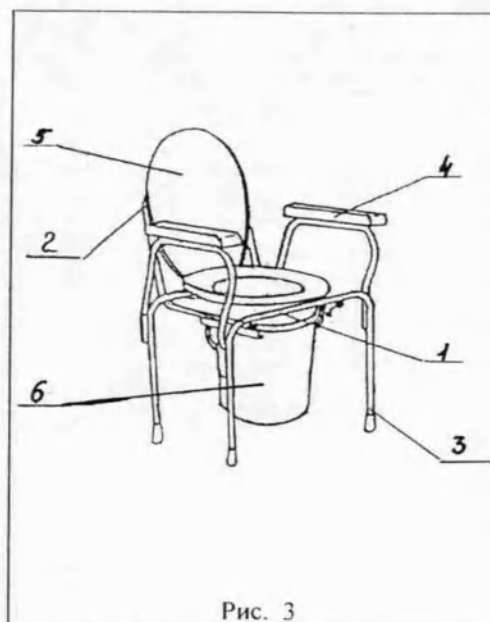

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 1 – каркас       | 5 – сиденье |
| 2 – спинка       | 6 – ведро   |
| 3 – ножки        |             |
| 4 – подлокотники |             |

## 2. Основные параметры и характеристики

2.1. Габаритные размеры, масса кресла указаны в таблице 1.

Табл. 1

| Обозначение<br>исполнений<br>кресла | Основные размеры, мм |        |                  |                   | Масса,<br>кг |
|-------------------------------------|----------------------|--------|------------------|-------------------|--------------|
|                                     | Длина                | Ширина | Высота<br>кресла | Высота<br>сиденья |              |
| КТУ-010                             | 570                  | 590    | 720-830          | 450-560           | 9,5          |
| КТУ-011                             |                      |        |                  |                   | 10,6         |
| КТ-012                              |                      |        | 700              | 450               | 8,8          |
| КТ-021                              |                      |        | 790              | 540               | 9,1          |

2.2. Кресла рассчитаны на пользователя массой до 100кг.

2.3. В изделия использованы материалы, разрешенные к применению Минздравом России.

### 3. Комплектность

#### 3.1. В комплект поставки входят:

- |                           |          |
|---------------------------|----------|
| - кресло                  | - 1 шт.; |
| - ведро с крышкой (судно) | - 1 шт.; |
| сиденье                   | - 1 шт.; |
| - этикетка                | - 1 шт.; |
| - паспорт                 | - 1 шт.  |

### 4. Транспортирование и хранение

- 4.1. Транспортировка допускается всеми видами крытого транспорта. Изделия должны быть надежно закреплены от перемещения. Допускается укладывать кресла друг на друга стопкой до 4 шт.
- 4.2. Хранить упакованные изделия необходимо в закрытых помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, - каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и др. хранилища).
- Условия хранения - 2 по ГОСТ 15150-69.

### 5. Подготовка изделия к эксплуатации

- 5.1. Освободить кресло туалетное от упаковки.
- 5.2. Установить ножки с учетом желаемой высоты сиденья (сиденье должно быть установлено горизонтально полу) и зафиксировать их винтами с колпачковой гайкой (для кресел КТУ-010, КТУ-011).
- 5.3. Установить спинку во втулки, расположенные позади кресла, вручную (для исполнений КТУ-010, КТУ-011, КТ-021).
- В случае использования кресла туалетного в качестве приставки к унитазу с компакт бачком - спинка не устанавливается.
- 5.4. Установить вручную один или два подлокотника (по желанию)
- 5.5. Промыть изделие теплой водой с добавлением моющих средств.

### 6. Порядок эксплуатации

- 6.1. Убедиться, что 2 колеса установлены на стояночные тормоза (для кресла КТУ-011).
- 6.2. Снять крышку с ведра и установить его в пазы передней части кресла туалетного.
- 6.3. Поднять крышку сиденья.
- 6.4. Запрещено облокачиваться и садиться на крышку сиденья кресла туалетного.

## 7. Обслуживание и уход

- 7.1. При эксплуатации кресла туалетного требуется периодически (не реже 1 раза в неделю) мыть его теплой водой с добавлением моющих средств типа «Лотос».
- 7.2. Необходимо предохранять поверхность изделия от ударов твердыми и острыми предметами.
- 7.3. У передвижного кресла исполнения КТУ-011 рекомендуется периодически проверять крепление колес, при необходимости производить подтяжку.

## 8. Требования безопасности

- 8.1. Запрещено эксплуатировать кресло туалетное, установленное на наклонной поверхности, а также при наличии зазора под одной из ножек более 4мм.
- 8.2. Запрещено эксплуатировать кресло с не зафиксированными крепежом ножками.
- 8.3. Рабочий диапазон температур, при котором допускается эксплуатация изделия, от +10 до +40°C.
- 8.4. Не допускаются к эксплуатации лица, не ознакомленные с требованиями данного паспорта.

## 9. Свидетельство о приемке

Кресло туалетное

(наименование изделия)

(вариант исполнения)

соответствует требованиям ТУ 9452-903-03151254-2010 и признано годным к эксплуатации.

М.П.  
(отметка ОКК)

Дата выпуска \_\_\_\_\_