



**ФГУП «Самарское ПрОП»
Минздравсоцразвития
России**

**В А Н Н А-ПРОСТЫНЯ
ТКАНЕВАЯ**

ВПТ-27

ТУ 9451-907-03151254-2010

П А С П О Р Т




КОПИЯ ВЕРНА

Федеральное государственное унитарное предприятие
"Самарское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
(ФГУП "Самарское ПрОП" Минздравсоцразвития России)

Зяб. Рамиль

I. Общие сведения об изделии

- 1.1. Ванна-простыня тканевая (далее ванна, фото) предназначена для гигиенического ухода за лежачими инвалидами или больными в домашних условиях и учреждениях социального обслуживания населения.
- 1.2. Ванна устанавливается на ровных поверхностях как мягких так и жестких (типа кровати, дивана, пола). Слив из ванны должен находиться в ногах человека.
- 1.3. Подголовник служит для фиксации головы на краю ванны.

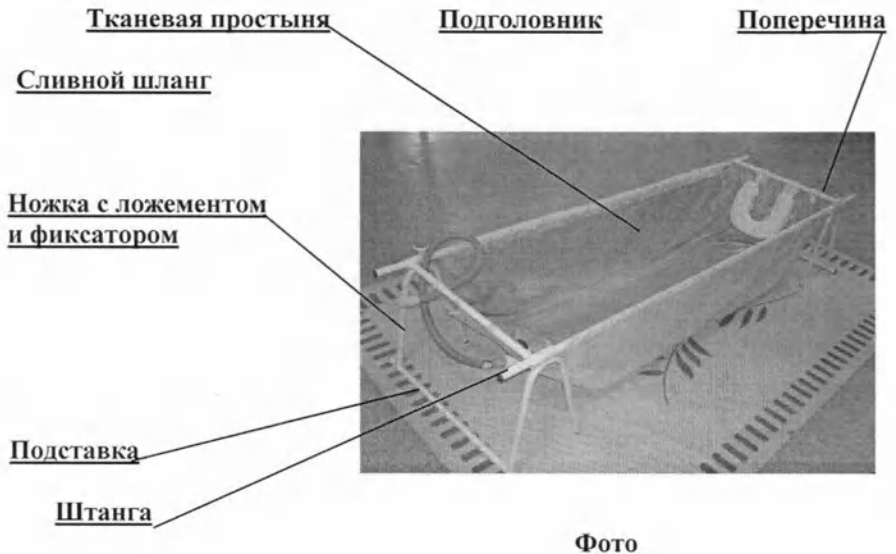

2. Основные параметры и характеристики

- 2.1. Габаритные размеры и масса изделия должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Табл. 1

Обозначение	Основные параметры, мм			Масса изделия, кг	Масса пользователя, не более, кг
	Длина	Ширина	Высота		
ВПТ-27	2000	550	450	7,6	100,0

- 2.2. В изделии использованы материалы, разрешенные к применению Минздравсоцразвития России.

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- металлический каркас ванны – 1 комплект;
- ванна – простыня (тканевая простыня с системой слива) – 1 шт.;
- подголовник – 1 шт.;
- упаковочный чехол – 1 шт.;
- этикетка – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.

4. Транспортировка и хранение

4.1. Транспортировка допускается всеми видами крытого транспорта. Изделия должны быть надежно закреплены от перемещения. Упаковочный чехол с ванной укладывается в коробку из гофрированного картона.

4.2. Хранить упакованные изделия необходимо на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в закрытых сухих, проветриваемых помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей и агрессивных сред, при температуре от 15 до 25° С и относительной влажности воздуха не выше 80 %.

5. Порядок эксплуатации.

5.1. Перед проведением гигиенической процедуры следует убедиться, что инвалид (больной) согласен к принятию ванны, и объяснить ему цель и порядок действий с тем, чтобы он мог оказывать посильную помощь.

5.2. Подложите тканевую простыню под инвалида (больного) продольным или поперечным способом (два варианта). При полной неподвижности инвалида (больного) применяется только поперечный способ.

Продольный способ:

- скатайте простыню продольным валиком;
- осторожно поверните инвалида на бок или отодвиньте на край постели;
- раскатайте на освободившейся половине постели тканевую простыню к самой спине, оставив свернутой ту часть, которая предназначена для другой половины постели;
- поверните инвалида (больного) на другой бок, раскатайте вторую часть тканевой простыни;
- расправьте складки, удобно уложите инвалида (больного).

Поперечный способ (1-ый вариант):

- скатайте тканевую простыню поперечным валиком;
- последовательно поднимая сначала верхнюю часть тела, затем ягодицы и ноги, раскатайте простыню под инвалидом (больным);
- расправьте складки, удобно уложите инвалида (больного).

Поперечный способ (2-ой вариант):

- скатайте тканевую простыню поперечным валиком с 2-х сторон к центру;
- осторожно подведите простыню под крестец инвалида (больного);
- расправьте простыню в направлениях к голове и к ногам.

После окончания процедуры убирают тканевую ванну-простыню в обратном порядке.

6. Общий порядок эксплуатации.

- 6.1 Вынуть из чехла детали ванны.
- 6.2 Расстелить тканевую простыню.
- 6.3 Соединить продольные штанги ванны попарно между собой с помощью фиксаторов.
- 6.4 Вставить продольные штанги в боковины тканевой простыни.
- 6.5 Вставить поперечины в боковые петли ванны с обеих сторон.
- 6.6 Ножки открытыми отверстиями надеть на штыри подставок.
- 6.7 Установить поочередно ножки с ложементами и фиксаторами в головной и ножной частях ванны.
- 6.8 Вставить продольные штанги в ложементы ножек и на расстоянии 10см от краев штанг закрепить фиксаторами с 2-х сторон.
- 6.9 Надеть поперечины на свободные края продольных штанг.
- 6.10 Вставить шланг слива воды в одну из петель ванны, протаскив его через петлю на 15-20 см.
- 6.11 Закрепить подголовник на поперечинах ванны на нужную высоту. Ванна готова к эксплуатации.
- 6.12 Рекомендуемое количество воды для наполнения ванны - не более 40 л..
- 6.13 Слить воду из ванны после эксплуатации.
- 6.14 Разборка ванны осуществляется в обратном порядке.

7. Обслуживание и уход

- 7.1. После эксплуатации металлические части ванны протереть досуха и сложить в упаковочный чехол.
- 7.2. Простыню прополоскать в теплой мыльной воде, затем в чистой, после чего просушить (отжимать нельзя) и аккуратно сложить в чехол.

8. Требования безопасности

- 8.1. Запрещается эксплуатировать ванну при её неустойчивом положении на поверхности.
- 8.2 Рабочий диапазон температур, при котором допускается эксплуатация изделия, - от +5°C до +50°C.
- 8.3 Не допускаются к эксплуатации лица, не ознакомленные с требованиями данного паспорта.

9. Свидетельство о приемке

Ванна-простыня тканевая

ВПТ-27

(наименование изделия)

(обозначение)

соответствует требованиям ТУ 9451-907-03151254-2010

и признана годной к эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска _____

(отметка ОКК)

10. Гарантийные обязательства

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий хранения, транспортировки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня выдачи изделия потребителю.

В случае выхода из строя изделия в течение гарантийного срока предприятие –

изготовитель при обращении по адресу: 443031, г. Самара,

ул. Демократическая, 47

обязуется выполнить бесплатный ремонт изделия или произвести замену дефектных узлов.

11. Отметка о выдаче товара потребителю

М.П. торговой организации

Подпись продавца _____

Дата _____

(без печати не действительно)

12. Дефектная ведомость (заполняется производителем)

№ п/п	Описание дефекта, дата	Устранение дефекта, дата	Отметка ОКК	Примечание