

Утверждаю
Директор ФГУП «Ульяновское ПрОП»
Минздравсоцразвития России

В.Г. Чуйков

Руководство по эксплуатации бюстгалтера для фиксации экзопротеза молочной железы ЛФ-21к; ЛФ-22к; ЛФ-26к

Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы ЛФ-21к; ЛФ-22к; ЛФ-26к, предназначен после радикальной или секторальной операции по поводу заболевания молочной железы, разработан с учетом возможности фиксации протеза молочной железы с помощью специального клапана.

Специальная конструкция и технология изготовления обеспечивает щадящую поддержку груди, не сдавливая молочные железы, и не нарушая кровотока

Бюстгальтер надевается на грудь в положении «стоя», протез груди вкладывается в клапан пришитый с внутренней стороны, фиксация бюстгалтера сзади на крючки и и петли.

Самостоятельно ремонтировать запрещено.

Бюстгальтер стирают в воде с температурой до $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ 1-2 раза в неделю с применением моющих средств или мыльным раствором с последующей просушкой.

Не следует хранить бюстгальтер вблизи источника тепла.

Инженер-технолог



М.С. Айзатуллова