


**КОПИЯ**

ФГУП «Чувашское ПрОП» Минздравсоцразвития России

## Памятка по пользованию

### Чехлы трикотажные для культей верхних и нижних конечностей

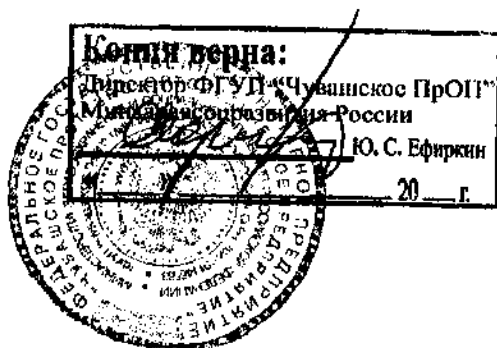

Чебоксары, 2010

**Чехлы трикотажные для культей верхних и нижних конечностей** (далее – чехлы) предназначены для смягчения воздействия стенок приемных гильз протезов на поверхность культи, а также для предохранения приемной полости гильзы протеза от загрязнения и применяются в условиях повседневной жизни пациентами, пользующимися протезами. Чехлы изготавливаются из шерстяной, полушерстяной (смешанной) и хлопчатобумажной пряжи

## **1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

- 1.1.** Чехлы изготавливаются на плосковязальных машинах и чехловых (кругловязальных) автоматах переплетением кулирная гладь. Форма чехла достигается за счет сбавок или прибавок петель. Нижний край чехла закрывается на автомате или закеттлевывается вручную. Верхний край чехла обстрочен трехниточным краеобметочным (оверлочным) швом.
- 1.2.** Чехлы на культю плеча и предплечья изготавливаются четырех типоразмеров, на культю голени - шестнадцати типоразмеров, на культю бедра - восьми типоразмеров.

## **2. НАДЕВАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕХЛОМ**

- 2.1.** Чехол должен быть подобран по размеру культи в соответствии с назначением врача
- 2.2.** Чехлы должны быть чистыми и сухими.
- 2.3.** Надеть чехол на чистую культю верхней или нижней конечности перед надеванием протеза.
- 2.4.** Следить за тем, чтобы чехол на культе не образовывал складок.
- 2.5.** Шов, расположенный в нижней части чехла, не должен оказывать давления на дистальную часть культи и вызывать потертостей кожных тканей при ходьбе инвалида на протезе.
- 2.6.** Верхний край чехла не должен оказывать избыточного давления на культю.

### **3. УХОД ЗА ЧЕХЛОМ**

**3.1** Чехлы рекомендуется стирать не реже одного раза в неделю.

**3.2.** В случаях усиленной потливости культи чехлы необходимо менять ежедневно

### **4. УХОД ЗА КОНЕЧНОСТЯМИ**

**4.1.** Ежедневно необходимо проводить общепринятую гигиеническую обработку кожных покровов конечностей (культи), мытье теплым мыльным раствором с последующим вытиранием насухо.

### **5. ГАРАНТИИ**

**5.1.** В случае обнаружения в изделии, не подвергавшемся в процессе носки стирке, открытых дефектов в течение 10 дней или скрытых дефектов в течение 30 дней со дня выдачи изделия предприятие-изготовитель производит замену изделия бесплатно.

### **6. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки чехлов входят:

- чехол
- памятка по пользованию
- этикетка