

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

Федеральное государственное унитарное предприятие
«НОВОКУЗНЕЦКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
(ФГУП «Новокузнецкое ПРОП» Минздравсоцразвития России)

654055, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Малая, 5
Тел. (384-3) 36-98-55; Факс (384-3) 36-98-40
E-mail: sibprotez@nukz.net

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГУП
«Новокузнецкое ПРОП»
Минздравсоцразвития России»

Л.С. Астраханцев

2011 года.



**Руководство по эксплуатации
опор для вертикализации и поддержки детей с
ограниченными возможностями**

Опоры, для вертикализации и поддержки детей с ограниченными двигательными возможностями СР ОВ предназначенные для позиционной терапии детей (лечение положением) в процессе комплексной реабилитации детей инвалидов при тяжелых формах детского церебрального паралича (ДЦП) и другими заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС), сопровождающимися задержкой или отсутствием навыка сидения, для стимуляции вертикальной позы «стоя» и для ортопедической коррекции или профилактики ортопедических осложнений. Либо для фиксации в позе, позволяющей ребенку осуществлять различные виды деятельности.

1. Общие указания.

До установки опоры в эксплуатацию внимательно изучите инструкцию по пользованию.

Для производства опор используются материалы, безопасность которых подтверждается сертификатом качества.

2. Требования безопасности.

Перед эксплуатацией проверить наличие всех креплений.

Не допускается эксплуатация опор в помещениях с неровными или непрочными поверхностями.

При усаживании (укладывании) ребенка в опору с колесиками, колесики должны быть зафиксированы тормозами.

Ребенка не рекомендуется помещать в опору при состоянии его беспокойства и плача, необходима предварительная подготовка: массаж, растяжки.

3. Техническое обслуживание и уход.

До эксплуатации опору необходимо хранить в упаковке.

При транспортировке и эксплуатации опоры запрещается подвергать ударным нагрузкам.

Во избежание повреждений лакокрасочных покрытий и искусственной кожи, обтягивающей мягкие элементы опор

Следует избегать пользоваться острыми и режущими предметами.

Периодически производить гигиеническую обработку от возможных загрязнений влажной тряпкой с последующим вытиранием насухо.

Опоры не рекомендуется погружать в воду.


4. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие опор требованиям технических условий ТУ9396-001-03151700-2011 при соблюдении всех требований по эксплуатации, транспортировке и хранении.

Гарантийный срок эксплуатации - один год со дня получения опоры потребителем. В течении этого срока предприятие-изготовитель производит ремонт или замену опоры бесплатно(за счет средств изготовителя) при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет вышеуказанных гарантийных обязательств при появлении трещин, изломов, если они вызваны недопустимыми ударными нагрузками.

**Заведующая
медицинским отделом**

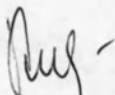

О.И. Галкина

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 3 (три) листа
Директор
ФГУП «Новокузнецкое ПрОП»
Минздравсоцразвития России

Л.С. Астраханцев

