


АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»

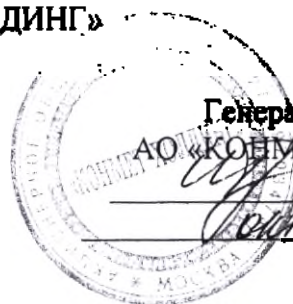

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»
Тетюхин И.В.
_____ 2022 г.



СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

СН 400.10.50

Руководство по эксплуатации

СН 400.10.50 РЭ

Москва

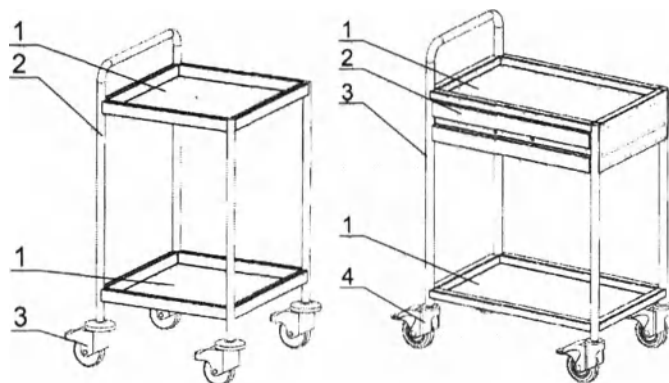


Рисунок 1

Рисунок 2

Таблица 1

	СН 400.10.51	СН 400.10.52
Длина, мм	400-1000	400-1000
Ширина, мм	400-1600	400-1600
Высота, мм	500-1500	500-1500

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Стол�ы медицинские применяются для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Стол�ы применяются в процедурных кабинетах, операционных лечебно-профилактических учреждений.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2. по ГОСТ 15150.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Диапазон габаритных размеров и модели столотв указаны на рисунках 1 - 2.

2.2 Масса должна быть не более 50 кг.

2.3 Стол должен стоять на ровной поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одним из колес не должен быть более 1,5 мм.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество
Стол медицинский	1
Руководство по эксплуатации СН 400.10.50 РЭ	1

4 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

4.1 Стол медицинский СН 400.10.51 (рисунок 1) состоит из верхней и нижней полок (1) (количество полок оговаривается при заказе), металлического каркаса (2) на колесах (3). Конструкция предусматривает возможность крепления навесных приспособлений.

4.2 Стол медицинский СН 400.10.52 (рисунок 2) состоит из верхней и нижней полок (1), (количество полок оговаривается при заказе), выдвижного ящика (2), металлического каркаса (3), на колесах (4). Конструкция предусматривает возможность крепления навесных приспособлений.

5 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

5.1 Перед подготовкой изделия к эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

5.2 Распакуйте изделие, проверьте комплектность и его внешний вид визуальным осмотром.

5.3 Все поверхности должны быть очищены от загрязнений и продезинфицированы перед началом использования. Для дезинфекции должны применяться дезинфицирующие средства, разрешенные Департаментом госсанэпиднадзора Минздрава России.

6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Перед началом использования проверьте целостность стола.

6.2. Показания и противопоказания к применению медицинского изделия:

Показано использование для удобства, обеспечения необходимых условий, облегчения работы медицинского персонала. Противопоказано использование персоналом, неквалифицированным для работы в процедурных кабинетах, операционных лечебно-профилактических учреждений.

7 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ

7.1 Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 16371 и правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Транспортирование изделия морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Вид отправки - контейнерная и мелкая.

7.2 Условия транспортирования изделия, изготовленного по условиям климатического исполнения УХЛ 4.2, по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

7.3 Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 для исполнения УХЛ 4.2

7.4 Утилизация изделия производится по нормам СанПин 2.1.3684-21, по классу А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО - твердым коммунальным отходам).

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом.

8.2 По мере необходимости подтягивайте ослабевшие крепежные детали изделия.

8.3 При возникновении неисправности в работе изделия необходимо обращаться на завод-изготовитель или в сервисную службу по месту эксплуатации.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол рабочий передвижной СН 400.10.5 _____ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией, признан годным для эксплуатации.

М.П. _____
подпись
_____ дата

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 18 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока все обнаруженные неисправности, произошедшие по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Изделия с дефектами, произошедшими в результате небрежного обращения, к гарантийному обслуживанию не принимаются.

Гарантийный ремонт и замена производится изготовителем по адресу:

125413, г. Москва, ул. Онежская, д.24, АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»

тел./факс (495) 456 97 50

www.conmetholding.ru, E-mail: ch-sale@mail.ru

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие характеристики конструкции.

М.П. _____
подпись
_____ дата

Листов 3
Генеральный директор АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»
И.В.Тетюхин

