

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель организации
заявителя

Камолова Ф.Ф.
«12 » июля 2010



ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Капли глазные увлажняющие "Mytear CL (см. Приложение 1)
(наименование изделия медицинского назначения)

2010

1. НАЗНАЧЕНИЕ: Увлажнение глаз при ощущении дискомфорта, при синдроме «сухого глаза».

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- устраняют дискомфорт и ощущение сухости глаз.
- являются вязким прозрачным и бесцветным офтальмологическим раствором.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- (1) Пациентам, которые находятся на излечении у терапевта.
- (2) Аллергия в анамнезе или наследственная аллергия.
- (3) Гиперчувствительность к компонентам препарата
- (4) Болевые ощущения в глазу
- (5) Глаукома.
- (6) Беременность и период кормления грудью
- (7) Детский возраст до 18 лет

4. СОСТАВ:

Активные ингредиенты	Количество
Хлорид натрия	5.5 мг
Хлорид калия	1.5 мг
Глюкоза	0.05 мг

Наполнители: борная кислота, борат натрия, динатрия эдетат гидрат, полисорбат 80, гидроксиэтилцеллюлоза, l-ментол, хлоргексидина глюконат.

Способ применения – По 1-ой капле в каждый глаз от 1-6-ти раз в день.

Побочные эффекты: местные аллергические реакции

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- (1) Держать контейнер плотно закрытым и хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямых солнечных лучей. Не допускать экспозиции высоких температур, например, оставлять препарат рядом с обогревателем или вне автомобиля.
- (2) Держать вне доступа для детей.
- (3) Не переносить препарат в любой другой контейнер. (Это может вызвать ошибку дозирования или изменение качества.).
- (4) Не использовать после истечения срока годности.
- (5) В зависимости от условий хранения содержимое лекарственного раствора может кристаллизироваться на кончике капельницы или внутри колпачка. Если это произошло, произведите очистку и только после этого закапывайте глаза.
- (6) Не используйте контейнер для хранения других материалов.
- (7) Перед закапыванием контактные линзы необходимо снять и вновь установить не ранее, чем через 30 минут после закапывания препарата

Приложение 1.

Капли глазные увлажняющие "Mytear CL" в следующих исполнениях:

1. Капли глазные «Mytear CL»
2. Капли глазные «Mytear CL Cool»
3. Капли глазные « Mytear CL Cool HI»

ООО «Искра Сангио»
Генеральный директор

12.07.2010



Камолова Ф.Ф.



