



Укладка-контейнер полимерный для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах УКП-01-«КРОНТ» по ТУ 9398-011-11769436-2002 в исполнении УКП-50-01
Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/04388 от _____ г.

1. Назначение изделия

Укладка УКП-50-01 (далее по тексту «укладка») предназначена для транспортировки проб биологического материала в пробирках, флаконах, емкостях для анализов. Укладка состоит из корпуса с парой симметрично расположенных ручек и крышки. Для надежной фиксации крышки на корпусе укладки установлены замки. При необходимости на замки можно установить пломбу. Для удобства при транспортировке на ручки укладки устанавливается амортизирующая легкоъемная накладка-ручкодержатель.

2. Основные параметры



Рис.1

2.1. Габаритные размеры (длина x ширина x высота) (435x215x195 (235)*) ±30мм

* - в скобках указан размер с учетом поднятых в рабочее положение ручек.

2.2. Вес – не более 1,7 кг.

2.3. Подъемная нагрузка не более – 3 кг.

2.4. Составные части укладки и комплектующие: штатив ШПУ-«КРОНТ» (далее по тексту «штатив»), боксы, кассета для флаконов выполнены из полимерного материала (полипропилена), разрешенного для применения в изделиях медицинского назначения в РФ. Ручки изготавливаются из нержавеющей стали, накладка-ручкодержатель – термопластичный эластомер (ТЭП).

2.5. Комплектующие укладки:

- **Штатив ШПУ-«КРОНТ».** Штатив рассчитан на размещение 50 пробирок различных типов: $\varnothing 13 \div 17$ мм (цилиндрические, центрифужные, моноветы); $\varnothing 8 \div 11$ мм (микропробирки). Отверстия верхнего яруса штатива комбинированные, имеют форму «восьмерок», образованных из двух отверстий различного диаметра: 18 и 11,2 мм. Максимальная вместимость штатива 100 пробирок при установке двух пробирок в одно комбинированное отверстие.

- **Кассета для 10 медицинских флаконов** - предназначена для надежной фиксации 10 флаконов (250 мл) или емкостей для анализов. Кассета сборная – состоит из колец $\varnothing 60 - 5$ пар.

Боксы (емкости прямоугольной формы 77x80x100 мм) - предназначены для размещения вспомогательных медицинских изделий.

2.6 Составные части укладки выдерживают обработку паровым методом (автоклавирование) при температуре 121°C и обрабатываются любыми разрешенными в России дезинфицирующими средствами в соответствии с МУ №287-113. Перед проведением автоклавирования ручки и замки необходимо снять с корпуса укладки.

2.7. Срок службы 5 лет.

3. Комплектность

- | | | |
|------------------|---|-------------------|
| - Корпус - 1 шт. | - Штатив ШПУ-«КРОНТ» - 1 шт. | - Бокс - 2 шт. |
| - Крышка - 1 шт. | - Кассета для 10 медицинских флаконов - 1 шт. | - Замок - 2 шт. |
| - Ручка - 2 шт. | - Накладка-ручкодержатель - 1 шт. | - Паспорт - 1 шт. |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

АО «КРОНТ-М»




4. Подготовка и порядок работы

Провести распаковку составных частей укладки из транспортировочной тары, протереть детали укладки марлей, смоченной моющим раствором, затем проточной водопроводной водой. Удалить остатки воды и высушить укладку.

Сборка укладки:

- Установить замки на корпус - рис.2.
- Установить ручки в отверстия на корпусе - рис.3.
- Установить на одну из ручек накладку-ручкодержатель - рис.4.

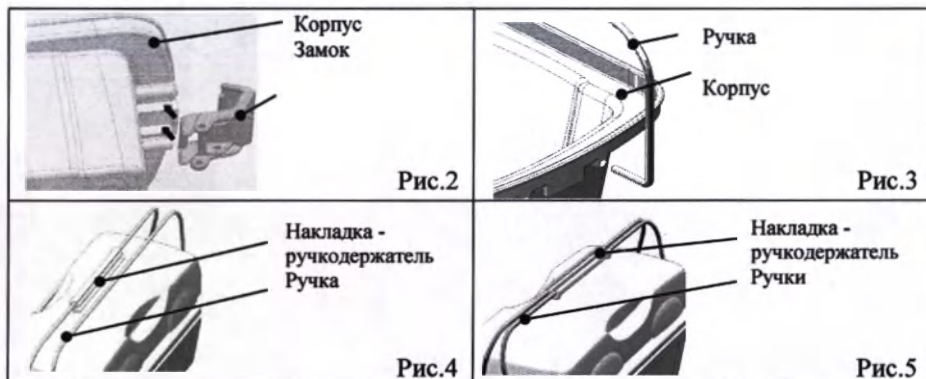

- Скомпоновать укладку – установить в корпус штативы и боксы или кассету для флаконов.
- Установить накладку-ручкодержатель на обе ручки для транспортировки укладки - рис.5.

Перед началом и по окончании работы провести обработку составных частей укладки в соответствии с методическими указаниями МУ №287-113 и инструкциями по применению конкретных дезинфицирующих средств, разрешенных в РФ, ополоснуть водой и высушить.

5. Свидетельство о приемке

Укладка-контейнер полимерный для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах УКП-01-«КРОНТ» по ТУ 9398-011-11769436-2002 в исполнении УКП-50-01 соответствует техническим требованиям ТУ 9398-011-11769436-2002 и признан годным к эксплуатации.

Месяц и год изготовления _____ Дата продажи _____

Подпись _____

Штамп предприятия

6. Утилизация

Утилизация укладки после истечения срока службы должна производиться в соответствии нормативно-правовыми актами и санитарными правилами СанПиН 2.1.3684-21, как отходы по классу А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым коммунальным отходам).

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок 1 год с даты продажи.

При обнаружении дефекта в гарантийный период дефектное изделие или его составная часть заменяются. Дефектное изделие и акт о наличии дефекта направляются на предприятие-изготовитель АО «КРОНТ-М».

Адрес предприятия-изготовителя: 141402, Россия, МО, г. Химки, ул. Спартаковская, д.9, пом.1. Телефон: +7(495) 500-48-84; Факс: +7 (495) 572-84-15.

E-mail: info@kront.com. Internet: www.kront.com.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 98) 624-46-20

E-mail: service@kront.com

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

АО «КРОНТ-М»





Акционерное общество «КРОНТ-М»

ПАСПОРТ
КРПФ. 942715.0200 ПС

Укладка-контейнер полимерный для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах У КП-01-«КРОНТ» по ТУ 9398-011-11769436-2002 в исполнении У КП-100-01
Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/04388 от _____ г.

1. Назначение изделия

Укладка У КП-100-01 (далее по тексту «укладка») предназначена для транспортировки проб биологического материала в пробирках, флаконах, емкостях для анализов. Укладка состоит из корпуса с парой симметрично расположенных ручек и крышки. Для надежной фиксации крышки на корпусе укладки установлены замки. При необходимости на замки можно установить пломбу. Для удобства при транспортировке на ручки укладки устанавливается амортизирующая легкосъемная накладка-ручкодержатель.

2. Основные параметры

Штатив (2 шт.)

Кассета для 8
медицинских флаконов (2 шт.)

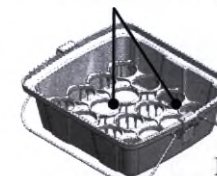
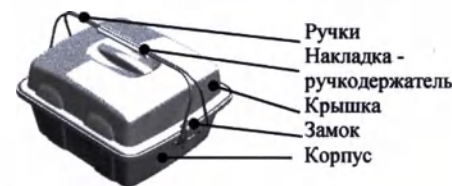


Рис.1

2.1. Габаритные размеры (длина х ширина х высота) не более (410х350х215 (255)*) ±30мм
* - в скобках указан размер с учетом поднятых в рабочее положение ручек.

2.2. Вес не более 2,3 кг.

2.3. Подъемная нагрузка не более – 5 кг.

2.4. Составные части укладки и комплектующие: штатив ШПУ-«КРОНТ» (далее по тексту «штатив») и кассеты для флаконов выполнены из полимерного материала (полипропилена), разрешенного для применения в изделиях медицинского назначения в РФ. Ручки изготавливаются из нержавеющей стали, накладка-ручкодержатель – термопластичный эластомер (ТЭП).

2.5. Комплектующие укладки:

- **Штатив ШПУ-«КРОНТ».** Штатив рассчитан на размещение 50 пробирок различных типов: ø13÷17 мм (цилиндрические, центрифужные, моноветы); ø8÷11 мм (микропробирки). Отверстия верхнего яруса штатива комбинированные, имеют форму «восьмерок», образованных из двух отверстий различного диаметра: 18 и 11,2 мм. Максимальная вместимость штатива 100 пробирок при установке двух пробирок в одно комбинированное отверстие (например: центрифужная пробирка + микропробирка).

- **Кассета для 8 медицинских флаконов** - предназначена для надежной фиксации 8 флаконов (250 мл) или емкостей для анализов. Кассета сборная – состоит из колец ø 60 – 4 пары.

2.6. Составные части и комплектующие укладки выдерживают обработку паровым методом (автоклавирование) при температуре 121°C и обрабатывается любыми разрешенными в России дезинфицирующими средствами в соответствии с МУ №287-113. Перед проведением автоклавирования ручки необходимо снять с корпуса укладки.

2.7. Срок службы 5 лет.

3. Комплектность

- | | | |
|------------------|--|-------------------|
| - Корпус – 1 шт. | - Штатив ШПУ-«КРОНТ» - 2 шт. | - Замок – 2 шт. |
| - Крышка – 1 шт. | - Кассета для 8 медицинских флаконов – 2 шт. | - Паспорт – 1 шт. |
| - Ручка – 2 шт. | - Накладка-ручкодержатель – 1 шт. | |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

АО «КРОНТ-М»



4. Подготовка и порядок работы

Провести распаковку составных частей укладки из транспортировочной тары, протереть детали укладки марлей, смоченной моющим раствором, затем чистой проточной водопроводной водой. Удалить остатки воды и высушить укладку.

Сборка укладки:

- Установить замки на корпус - рис.2.
- Установить ручки в отверстия на корпусе - рис.3.
- Установить на одну из ручек накладку-ручкодержатель - рис.4.



- Скомпоновать укладку – установить в корпус штативы или кассету для флаконов.
- Установить накладку-ручкодержатель на обе ручки для транспортировки укладки - рис.5.

Перед началом и по окончании работы провести обработку составных частей укладки в соответствии с действующими методическими указаниями МУ №287-113 и инструкциями по применению конкретных дезинфицирующих средств, разрешенных в РФ, ополоснуть водой и высушить.

5. Свидетельство о приемке

Укладка-контейнер полимерный для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах УКП-01-«КРОНТ» ТУ 9398-011-11769436-2002 в исполнении УКП-100-01 соответствует техническим требованиям ТУ 9398-011-11769436-2002 и признана годной к эксплуатации.

Месяц и год изготовления _____ Дата продажи _____

Подпись _____ Штамп предприятия

6. Утилизация

Утилизация укладки после истечения срока службы должна производиться в соответствии нормативно-правовыми актами и санитарными правилами СанПиН 2.1.3684-21, как отходы по классу А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым коммунальным отходам).

7. Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок 1 год с даты продажи.

При обнаружении дефекта в гарантийный период дефектное изделие или его составная часть заменяются. Дефектное изделие и акт о наличии дефекта направляются на предприятие-изготовитель АО «КРОНТ-М».

Адрес предприятия-изготовителя: 141402, Россия, МО, г. Химки, ул. Спартаковская, д.9, пом.1. Телефон: +7(495) 500-48-84; Факс: +7 (495) 572-84-15.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Сервисный центр: телефон +7(985)861-30-56, +7(498) 624-46-20

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

АО «КРОНТ-М»



В.П. СИЗИКОВ