


Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов
однократного применения стерильное
по ТУ 9398-072-00480230-2014 (исполнение 1)
производитель ОАО "Фирма Медполимер"



Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов
однократного применения стерильное
по ТУ 9398-072-00480230-2014 (исполнение 2)
производитель ОАО "Фирма Медполимер"

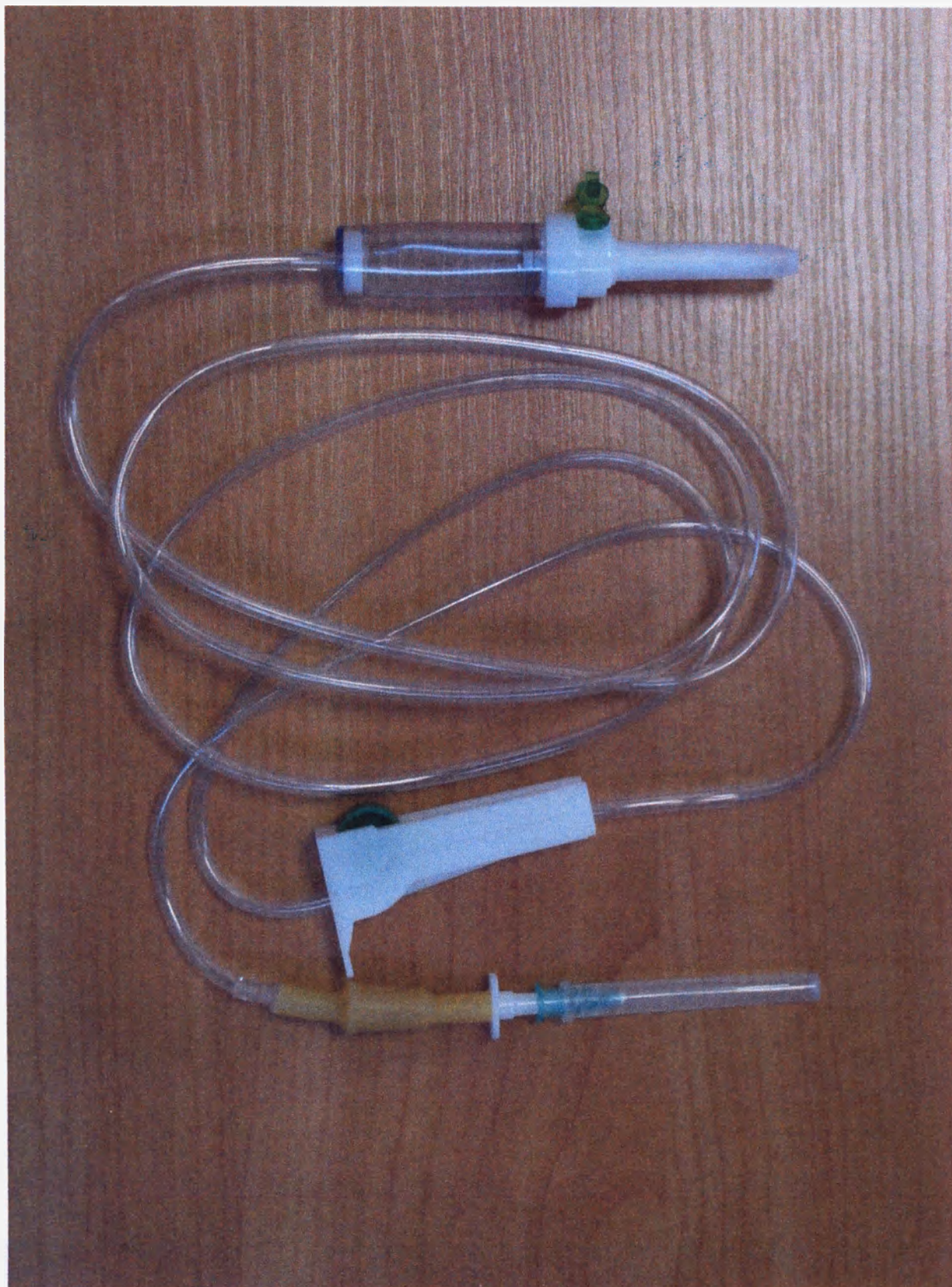

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 2 листа(ов).
Должность, ген. директор
ФИО Свиридова О.В.
(подпись) 14



Маркировка потребительской тары
 Устройство для вливания кровезаменителей
 и инфузионных растворов однократного применения стерильное
 по ТУ 9398-072-00480230-2014 (исполнение 1)
 производитель ОАО "Фирма Медполимер"



МЕДПОЛИМЕР
 Санкт-Петербург

ОАО "Фирма Медполимер"
 Россия, 191179,
 г. Санкт-Петербург,
 шоссе Революции, 69
 Тел.: (812) 526 64 65,
 Факс: (812) 526 64 68

**УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЛИВАНИЯ
 КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ
 РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
 СТЕРИЛЬНОЕ**

Тип

Изм. в соответствии
 0,8 мм x 35 мм

ТУ 9398-072-00480230-2014

ИУ №

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Проверьте целостность потребительской тары и срок годности устройства.
 2. Извлеките потребительскую тару и извлеките устройство.
 3. Закройте клапан (4).
 4. Снимите защитный колпачок с поликарбонатной иглы (1) и введите иглу в порт поликарбонатного контейнера или в пробку бутылки.
 5. Сдавив корпус каплеотсчета (3), отсчитайте до половины объема раствора.
 6. Откройте заглушку (2) воздушного пути при использовании бутылки.
 7. Снимите защитный колпачок с инъекционной иглы (6).
 8. Откройте клапан (4) и медленно заполните устройство до полного вытеснения воздуха и появления капли из иглы (6).
 9. Закройте клапан (4).
 9. Произведите инъекцию.
- Откройте клапан (4), установите необходимую скорость вливания.
 Дополнительные лекарственные средства вводите через инъекционный узел (5) и иглу не более 0,8 мм.

Не применять устройство с нетермичным (испуган) пакотом

Хранить при температуре от 5 до 40 °C
 стерильно, асептически, в темноте



ИЗДАНИЕ 010-2014

1-й изд. до 042019

Маркировка потребительской тары
Устройство для вливания кровезаменителей
и инфузионных растворов однократного применения стерильное
по ТУ 9398-072-00480230-2014 (исполнение 2)
производитель ОАО "Фирма Медполимер"



МЕДПОЛИМЕР
Санкт-Петербург

ОАО "Фирма Медполимер"
Россия, 195279,
г. Санкт-Петербург,
шоссе Революции, 69
Тел.: (812) 520 64 05,
Факс: (812) 520 64 08

**УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЛИВАНИЯ
КРОВЕЗАМЕНТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ
РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛЬНОЕ**

"Луер-Лок"

Игла инъекционная
0,8 мм x 38 мм

ТУ 9398-072-00480230-2014
РУ №

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Проверьте целостность потребительской тары и срок годности устройства.
 2. Вскройте потребительскую тару и извлеките устройство.
 3. Закройте зажим (4).
 4. Снимите защитный колпачок с полимерной иглы (1) и вставьте иглу в порт полимерного контейнера или в пробку бутылки.
 5. Сдвинув корпус капельницы (3), заполните ее до половины объема раствором.
 6. Откройте заглушку (2), воздуха при использовании бутылки.
 7. Снимите защитный колпачок с инъекционной иглы (6).
 8. Откройте зажим (4) и медленно запустите устройство до полного вытеснения воздуха и появления капли из иглы (5). Закройте зажим (4).
 9. Произведите впрыскивание.
- Откройте зажим (4), установите необходимую скорость вливания.
Дополнительные лекарственные средства вводите через инъекционный узел (5) иглой не более 0,8 мм.

**Не применять устройство с негерметичным
(воздухным) пакетом**

Хранить при температуре от 3 до 40 °С
СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО



ПАРТИЯ 02042014

ГОДЕН ДО 042019

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 2 листа(ов).
Должность _____
ФИО _____
Секретарь
С.И. [Signature]
ОТКРОЕНО
ОБЩЕСТВО
ОИР
МЕДИЦИНА
МЕДПО
С-ПЕТЕРБУРГ