



ООО "Медицинские Современные Технологии и Консалтинг"
603146, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 27-53
Тел/факс: (831)212-52-69, 465-75-16, e-mail: mstk@mts-nn.ru

**Инструкция по применению
изделия медицинского назначения:**

**Растворы офтальмологические вязкоэластичные i-Visc 1.4, i-Visc 1.6, i-Visc 2.0
в шприцах с принадлежностями».**

Производства: «Ай-Медикал Офтальмик Интернешнл ГмбХ», Германия
i-Medical Ophthalmic International GmbH, Wieblinger Weg 100, D-69123 Heidelberg.
Телефон: +49(0) 6221/7500 300; Факс: +49(0) 6221/7579 700.

Введение:

Растворы офтальмологические вязкоэластичные, производства компании «Ай-Медикал Офтальмик Интернешнл ГмбХ», Германия могут использоваться в специализированных офтальмологических лечебных учреждениях и отделениях микрохирургии глаза для защиты чувствительных структур глаза от любого повреждающего воздействия во время операции.

Показания:

Применение растворов офтальмологических вязкоэластичных позволяет поддерживать достаточный объем для свободного манипулирования, снизить повреждение эндотелия роговицы и других прилегающих структур глаза, создать оптимальные условия для имплантации интраокулярных линз. Растворы легко удаляются и хорошо фильтруются через дренажную систему глаза, не вызывают послеоперационную гипертензию.

Предупреждения:

Исследование самих растворов офтальмологических вязкоэластичных не выявило осложнений для пациентов, но, как и любая другая хирургическая операция, имплантация интраокулярной линзы сопряжена с определенным риском. Далее следует перечень наиболее потенциальных осложнений:

- Дислокация линзы
- Потеря стекловидного тела
- Повреждение роговичного эндотелия
- Блокада зрачка
- Непигментные преципитанты
- Вторичная глаукома
- Кистозный макулярный отек
- Выпадение радужной оболочки
- Инфекция
- Грыжа стекловидного тела
- Отслойка сетчатки
- Патологическая зрачковая мембрана
- Кровоизлияние в переднюю камеру глаза
- Хронический отек роговицы
- Ирит
- Увеит
- Гипопион



Инструкция по использованию:

Для начала необходимо проверить дату стерилизации раствора вязкоэластичного и убедиться в том, что его можно использовать. Срок годности растворов офтальмологических вязкоэластичных составляет 36 месяцев с момента стерилизации. Извлеките из герметичной упаковки шприц с раствором офтальмологическим вязкоэластичным. Извлеките из упаковки картридж для инжектора, с помощью канюли осторожно нанесите раствор офтальмологических вязкоэластичный в достаточном количестве внутрь выпускного отверстия (форсунка) инжектора для имплантации интраокулярных линз и в оба желобка (углубление) одноразового картриджа. После этого, установите линзу в картридже, как указано в инструкции для интраокулярных линз, далее требуется установить картридж в инжектор для имплантации интраокулярных линз. Далее следует сама хирургическая операция, техника которой выбирается на усмотрение хирурга-офтальмолога.

Примечание:

Для использования в хирургии:

Прежде чем ввести канюлю в глаз не нажимайте сильно на плунжер. Таким образом, можно избежать пузырьков воздуха в полости канюли.

Предостережение:

Все необходимые предосторожности для внутриглазной хирургии должны быть соблюдены.

Укомплектовывается одноразовой канюлей, предназначенной специально для внутриглазного использования.

Перед использованием удостоверьтесь, чтобы была соблюдена стерильность упаковки и срок годности.

Отказ от ответственности:

Производитель не несет ответственности за повреждения, нанесенные пациенту хирургом в результате применения какого-либо метода или техники при имплантации ИОЛ с использованием растворов офтальмологических вязкоэластичных, производства компании «Ай-Медикал Офтальмик Интернешнл ГмбХ», Германия.

Директор
ООО «Медицинские Современные Технологии
и Консалтинг»



«21» октября 2009 г.

Шабалин Н.Б.