

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Фирма «Домен»

Субботина Н.В.

2010г.



М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

по использованию

Иглы для забора проб крови Bodywin,

производства

"Shandong Weigao Group Medical Polymer Co.", Ltd (Китай)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЕМ

4. ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

ЗАО «Фирма «Домен»

199106, Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 77, корп. 2, лит. Р, тел./факс (812) 327-75-85

e-mail: fdomen@mail.wplus.net; <http://www.domen.sp.ru>

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Иглы для забора проб крови Bodywin - одноразовые, стерильные, применяются на преданалитическом этапе лабораторной диагностики, для взятия образцов венозной крови для проведения клинических и/или биохимических анализов. Закрытые системы взятия крови, обеспечивают высокую безопасность процедуры взятия и транспортировки крови. Это позволяет использовать их в различных условиях: стационарных, использование в медицинских транспортных средствах, в полевых условиях, для взятия крови на дому у пациента.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры:

от 19 G до 27 G

Различные размеры игл дают возможность подобрать оптимальную иглу для пациента, в зависимости от диаметра вены.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЕМ

3.1. Выберите размер иглки и вид пробирки в зависимости от проводимого анализа

3.2. Наложите жгут

3.3. Откройте капсулу иглы. Поворачивайте до разрыва доступного слоя изоляции. Удалите прозрачный колпачок, обнажая закрытый пробкой конец иглы. Не удаляйте чехол иглы. Соедините иглу и держатель до плотного соединения. Введите пробирку в держатель.

3.4. Удалите чехол с иглы.

3.5. Выполните пункцию, держа иглу под углом приблизительно равным 30 градусам к руке пациента.

3.6. Зафиксируйте держатель.

3.7. Если нужно наполнить несколько пробирок, то поместите следующую пробирку в держатель. Кровь потечет в пробирку. Все время сохраняйте неподвижность держателя.

3.8. Когда взятие крови завершено, удалите последнюю пробирку, затем удалите комплекс игла-держатель. Поместите стерильную повязку на место венопункции.

3.9. Используйте пинцет для удаления иглки из держателя.

ВНИМАНИЕ:

1. Пожалуйста, не используйте иглы, если:

- истек срок годности
- повреждена упаковка

4. ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Все изделия следует хранить при температуре 4–25°C, если на этикетке упаковки не указана ругая температура.

Согласно действующим инструкциям Иглы Bodywin утилизируются аналогично одноразовым шприцам – путем автоклавирования при 121° С и давлении 1,2 атм, они также могут утилизироваться в специальных контейнерах для острых предметов либо сжигаться.

Генеральный директор
ЗАО «Фирма «Домен»



Н.В. Субботина

