


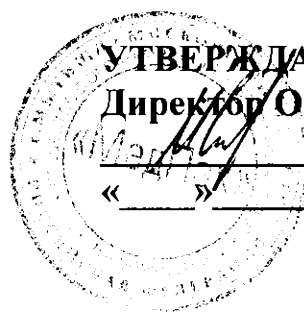

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «МедПак»

М.Г.Кольцов

« » 2009 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Контейнеры
для сбора острого инструментария,
класса Б и В одноразовые
МП-01**

**г. Мытищи
2009 год**

Область применения

1. Контейнер может использоваться в любом структурном подразделении ЛПУ.
2. Контейнер снабжен специальной крышкой для бесконтактного снятия иглы со шприца.
3. Контейнер используется для сбора игл в течение одной рабочей смены.
4. При правильном использовании снижается риск заражения опасными инфекциями: гепатитом, сифилисом, СПИД, т.е. заболеваниями, передающимися через кровь.

Технические требования

1. Контейнер зарегистрирован в Российской Федерации и внесен в Государственный реестр Изделий Медицинского Назначения и Медицинской Техники
2. Соответствует требованию СанПин 2.1.7.278-99 п.7.2: контейнеры должны обеспечивать герметизацию в процессе сбора и невозможность их вскрытия при транспортировке отходов вне пределов медицинского отделения.
3. Подходит для сбора СР-шприцев.
4. Выпускается различной вместимости.

Комплектующие

1. Основа – 1 шт.
2. Крышка № 1 с отверстиями для снятия игл. – 1 шт.
3. Красная крышка № 2 – заглушка – 1 шт.
4. Наклейка-маркировка – 1 шт.
5. Ответная часть – 1 шт. на одну упаковку.

Способ применения

1. Положите перед собой все комплектующие.
2. Возьмите наклейку-маркировку и заполните на ней пустые поля.
3. Наклейте маркировку на основу.
4. Приготовьте раствор для дезинфекции игл.
5. Заполните основу на 2/3 раствором.
6. Закройте основу крышкой № 1. Проследите за тем, чтобы при закрытии крышки произошел щелчок.
7. Закрепите МП-01 на ответную часть вблизи с местом проведения инъекций для того, чтобы проводить потенциально инфицированной

- иглой в воздухе от пациента до контейнера как можно меньшее расстояние.
8. Контейнер готов к работе.
 9. Выполните инъекцию, поднесите шприц с иглой к контейнеру.
 10. Опустите кончик иглы в дезинфицирующий раствор, находящийся внутри контейнера, и потяните поршень шприца на себя.
 11. Затем подденьте канюлю иглы за одно из отверстий на крышке № 1. Игла попадает в дезинфицирующий раствор в основе МП-01
 12. Выпустите дезинфицирующий раствор, набранный ранее в шприц через иглу, обратно в основу контейнера.
 13. Меняйте дезинфицирующий раствор в соответствии с методическими указаниями применяемого дезинфектанта.
 14. После заполнения МП-01 иглами снимите его с ответной части, прикройте отверстие на крышке № 1 крышкой № 2 и слейте дезинфицирующий раствор.
 15. Закройте отверстие в крышке № 1 крышкой № 2. Проследите за тем, чтобы при закрытии произошел глухой щелчок.
 16. Контейнер готов к транспортировке с места образования отходов на место временного хранения на территории ЛПУ.

Промышленность, торговля и общественные услуги
З (Тр) Москва.

М.А. Ковалев

