

Макеты этикеток на медицинское изделие

**«Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA
тиреоглобулин» по ТУ 21.20.23-539-98539446-2020»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-539-98539446-2020»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 1290205

На коробку:



ООО «Компания Алкор Био»,
162144, Россия, г. Санкт-Петербург,
Жуковское шоссе, д. 40, лит. А,
тел./факс: +7(812)676778, 6772462,
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

LOT E005
REF 1290205
IVD

Контроли MagnoLIA тиреоглобулин

Контроль 1	5 фл.
Контроль 2	5 фл.

ТУ 21.20.23-539-98539446-2020
РУ № XXXXXXXXXXXXX

Контроли MagnoLIA тиреоглобулин
Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-539-98539446-2020

LOT E005	 2021-12-23	 +2...+8 °C	
REF 1290205	 2022-12-23		
IVD	 100		

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.



На флаконы:

Контроли
MagnoLIA
тиреоглобулин
Контроль 1
объем 1 мл
 +2...+8 °C




-5 шт.

Контроли
MagnoLIA
тиреоглобулин
Контроль 2
объем 1 мл
 +2...+8 °C




-5 шт.

«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-539-98539446-2020»

Макет этикеток



Вариант исполнения 3

Кат. № 1290210

На коробку:

REF 1290210

LOT E005

2022-12-23

+2⁺8⁺°C

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А,
тел./факс: +7(812)6778779, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

Контроли MagnoLIA тиреоглобулин
Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-539-98539446-2020

Состав набора:	
Контроль 1	10 фл.
Контроль 2	10 фл.

LOT E005

REF 1290210

IVD

2021-12-23

2022-12-23

200

+2⁺8⁺°C

ТУ 21.20.23-539-98539446-2020
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

На флаконы:

Контроли
MagnoLIA
тиреоглобулин
Контроль 1
объем 1 мл
 +2⁺8⁺°C

ООО «Компания Алкор Био»



- 10 шт.

Контроли
MagnoLIA
тиреоглобулин
Контроль 2
объем 1 мл
 +2⁺8⁺°C

ООО «Компания Алкор Био»



- 10 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

4 (четыре) лист 9

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.П. Полинцев



Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли
MagnoLIA тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-539-98539446-2020»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1	стр. 2,3,4
Вариант исполнения 2	стр. 5,6,7
Вариант исполнения 3	стр. 8,9,10
Контроли 1, 2	стр. 11,12

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»





Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-539-98539446-2020

Кат. № 1290201 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.

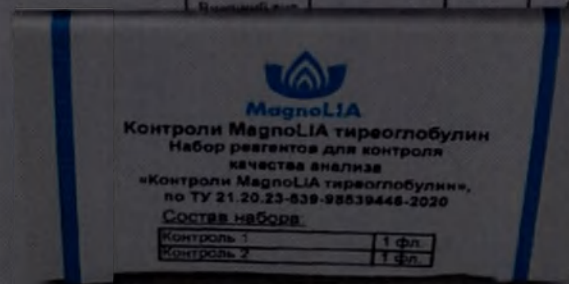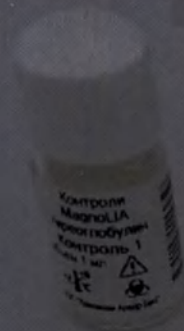




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики in vitro
«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA тиреоглобулин»,
по ТУ 21.20.23-539-98539446-2020»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA
тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-539-98539446-2020

Кат. № 1290201 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.

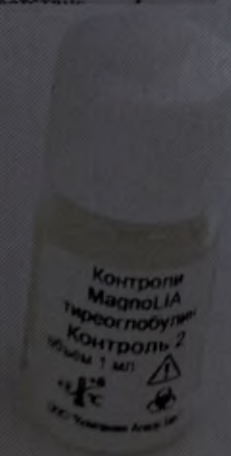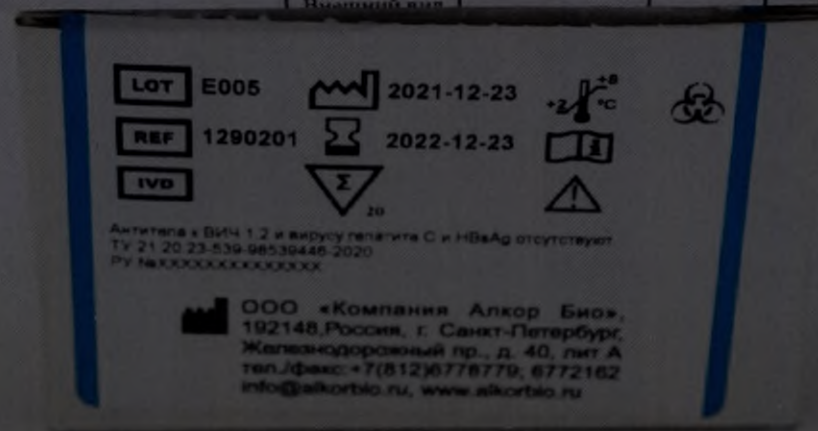
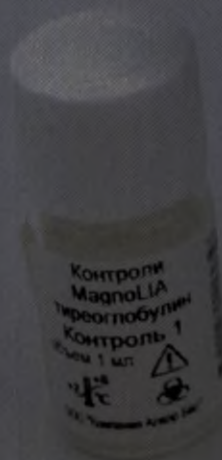


ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

**Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA
тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-539-98539446-2020**

Кат. № 1290201 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.

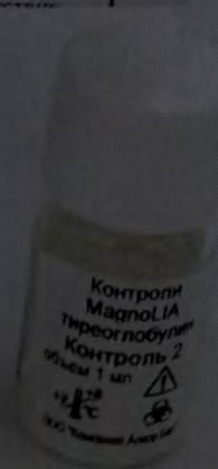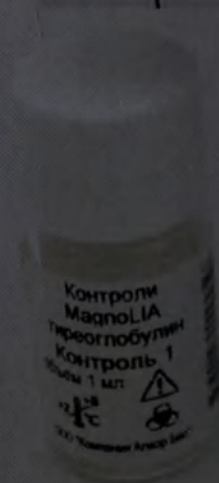

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-539-98539446-2020

Кат. № 1290205 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт

Высший вид	Содержимое
------------	------------



Состав набора

Контроль 1	5 фла.
Контроль 2	5 фла.

ТУ 21.20.23-539-98539446-2020
ИУ № XXXXXXXXXX

Контроли MagnoLIA тиреоглобулин

Набор реагентов для контроля анализа
«Контроли MagnoLIA тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-539-98539446-2020

LOT
REF
IVD

2021-12-23
2022-12-23
100

+37°C
100

100

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики in vitro
«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA тиреоглобулин»,
по ТУ 21.20.23-539-98539446-2020»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-539-98539446-2020

Кат. № 1290205 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Внешний вид	Содержимое	Состояние	Срок годности
Контроли MagnoLIA тиреоглобулин			
LOT E005	 2022-12-23		
REF 1290205	+2 ⁺ 8 		
ООО «Компания Алкор Био», 192148, Россия, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А тел./факс: +7(812)6778779; 6772162 info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru			






ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли Magnolia тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-539-98539446-2020

Кат. № 1290205 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.

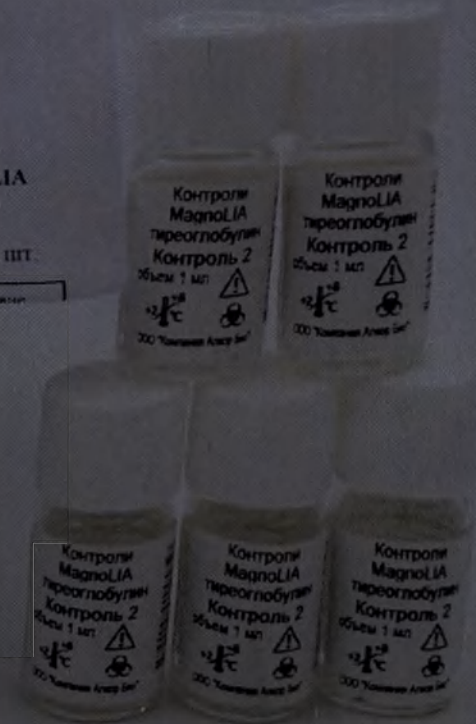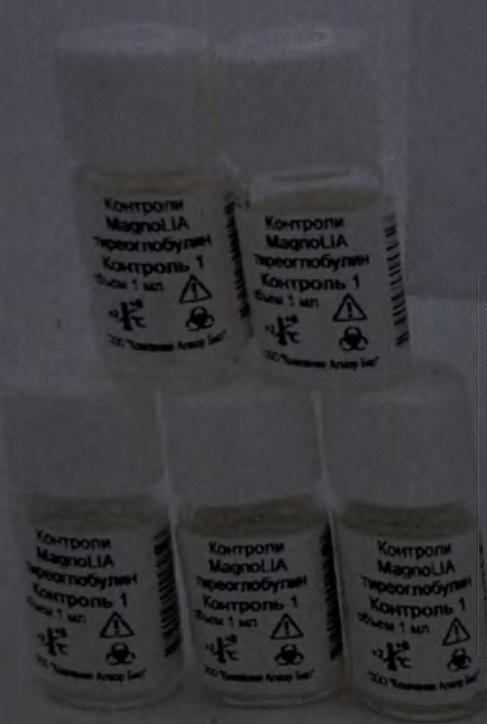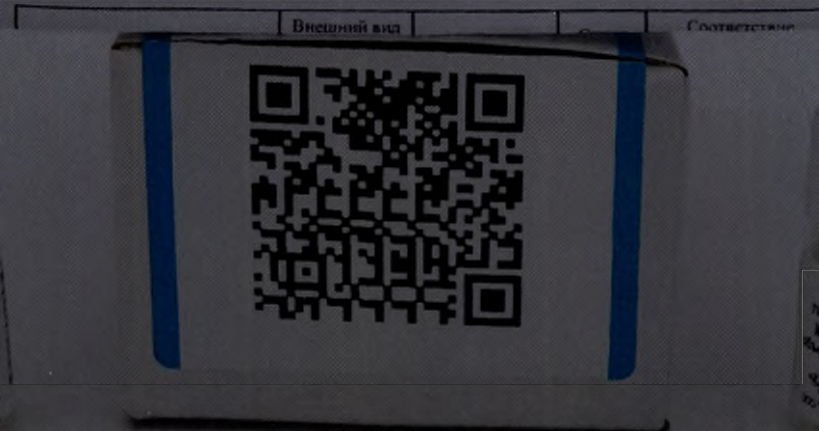

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-539-98539446-2020

Кат. № 1290210 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт



Контроли MagnoLIA тиреоглобулин
Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-539-98539446-2020

Состав набора

Контроль 1	10 фл.
Контроль 2	10 фл.

LOT E005

2021-12-23

+25°C



REF 1290210

2022-12-23



IVD



TU 21.20.23-539-98539446-2020
PV № XXXXXXXXXX

Гарантия в соответствии с условиями
Антиген в БИВ 1,2 в вирусу гепатита С и HBeAg отсут. (отсут.)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли Magnolia тиреоглобулин», по ТУ 21.20.23-539-98539446-2020

Кат. № 1290210 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Контроли Magnolia тиреоглобулин

LOT E005

2022-12-23

REF 1290210

+2⁺8
C



ООО «Компания Алкор Био»,
192148 Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)6778779, 6772182
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru


ООО «Компания Аскор Бино»
г. Санкт-Петербург, Менделеевский пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-8779

ИАСПОРТ № Е005

Набор реагентов для контроля качества изделий «Комплекс МагнотЛД»
типизация: оп. № 11.20.23.439-9839446-2020

Кат. № 1290210 Серия № Е005 документация № 1 Количество 100 шт.

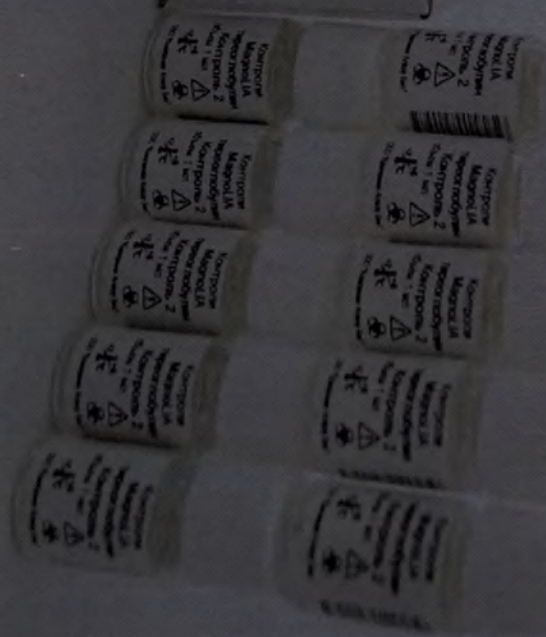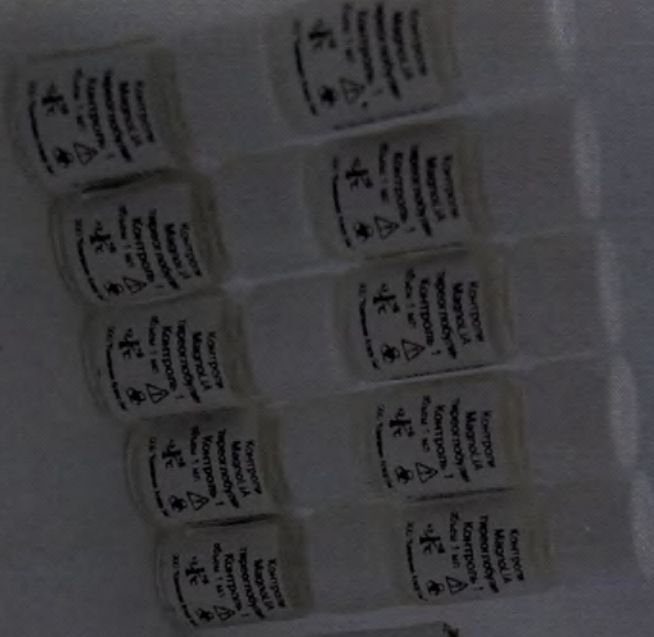

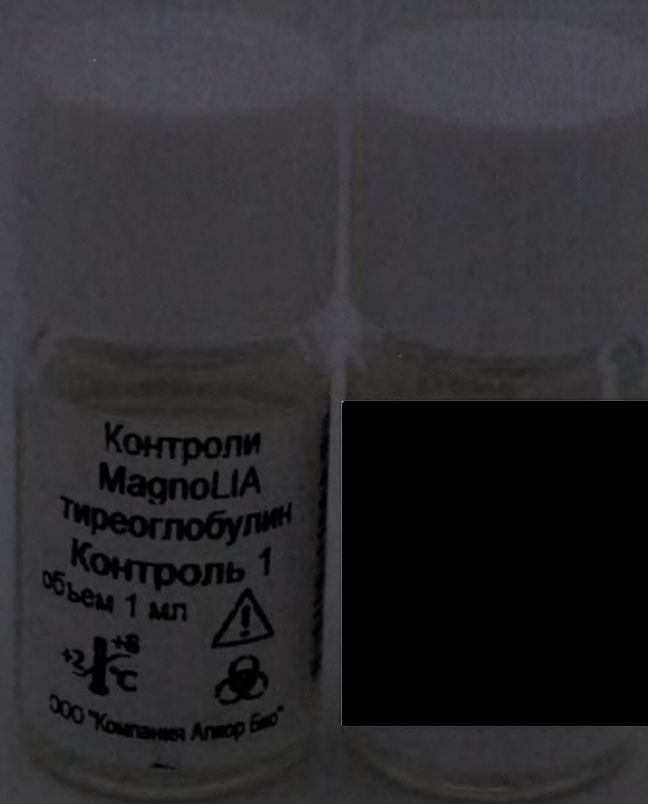



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

12 (двадцать) лист 8

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

_____ "Компания Алкор Био" Полынцев

