

ФГУП «Тамбовское ПрОП»
Минздравсоцразвития России

Памятка по пользованию
Обувь ортопедическая на протезы

нумеровано
ного лица
ва Е.В.
сентяб



В.А. Селин

Тамбов 2011

1. Описание конструкции

Ортопедическая обувь на протезы, предназначена для взрослых и детей с ограничениями жизнедеятельности (инвалидов), пользующихся протезами нижних конечностей.

Назначается на протезы при односторонней ампутации инвалидам в зависимости от состояния сохранившейся конечности при отсутствии деформации стопы, для профилактики развития статических деформаций стопы.

Предполагаемый класс потенциального риска применения первый (изделие с низкой степенью риска) по ГОСТ Р 51609-2000.

2. Пользование ортопедической обувью

Обувь одевается в положении «сидя». Обувь плотно закреплена на ноге при помощи шнурков. Обувь не препятствует нормальному функционированию стопы.

Гарантийный срок носки обуви устанавливается со дня выдачи -на кожаной подошве 30 дней;

на кожаной подошве с накладкой -50 дней;

на подошве из кожеподобной резины -60 дней;

на подошве из пористой резины -70 дней;

на детскую обувь - 45 дней.

В течение гарантийного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

3. Уход за ортопедической обувью

При эксплуатации обуви следует соблюдать следующие условия:

- сушить обувь ежедневно при комнатной температуре;
- чистить обувь при необходимости с применением влажной мягкой ткани.

Не допускается сушить обувь на нагревательных поверхностях.

4. Комплектность обуви

комплект поставки обуви входит:

Обувь - 1 пара (полупара);

Вкладыш по пользованию – 1 шт.

Директора ФГУП «Тамбовское ПроП»

Минздрава России



В. А. Селин

392000 г. Тамбов
ул. Московская 23
телефон 8 (4752) 72-34-52

Результаты и

1. И

2. И

3. И

4. И

5. М

Матери

6. И

Испытания п

Стандарты

«Оценка

«Сборник

исследо

назначе

ГОСТ Р 51

предств

на стер

ГН 2.3.397

контакт

МУ 1.1.037

Утв. ГС

ГОСТ Р 52

Методы

И.о. Директора ФГУ «Гамовское ПРОП»
Минздрава России
В. А. Селин

