

## **Инструкция по применению обуви ортопедической (для детей).**

Обувь сложная ортопедическая предназначена для детей при выраженных анатомических изменениях стоп (эквино-варусная, эквино-плосковальгусная).

Обувь ортопедическая изготавливается согласно медицинскому заказу, соответствует мерке и обчерку, указанным в бланке заказа.

Обувь в соответствии с ее функциональным назначением включает жесткие специальные детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстельные слои, специальные детали низа и прочее.

Обувь устойчива к климатическим воздействиям, (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Материалы, имеющие контакт со стопой устойчивы к воздействию физиологической жидкости (пота).

Не допускается контакт обуви с растворами кислот, щелочей, растворителями, температурой выше +40°C.

Обувь не препятствует нормальному функционированию стопы.

Обувь плотно закреплена на ноге при помощи шнурков, пряжек, резинок, застежек «молния» или «контакт».

Обувь при хранении защищена от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия паров, газов и химических веществ.

При эксплуатации обуви следует соблюдать следующие условия:

- после каждой носки приводить обувь в порядок, вычищать от пыли, грязи, в случае загрязнения жирами использовать 1-2% мыльный раствор;

- сушить мокрую обувь при комнатной температуре вдали от отопительных приборов, источников тепла, предварительно набив ее скомканной газетной бумагой;

- при надевании обуви пользоваться обувной ложкой, чтобы не поломать пяточную часть;

- не снимать обувь, наступая на задник, предотвращая отрывание подошвы.

Срок службы обуви не менее одного года.

Гарантийный срок службы на детскую обувь – 45 дней.

В течение гарантийного срока предприятие изготовитель принимает претензии по качеству обуви и производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Гл. инженер\_\_\_\_\_

Л. Н. Карпушонок

Контрольный мастер\_\_\_\_\_

Е. А. Иванова

