

**Фотографические изображения медицинского изделия:**

**Средство для восстановления и защиты ногтевой пластины  
при грибковом поражении МИКОСТОП®**

**по ТУ 21.20.23-001-87556022-2018**

Средство для восстановления  
и защиты ногтевой пластины



при  
грибковом  
поражении

Защищает  
от грибковой инфекции

Способствует  
восстановлению  
здорового ногтя



Средство для  
восстановления и защиты  
ногтевой пластины



при грибковом  
поражении

флакон-капельница



Фармтек

15 мл



Медицинское изделие Средство для восстановления и защиты ногтевой пластины при грибковом поражении МИКОСТОП® во флаконе

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU (в аптечной упаковке)



Средство для  
восстановления и защиты  
ногтевой пластины



при грибковом  
поражении



Медицинское изделие Средство для восстановления и защиты ногтевой пластины при грибковом поражении МИКОСТОП во флаконе





RU № XXXX/XXX от ДД.ММ.ГГГГ  
TV 21.20.23-001-87556022-2018

07.17  
07.17  
07.20

**Способ применения**  
Одну каплю средства  
распределите  
по поверхности  
Применяйте МИКОСТОП  
средство утром и  
не менее 8 недель  
только на ночь для  
восстановления  
нормального вида  
**Состав, условия  
и меры предосторожности**  
см. на упаковке.  
**Объем: 15 мл**



Медицинское изделие Средство для восстановления и защиты ногтевой  
пластины при грибковом поражении МИКОСТОП во флаконе  
(интерьерной упаковке)

**Способ применения:**  
Одну каплю средства  
распределите  
по поверхности ногтя.  
Применяйте МИКОСТОП  
средство утром и на ночь  
не менее 8 недель, затем  
только на ночь до полного  
восстановления  
нормального вида ногтя.  
**Состав, условия хранения  
и меры предосторожности  
см. на упаковке.**  
**Объем:** 15 мл

Средство для  
восстановления и защиты  
ногтевой пластины



при грибковом  
поражении

**Производитель:**  
ООО «Фармтек»  
**Место производства  
медицинского изделия:**  
ЗАО «Зеленая дубрава»  
**Претензии и пожелания  
отправлять по адресу:**  
ООО «Фармтек»

Номер партии: 0717

Дата изготовления: 07.17

Использовать до: 07.20

РУ №XXXX/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ  
ТУ 21.20.23-001-87556022-2018



Средство для восстановления  
и защиты ногтевой пластины при  
**грибковом поражении**  
МИКОСТОП®

Средство для восстановления  
и защиты ногтевой пластины

MYCO-STOP

MYCO-STOP

МИКО-STOP

при  
грибковом  
поражении

**Внимание:** Средство  
для восстановления  
и защиты ногтевой  
пластины  
при грибковом  
поражении  
МИКОСТОП®  
предназначено  
для восстановления  
и защиты ногтевой  
пластины,  
поврежденной  
группой  
грибкового поражения  
(микомикоз)

Защищает  
от грибковой инфекции

Способствует  
восстановлению  
здорового ногтя



Флакон-капельница

Средство  
для восстановления  
и защиты ногтевой  
пластины при грибковом  
поражении МИКОСТОП®  
в комплекте

- средство во флаконе  
из пластика с этикеткой,  
с дозатором-  
капельницей  
и крышкой  
с контролем вскрытия  
- 1 шт.
- инструкция  
по применению - 1 шт.;
- картонная коробка -  
1 шт. (потребительская  
упаковка).

Объем 15 мл



4 603 376 004 090

#### Способ применения

Перед первым применением средства МИКОСТОП®  
необходимо максимально удалить пораженную часть ногтя.  
Нанесите 1 каплю средства на поверхность ногтя и равномерно  
распределите носиком флакона по всей поверхности, а также  
по обрезанному краю ногтя. После нанесения подождите  
1-2 минуты до полного высыхания ногтя. Применяйте средство  
МИКОСТОП® утром и на ночь не менее 8 недель, затем  
только на ночь до полного восстановления нормального вида  
ногтя. Полное восстановление нормальной ногтевой пластины  
достигается за 6-12 месяцев в зависимости от площади  
и локализации поражения.

**Противопоказания:** Повышенная чувствительность  
к компонентам изделия. Не наносить на открытые раны  
и избежать попадания на слизистые оболочки.

**Состав:** вода очищенная, пропиленгликоль, молочная кислота,  
Sorbitol 80 P (полисорбат 80), никотиновая кислота,  
эфирное масло лаванды, эфирное масло розмарина,  
гидрокситилцеллюлоза (Натросил 250 NHX).

5°C - 25°C

RU №XXXX/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ

ООО «ФАРМТЕК», Россия, 115230, г. Москва,  
Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9, эт. 3, пом. X, ком. 25Г, оф. 10,  
тел.: +7 (495) 673-10-21, www.pharmtec.ru

**Место производства:**

ЗАО «Зеленая дубрава», Россия, 141801, Московская область,  
город Дмитров, ул. Профессиональная, д. 151.

**Претензии и жалобы отправлять по адресу:**

ООО «ФАРМТЕК», Россия, 115230, г. Москва,  
Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9, эт. 3, пом. X, ком. 25Г, оф. 10,  
тел.: +7 (495) 673-10-21, www.pharmtec.ru.

TU 21.20.23-001-87556022-2018



Фармтек

15 мл

0202/20

2102/20

2120



медицинское изделие Средство для восстановления и защиты ногтевой  
пластины при грибковом поражении МИКОСТОП®. Картонная коробка



Средство для восстановления  
и защиты ногтевой пластины



при  
грибковом  
поражении

Защищает  
от грибковой инфекции

Способствует  
восстановлению  
здорового ногтя



флакон-капельница



Фармтек

15 мл



Медицинское изделие Средство для восстановления и защиты ногтевой пластины при грибковом поражении МИКОСТОП® в картонной коробке

Средство для восстановления  
и защиты ногтевой пластины




при  
грибковом  
поражении

Восстанавливает структуру ногтя, укрепляет ногтевую пластину, защищает от дальнейшего поражения.



Фармтек

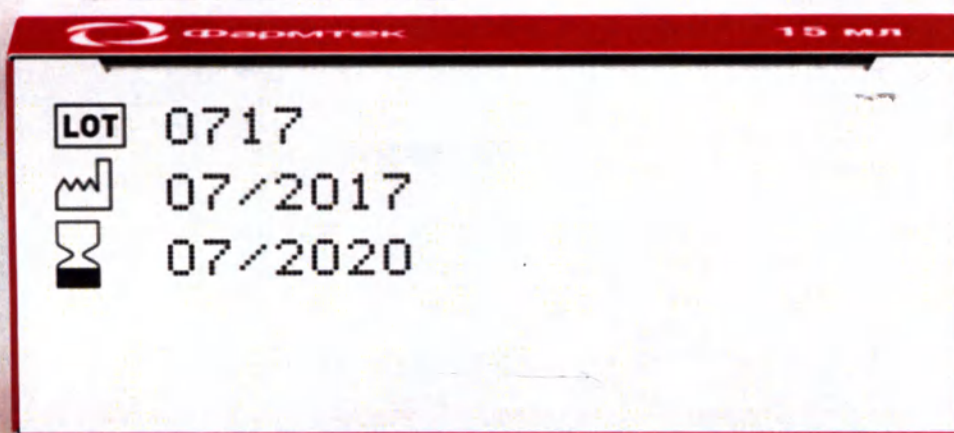

|     |         |
|-----|---------|
| LOT | 0717    |
|     | 07/2017 |
|     | 07/2020 |



Медицинское изделие Средство для восстановления и защиты ногтевой пластины при грибковом поражении МИКОСТОП® в картонной коробке





**Назначение:** Средство для восстановления и защиты ногтевой пластины при грибковом поражении МИКОСТОП® предназначено для восстановления и защиты ногтевой пластины, поврежденной в результате грибкового поражения (онихомикоз).



Медицинское изделие Средство для восстановления и защиты ногтевой пластины при грибковом поражении МИКОСТОП® в картонной коробке



Средство  
для восстановления  
и защиты ногтевой  
пластины при грибковом  
поражении МИКОСТОП®  
в комплекте:

- средство во флаконе  
из пластика с этикеткой,  
с дозатором-  
капельницей  
и крышкой  
с контролем вскрытия  
- 1 шт.;
- инструкция  
по применению - 1 шт.;
- картонная коробка -  
1 шт. (потребительская  
упаковка).

Объем: 15 мл



Медицинское изделие Средство для восстановления и защиты ногтевой  
пластины при грибковом поражении МИКОСТОП® в картонной коробке



Средство для восстановления  
и защиты ногтевой пластины при  
**грибковом поражении**  
МИКОСТОП®



Медицинское изделие Средство для восстановления и защиты ногтевой пластины при грибковом поражении МИКОСТОП® в картонной коробке




**Способ применения:**

Перед первым применением средства МИКОСТОП® необходимо максимально удалить пораженную часть ногтя. Нанесите 1 каплю средства на поверхность ногтя и равномерно распределите носиком флакона по всей поверхности, а также по обрезанному краю ногтя. После нанесения подождите 1-2 минуты до полного высыхания ногтя. Применяйте средство МИКОСТОП® утром и на ночь не менее 8 недель, затем только на ночь до полного восстановления нормального вида ногтя. Полное восстановление нормальной ногтевой пластины достигается за 6-12 месяцев в зависимости от площади и локализации поражения.

**Противопоказания:** Повышенная чувствительность к компонентам изделия. Не наносить на открытые раны и избегать попадания на слизистые оболочки.

**Состав:** вода очищенная, пропиленгликоль, молочная кислота, Sorbital T 80 P (полисорбат 80), никотиновая кислота, эфирное масло лаванды, эфирное масло розмарина, гидроксизтилцеллюлоза (Натросол 250 ННХ).

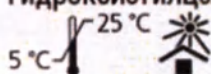

РУ №XXXX/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ

 ООО «ФАРМТЕК», Россия, 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9, эт. 3, пом. X, ком. 25Г, оф. 10, тел.: +7 (495) 673-10-21, [www.pharmtec.ru](http://www.pharmtec.ru).

**Место производства:**

ЗАО «Зеленая дубрава», Россия, 141801, Московская область, город Дмитров, ул. Профессиональная, д. 151.

**Претензии и пожелания отправлять по адресу:**

ООО «ФАРМТЕК», Россия, 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9, эт. 3, пом. X, ком. 25Г, оф. 10, тел.: +7 (495) 673-10-21, [www.pharmtec.ru](http://www.pharmtec.ru).

ТУ 21.20.23-001-87556022-2018



Медицинское изделие Средство для восстановления и защиты ногтевой пластины при грибковом поражении МИКОСТОП® в картонной коробке



Прошито,  
пронумеровано

и скреплено печатью

12 листов

Генеральный директор

ООО "ФАРМТЕК"

Галин Ю.Л.

