

УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель



И.Г.Приходкин

«02» ноября 2022 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кресло-туалет для инвалидов «ЮКИ групп» по ТУ 32.50.50-002-0162467818-2018

До начала эксплуатации подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!

Настоящие технические условия распространяются на медицинское изделие «Кресло-туалет для инвалидов «ЮКИ групп» по ТУ 32.50.50-002-0162467818-2018». Прежде, чем использовать кресло-туалет для инвалидов «ЮКИ групп», пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством.

Примечание: применение данного кресла-туалета должно полностью соответствовать этому руководству, иначе продукт может быть поврежден. Пожалуйста, проводите дезинфекцию, соблюдая требования настоящего руководства.

1. Назначение изделия

«Кресло-туалет для инвалидов «ЮКИ групп» по ТУ 32.50.50-002-0162467818-2018», предназначенное для больных и инвалидов с частичной утратой функции опорно-двигательного аппарата в качестве санитарно-гигиенического приспособления в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях.

Изделие не предназначено для транспортировки больных и инвалидов.

Потенциальный потребитель: пациент, медицинский работник и другие лица, осуществляющие уход за пациентом.

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пациента или повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями настоящего Руководства и общими требованиями безопасности.

2. Показания к применению, противопоказания, побочные действия, риск применения.

Показания к применению: заболевания, последствия травм и деформация нижних конечностей, таза и позвоночника с выраженным нарушением функций ходьбы и стояния; гемиплегия; паралич и ампутация нижних конечностей; повреждения суставов (не на обеих руках) или контрактуры и другие заболевания опорно-двигательного аппарата; болезни системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения, мочеполовой системы, злокачественные новообразования.

Противопоказания:

- невозможность сохранения сидячего положения;
- тяжелые нарушения вестибулярного аппарата;
- потеря функциональности обеих рук;
- ограниченная или недостаточная способность к ориентации;
- наркотическое или алкогольное воздействие;
- психические расстройства.

Побочные действия: Отсутствуют.

Риски применения:

- Некачественное проведение дезинфекции изделия может привести бактериальному заражению пациента (см. раздел «Уход за изделием»).
- Превышение допустимой нагрузки (раздел «Структура и параметры»), а также грубое обращение могут привести к поломке изделия.

Во избежание указанных рисков не пренебрегайте требованиями настоящего Руководства.

3. Структура и параметры

Наименование и обозначение	Количество на исполнение				
	КТ810М	КТ813М	КТ899М	КТ696	КТ009
Каркас	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Фиксатор каркаса	2 шт.	-	-	-	-
Спинка	1 шт.	1 шт.	-	-	1 шт.
Подлокотник	-	-	-	-	2 шт.
Подножка	-	-	-	-	2 шт.
Сиденье	-	-	-	-	1 шт.
Фиксатор емкости санитарной	2 шт.	-	-	-	-
Емкость санитарная	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Крышка емкости санитарной	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Стульчак	1 шт.	1 шт.	-	1 шт.	1 шт.
Крышка стульчака	1 шт.	1 шт.	-	1 шт.	-
Комплект крепежа*	1 шт.	-	-	-	-
Руководство по эксплуатации	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.

* Комплект крепежа включает: Винт М6х40 ГОСТ 11644 (4 шт.); Винт М6х40 ГОСТ ISO 7380-1 (2 шт.); Гайка М6 ГОСТ Р ИСО 7042 (6 шт.); Шайба М6 ГОСТ 11371 (6 шт.).

Описание и технические характеристики:

Параметр	Исполнение				
	КТ810М	КТ813М	КТ899М	КТ696	КТ009
Ширина, мм	600	570	540	540	540
Ширина сиденья, мм	365	380	385	380	440
Ширина между подлокотниками, мм	450	460	435	450	435
Длина, мм	510	500-520	480	510	800
Глубина сиденья, мм	400	400-420	400	400	400
Высота, мм	650-775	600-700	775	750	950
Высота сиденья, мм	420-570	390-490	440	450-550	520
Диаметр колес (передние / задние), мм, не более	-	-	-	125/125	125/125
Габаритные размеры в сложенном состоянии, мм	-	-	110х520 х 770	-	560 х 320 х 500
Масса, кг, не более	6,7	7,4	5,1	8,8	14,2
Допустимая нагрузка, кг, не более	175	175	125	125	150
Объем, л, не более	6	6	6	6	8

Примечания:

- 1) Высота кресел, глубина и высота сидений регулируется в указанных диапазонах.
- 2) Допустимые отклонения габаритных размеров должны быть в пределах 10%.

Материалы, применяемые при изготовлении кресел, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла при его нормальной эксплуатации.

Элементы кресла-туалета, которые могут подвергнуться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пот, моча), устойчивы к их воздействию.

Ножки кресла-туалета исполнений КТ810М, КТ813М, КТ899М оснащены резиновыми наконечниками для предотвращения скольжения.

Исполнения КТ696, КТ009 оснащены колесной опорой и стояночной системой торможения для обеспечения удержания кресла с пользователем в неподвижном состоянии.

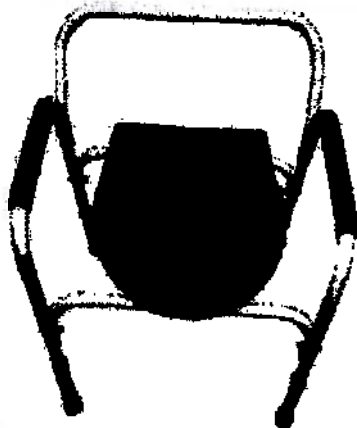
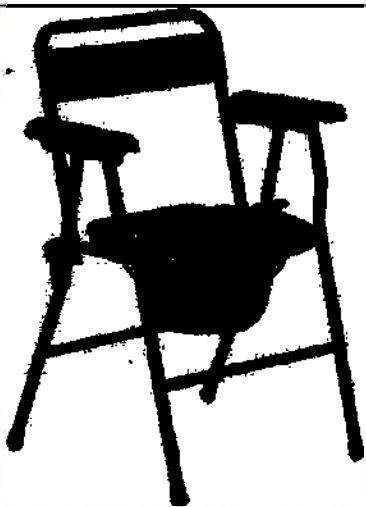
Внимание:

Не допускается применять изделие для транспортировки больных и инвалидов.

Исполнение КТ009 оборудовано двумя съемными, откидными подножками, обеспечивающими опору стопы.

Конструкция кресла-туалета (всех исполнений) позволяет устанавливать его над унитазом (предварительно необходимо снять санитарную емкость).

Внешний вид исполнений:

Исполнение	Изображение	Исполнение	Изображение
КТ810М		КТ813М	
КТ899М		КТ696	
КТ009			

4. Подготовка к эксплуатации и порядок использования

Эксплуатация кресла-туалета должна производиться в соответствии с требованиями настоящего Руководства по эксплуатации.

Подготовка кресла-туалета КТ810М:

Соедините две части каркаса с помощью фиксаторов каркаса.

Установите спинку в гнезда рамы.

Вставьте в пазы собранного каркаса фиксаторы емкости санитарной.

Установите стульчак и крышку с задней стороны рамы.

Установите санитарную емкость под сиденьем каркаса.

Установите необходимую высоту сиденья с помощью кнопочных фиксаторов. Для устойчивости выбирайте на всех ножках один и тот же уровень высоты.

Подготовка кресла-туалета КТ813М:

Установите спинку в гнезда рамы до щелчка фиксаторов.

Установите стульчак и крышку с задней стороны рамы.

Установите санитарную емкость под сиденьем, вставив ее в пазы каркаса.

Поднимите подлокотники и закрепите их положение с помощью фиксаторов.

Установите необходимую высоту сиденья с помощью кнопочных фиксаторов. Для устойчивости выбирайте на всех ножках один и тот же уровень высоты.

Подготовка кресла-туалета КТ899М:

Кресло поставляется в сложенном виде.

Для раскладывания кресла-туалета возьмитесь одной рукой за заднюю направляющую каркаса, другой рукой - за переднюю, и разведите их друг от друга до упора. Зафиксируйте данное положение с помощью рычагов фиксаторов, повернув их до упора по часовой стрелке (см. рис.).



Рычаг фиксатора

Установите санитарную емкость на опоры сзади каркаса, под сиденьем. Складывание кресла-туалета осуществляется в обратном порядке.

Подготовка кресла-туалета КТ809:

Кресло поставляется в сложенном виде.

Разложите каркас кресла-туалета по ширине, раздвинув по периметру колесные стойки. Зафиксируйте это положение, установив в гнезда каркаса спинку и подлокотники до упора; при этом фиксаторы должны защелкнуться.

Наденьте подножки на направляющие, находящиеся на каркасе и поверните в сторону от колеса до срабатывания фиксатора.

Для снятия подножек необходимо нажать на рычажок по направлению к центру, повернуть подножку в сторону колеса и движением вверх снять ее с направляющих.

Для установки спинки вставьте ее в соответствующие отверстия на каркасе до упора до срабатывания фиксаторов.

Установите на каркас кресла-туалета стульчак, при этом необходимо совместить фиксаторы, расположенные по периметру на стульчаке, с основанием каркаса, затем с легким нажимом по периметру стульчака зафиксировать его на каркасе; поверх положить сиденье.

Повесьте санитарную емкость на нижние пазы стульчака.

Складывание кресла осуществляется в обратном порядке.

Подготовка кресла-туалета КТ696:

Кресло поставляется в сложенном виде.

Разложите каркас кресла-туалета по ширине, раздвинув по периметру колесные стойки. Зафиксируйте это положение, установив в гнезда каркаса спинку и подлокотники до упора; при этом фиксаторы должны защелкнуться.

Установите на каркас кресла-туалета стульчак, при этом необходимо совместить фиксаторы, расположенные по периметру на стульчаке, с основанием каркаса, затем с легким нажимом по периметру стульчака зафиксировать его на каркасе; поверх положить сиденье.

Повесьте санитарную емкость на нижние пазы стульчака.

Установите необходимую высоту сиденья с помощью кнопочных фиксаторов. Для устойчивости выбирайте на всех ножках один и тот же уровень высоты.

При посадке пациента спереди:

- зафиксируйте тормоза колес кресла-туалета (только для КТ009, КТ696);
- сложите вверх подножки (только для КТ009);
- переместите пациента в кресло-туалет;
- опустите подножки и поставьте на них ноги пациента (только для КТ009).

Высадку пациента осуществляйте в обратном порядке.

При посадке пациента сбоку (для КТ813М, КТ009):

- зафиксируйте тормоза колес кресла-туалета (для КТ009);
- снимите (для КТ009) или опустите (для КТ813М) подлокотник со стороны, с которой будет пересаживаться пациент;
- сложите подножки вверх (для КТ009);
- переместите пациента в кресло;
- установите подлокотник на место;
- опустите подножки и поставьте на них ноги пациента (для КТ009).

Высадку пациента осуществляйте в обратном порядке.

Внимание:

При посадке больного в кресло-туалет и высадке из него колеса должны быть поставлены на тормоз (для КТ009, КТ696).

Не разрешается вставать на подножки (для КТ009), которые при посадке и высадке больного должны быть подняты в вертикальное положение.

Запрещается эксплуатация кресла с неисправными тормозами (для КТ009, КТ696).

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха: от +10 °С до +35 °С
- относительная влажность: не более 80% при 25 °С

5. Меры безопасности

- Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресла- туалета.
- Необходимо иметь в виду, что изменение положения центра тяжести за счет смещения тела пациента или изменения нагрузки на кресло-туалет, а также наклоне на угол более 10° повышает опасность опрокидывания кресла-туалета.
- При посадке и высадке из кресла-туалета исполнений КТ009, КТ696 колеса необходимо зафиксировать с помощью тормозов.
- При посадке в кресло-туалет КТ009 и высадке из него не наступайте на подножку.
- После перемещения кресла-туалета исполнений КТ009, КТ696 рекомендуется фиксировать колеса с целью предотвращения несчастных случаев.
- Не оставляйте пациента в кресле-туалете без присмотра.
- Не превышайте допустимую нагрузку на кресло-туалет.
- Безопасность использования кресла-туалета гарантирована только, когда оно используется для тех целей, для которых оно предназначено, как определено в настоящем Руководстве.
- Категорически запрещается эксплуатация неисправного кресла-туалета.
- Модификация изделия не допускается.

Классификация:

- Класс потенциального риска применения: 1
- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: 220280
- Код ОКПД-2: 32.50.50.190

Изделие соответствует требованиям следующих национальных стандартов:

- ТУ 32.50.50-002-0162467818-2018 Кресло-туалет для инвалидов «ЮКИ групп»
- Серия ГОСТ ISO 10993 Оценка биологического действия медицинских изделий.
- ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.
- ГОСТ Р 50444-20 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.
- ГОСТ Р 57766-2017 Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля.
- ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.
- ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
- ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия.

6. Ремонт и техническое обслуживание

При эксплуатации кресло требует определенного технического ухода.

Дезинфекция (см. раздел «Уход за изделием»).

Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом.

При возникновении неисправности, связанной с неправильным функционированием кресла-туалета, необходимо обратиться в сервисный центр предприятия-изготовителя.

Внимание:

Ремонт кресла-туалета собственными силами не допускается.

7. Уход за изделием

Дезинфекция изделия проводится в соответствии с требованиями МУ-287-113 «МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ, ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКЕ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» от «30» декабря 1998г.

Гигиеническую обработку допускается производить протираанием поверхностей 1 % раствором моноклорамина ХБ по ГОСТ 14193 не реже одного раза в неделю.

8. Транспортировка и хранение

Транспортирование кресла-туалета проводится любым видом наземного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Условия хранения кресла-туалета должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150.

Транспортировка кресла-туалета без заводской упаковки нежелательна.

9. Упаковка

Эксплуатационные и товаросопроводительные документы вкладываются в пакет из полиэтиленовой пленки.

Для транспортировки кресло-туалет уложено в чехол из полиэтиленовой пленки и уложено в короб из гофрированного картона или другую тару, исключающую повреждение изделия.

10. Маркировка

На каждое кресло-туалет прикрепляется табличка (этикетка), на которой указывается следующая информация:

- товарный знак предприятия-изготовителя и/или наименование производителя и адрес места производства;
- наименование и обозначение типа (модели) кресла;
- номер кресла по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- обозначение технических условий;
- номер регистрационного удостоверения;
- дата изготовления (год, месяц);

- надпись: «Сделано в России».

На каждой коробке для транспортирования наклеивается ярлык, на котором указаны:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение кресла;
- год и месяц упаковывания;
- обозначение настоящих технических условий.

На коробку для транспортирования наносятся основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки «Верх», «Беречь от влаги», «Хрупкое. Осторожно».

Расшифровка символов, используемых при маркировании изделия

	Производитель
	Дата изготовления
	Верх
	Беречь от влаги
	Хрупкое! Осторожно!

11. Утилизация.

Утилизировать Кресло-туалет для инвалидов «ЮКИ групп» по ТУ 32.50.50-002-0162467818-2018, вышедшее из эксплуатации, следует по с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Кресло-туалет для инвалидов «ЮКИ групп» по ТУ 32.50.50-002-0162467818-2018 относится к Классу А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам, и может утилизироваться по истечению срока эксплуатации совместно с бытовыми отходами.

12. Гарантия производителя.

Производитель: Индивидуальный предприниматель Приходкин Игорь Геннадьевич (ИП Приходкин И.Г.)

Паспорт: серия 65 14 номер 796703, выданный ОУФМС России по Свердловской обл., в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга, дата выдачи 02.04.2014 г.

Адрес: Россия, 620089, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 188, кв. 25

Телефон: 8(343)286-42-73, 8(343)286-42-74

Электронная почта: torgi@yukigroup.ru

Срок службы - не менее 5 лет.

Критерием предельного состояния кресла-туалета является невозможность или техникоэкономическая нецелесообразность восстановления его работоспособности.

Гарантийный срок на Кресло-туалет для инвалидов "ЮКИ групп" по ТУ 32.50.50-002-0162467818-2018 - 12 месяцев со дня отгрузки потребителю или со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Техническое обслуживание кресла-туалета производится в сервисных центрах, указанных ниже. Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Адрес сервисного центра: Россия, 620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, д. 4, лит. А

Телефон: 8(343)286-42-73, 8(343)286-42-74



Приходкин И.Г.