

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный
санитарный врач

Российской Федерации

Онищенко

" 19 " 2007 г.

№ 01-11/72 ОХ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ *
сыворотки диагностической чумной антифаговой,
лиофилизата для диагностических целей

Сыворотка диагностическая чумная антифаговая, лиофилизат для диагностических целей, представляет собой сыворотку крови лошади, гипериммунизированной бактериофагом чумным Покровской (П). Консервант – хлороформ 1%. Титр сыворотки не менее 1:100.

Описание

Сухой препарат – аморфная масса сероватого цвета.

Назначение

Нейтрализация чумного бактериофага в исследуемом материале.

Способ применения

Сыворотку диагностическую чумную антифаговую растворяют в 1 мл дистиллированной воды. Растворенную прозрачную или слегка опалесцирующую жидкость зеленовато-желтого цвета. После растворения сыворотку хранят при температуре 4-8 °С в течение 24-48 ч.

На поверхность агаровой пластинки в чашке Петри наносят 1-2 капли сыворотки и стерильным стеклянным шпателем растирают по поверхности агара. Агар подсушивают в течение 15-30 мин, после чего засевают исследуемый материал.

* Взамен инструкции по применению, утвержденной 14.08.1998 г.