

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Медикал»
..... В. Николаев

Инструкции по применению

Шприцы однократного применения с иглами и без игл:

*1 мл.; 2 мл.; 2,5 мл.; 3 мл.; 5 мл.; 10 мл.; 20 мл.;
30мл.; 50 мл.; 60мл.; 100 мл.; 150мл..*

1. Описание.

Шприцы однократного применения предназначены для подкожного, внутримышечного и внутривенного введения лекарственных веществ, а также для отсасывания различных жидкостей из организма.

Изделие стерильно, нетоксично, непирогенно. Одноразовое. После одного применения уничтожается. Не подлежит использованию в случае повреждения упаковки.

2. Меры безопасности.

1. Визуальным осмотром определить целостность тары.
2. Шприц из повреждённой потребительской тары использовать запрещается.

3. Форма выпуска.

Шприцы выпускаются в потребительской таре, на которой указаны: тип, производитель, номинальная вместимость, срок годности.

4. Инструкции по применению.

1. Вскрыть потребительскую тару, извлечь шприц.
2. Плотнo одеть на конус шприца иглу.
3. Снять колпачок.
4. Набрать в шприц лекарственный препарат.
5. Расположить шприц с иглой вертикально, выдавить, нажимая на поршень, пузырьки воздуха.
6. При проведении инъекции, нажимать на поршень, крепко удерживая шприц под пальцевыми выступами.

5. Хранение.

Хранить шприцы в отапливаемых помещениях при температуре от +5° до +40°С и относительной влажностью воздуха до 80% при температуре +25°С.

Срок хранения не выше срока годности указанного на упаковке (пять лет от даты выпуска)

Производитель: **KD Medical GmbH Hospital Products,**
Charlottenstrasse 65, 10117 Berlin, Germany,
тел. +49-30-203 99 591, факс: ++49-30-203 99 599

