

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Медифайн»

О. В. Николаев

Инструкция по применению

Устройство одноразовое для переливания крови и кровезаменителей

Назначение:

Для проведения инфузионной терапии

Показания:

Для кратковременных введение растворов и лекарственных препаратов.

Для коррекции гидратации и/или дегидратации организма.

Основные характеристики:

Изделие выполнено из материалов, разрешенных к применению в медицинской практике:

Трубка, колпачок и адаптер изготовлены из полипропилена, порт - из акрилонитрила, камера - из ПВХ. Игла изготовлена из не-ржавеющей стали (SUS 304).

Изделие стерильно, пока упаковка не открыта или не повреждена.

Изделие нетоксично, апиrogenно.

Противопоказания к применению:

При подозрении на гиперчувствительность пациента к компонентам изделия.

Введение высокомолекулярных растворов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Использовать только квалифицированным медицинским персоналом..
2. Применять только в соответствии с данной инструкцией.
3. Не использовать вторично.
4. Не использовать, если герметичность индивидуальной упаковки нарушена.
5. Не подвергайте систему воздействию органических растворителей, ионизирующих излучений, ультрафиолетового света или спиртосодержащих жидкостей.
6. Не допускайте наличие воздуха в системе. Это может привести к эмболии.

Подготовка изделия к работе:

Изучить инструкцию пользователя.

Проверить целостность индивидуальной упаковки.

Открыть упаковку.

Порядок работы изделия:

1. Полностью закрыть зажим.
2. Ввести пластиковую иглу в контейнер капельницы.
3. Сдавливая капельницу, наполнить ее до половины объема.
4. Открыть зажим и выпустить воздух.
5. Закрыть зажим.
6. Произвести венопункцию металлической иглой.
7. Зажимом установить необходимую скорость потока.
8. Начать вливание раствора.
9. После завершения процедуры устройство подлежит утилизации в соответствии с нормами.

Хранение и транспортировка:

Транспортировать и хранить при температуре окружающей среды от $-20,0^{\circ}\text{C}$ до $+60,0^{\circ}\text{C}$, при относительной влажности 0-90% без парения и образования конденсата.

Срок годности: Пять лет от даты выпуска.

**Производитель: KD Medical GmbH Hospital Products,
Charlottenstrasse 65, 10117 Berlin, Germany,
+49-30-203 99 591, факс: ++49-30-203 99 599**