



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Медифайн»

.....О. В. Николаев

Инструкция по применению.

***Шприцы однократного применения инсулиновые с надетыми и встроенными иглами:
1 мл., 0,5 мл., 0,3 мл.***

1. Описание.

Шприцы KD –JECT однократного применения предназначены для подкожного, внутримышечного и внутривенного введения инсулина. Возможно применение для введения других лекарственных веществ, а также для отсасывания различных жидкостей из организма.

Изделие стерильно, нетоксично, апирогенно. Одноразовое. После одного применения уничтожается. Не подлежит использованию в случае повреждения упаковки.

2. Меры безопасности.

1. Визуальным осмотром определить целостность тары.
2. Шприц из повреждённой потребительской тары использовать запрещается.

3. Форма выпуска.

Шприцы выпускаются в потребительской таре, на которой указаны: название, тип, производитель, номинальная вместимость, срок годности, номер партии, номера российского и европейского сертификата соответствия и другая информация. Вся информация на упаковке написана на английском и полностью дублирована на русском языке.

4. Инструкции по применению.

1. Вскрыть потребительскую тару, извлечь шприц.
2. Снять колпачок.
3. Набрать в шприц инсулин или иной лекарственный препарат.
4. Расположить шприц с иглой вертикально вверх, выдавить, нажимая на поршень, пузырьки воздуха.
5. При проведении инъекции, нажимать на поршень, крепко удерживая шприц под пальцевыми выступами.

5. Хранение.

Хранить шприцы в отапливаемых помещениях при температуре от +5° до +40°С и относительной влажностью воздуха до 80% при температуре +25°С.

Срок хранения не выше срока годности указанного на упаковке

Производитель: **KD Medical GmbH Hospital Products,**
Charlottenstrasse 65, 10117 Berlin, Germany,
тел. +49-30-203 99 591, факс: ++49-30-203 99 599