

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ЭсДжиМедикал»



Т.Ю. Иванова

«08» сентября 2021 г.

**Матрац медицинский противопротезный
ортопедический по ТУ 32.50.50-007-09922741-2019, в
вариантах исполнения**

Руководство по эксплуатации

32.50.50-007-09922741 РЭ

Оглавление

1.	НАИМЕНОВАНИЕ	3
2.	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	7
3.	НАЗНАЧЕНИЕ	7
4.	ПОКАЗАНИЯ.....	8
5.	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.....	8
6.	УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	8
7.	ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ	8
8.	ОБЩИЙ ВИД МАТРАЦЕВ	8
9.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	18
10.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ	37
11.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	43
12.	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	44
13.	УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	44
14.	УКАЗАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ	44
15.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	44
16.	СРОК СЛУЖБЫ	45
17.	МАРКИРОВКА.....	45
18.	УПАКОВКА	45
19.	ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	46
20.	УТИЛИЗАЦИЯ	46
21.	ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	46
	Приложение А	48

1. НАИМЕНОВАНИЕ

Матрац медицинский противопротезный, ортопедический по ТУ 32.50.50-007-09922741-2019

Варианты исполнения:

1. Матрац медицинский противопротезный ортопедический, модель МП-1, в следующих размерах:
1200х600х80 мм; 1400х700х80 мм; 1700х800х80 мм; 1900х700х80 мм; 1900х800х80 мм;
1900х850х80 мм; 1900х900х80 мм; 1950х800х80 мм; 1950х850х80 мм; 1950х900х80 мм;
2000х800х80 мм; 2000х850х80 мм; 2000х900х80 мм; 1200х600х100 мм; 1400х700х100 мм;
1700х800х100 мм; 1900х700х100 мм; 1900х800х100 мм; 1900х850х100 мм; 1900х900х100 мм;
1950х800х100 мм; 1950х850х100 мм; 1950х900х100 мм; 2000х800х100 мм; 2000х850х100 мм;
2000х900х100 мм.
2. Матрац медицинский противопротезный ортопедический, модель МП-2, в следующих размерах:
1200х600х80 мм; 1400х700х80 мм; 1700х800х80 мм; 1900х700х80 мм; 1900х800х80 мм;
1900х850х80 мм; 1900х900х80 мм; 1950х800х80 мм; 1950х850х80 мм; 1950х900х80 мм;
2000х800х80 мм; 2000х800х80 мм; 2000х850х80 мм; 1200х600х100 мм; 1400х700х100 мм;
1700х800х100 мм; 1900х700х100 мм; 1900х800х100 мм; 1900х850х100 мм; 1900х900х100 мм;
1950х800х100 мм; 1950х850х100 мм; 1950х900х100 мм; 2000х800х100 мм; 2000х850х100 мм;
2000х900х100 мм.
3. Матрац медицинский противопротезный ортопедический, модель МП-3, в следующих размерах:
1200х600х80 мм; 1400х700х80 мм; 1700х800х80 мм; 1900х700х80 мм; 1900х800х80 мм;
1900х850х80 мм; 1900х900х80 мм; 1950х800х80 мм; 1950х850х80 мм; 1950х900х80 мм;
2000х800х80 мм; 2000х800х80 мм; 2000х850х80 мм; 1700х800х100 мм; 1200х600х100 мм;
1400х700х100 мм; 1700х800х100 мм; 1900х800х100 мм; 1900х850х100 мм; 1900х900х100 мм;
1950х800х100 мм; 1950х850х100 мм; 1950х900х100 мм; 2000х800х100 мм; 2000х850х100 мм;
2000х900х100 мм.
4. Матрац медицинский противопротезный ортопедический, модель МП-4, в следующих размерах:
1200х600х100 мм; 1400х700х100 мм; 1700х800х100 мм; 1900х700х100 мм; 1900х800х100 мм;
1900х850х100 мм; 1900х900х100 мм; 1950х800х100 мм; 1950х850х100 мм; 1950х900х100 мм;
2000х800х100 мм; 2000х850х100 мм; 2000х900х100 мм.
5. Матрац медицинский противопротезный ортопедический, модель МП-5, в следующих размерах:
1200х600х100 мм; 1400х700х100 мм; 1700х800х100 мм; 1900х700х100 мм; 1900х800х100 мм;
1900х850х100 мм; 1900х900х100 мм; 1950х800х100 мм; 1950х850х100 мм; 1950х900х100 мм;
2000х800х100 мм; 2000х850х100 мм; 2000х900х100 мм.

6. Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, модель МП-6, в следующих размерах:
1200х600х90 мм; 1400х700х90 мм; 1700х800х90 мм; 1900х700х90 мм; 1900х800х90 мм;
1900х850х90 мм; 1900х900х90 мм; 1950х800х90 мм; 1950х850х90 мм; 1950х900х90 мм;
2000х800х90 мм; 2000х850х90 мм; 2000х900х90 мм.
7. Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, модель МП-7, в следующих размерах:
1200х600х140 мм; 1400х700х140 мм; 1700х800х140 мм; 1900х700х140 мм; 1900х800х140 мм;
1900х850х140 мм; 1900х900х140 мм; 1950х800х140 мм; 1950х850х140 мм; 1950х900х140 мм;
2000х800х140 мм; 2000х850х140 мм; 2000х900х140 мм.
8. Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, модель МП-8, в следующих размерах:
1200х600х140 мм; 1400х700х140 мм; 1700х800х140 мм; 1900х700х140 мм; 1900х800х140 мм;
1900х850х140 мм; 1900х900х140 мм; 1950х800х140 мм; 1950х850х140 мм; 1950х900х140 мм;
2000х800х140 мм; 2000х850х140 мм; 2000х900х140 мм.
9. Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, модель МП-9, в следующих размерах:
1200х600х140 мм; 1400х700х140 мм; 1700х800х140 мм; 1900х700х140 мм; 1900х800х140 мм;
1900х850х140 мм; 1900х900х140 мм; 1950х800х140 мм; 1950х850х140 мм; 1950х900х140 мм;
2000х800х140 мм; 2000х850х140 мм; 2000х900х140 мм;
10. Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, модель МП-10, в следующих размерах:
1200х600х140 мм; 1400х700х140 мм; 1700х800х140 мм; 1900х700х140 мм; 1900х800х140 мм;
1900х850х140 мм; 1900х900х140 мм; 1950х800х140 мм; 1950х850х140 мм; 1950х900х140 мм;
2000х800х140 мм; 2000х850х140 мм; 2000х900х140 мм.
11. Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, модель МП-11, в следующих размерах:
1200х600х140 мм; 1400х700х140 мм; 1700х800х140 мм; 1900х700х140 мм; 1900х800х140 мм;
1900х850х140 мм; 1900х900х140 мм; 1950х800х140 мм; 1950х850х140 мм; 1950х900х140 мм;
2000х800х140 мм; 2000х850х140 мм; 2000х900х140 мм.
12. Матрац медицинский противопролежневый, модель МП-12, в следующих размерах:
1200х600х120 мм; 1400х700х120 мм; 1700х800х120 мм; 1900х700х120 мм; 1900х800х120 мм;
1900х850х120 мм; 1900х900х120 мм; 1950х800х120 мм; 1950х850х120 мм; 1950х900х120 мм;
2000х800х120 мм; 2000х850х120 мм; 2000х900х120 мм; 1200х60х140 мм; 1400х700х140 мм;
1700х800х140 мм; 1900х700х140 мм; 1900х800х140 мм; 1900х850х140 мм; 1900х900х140 мм;
1950х800х140 мм; 1950х850х140 мм; 1950х900х140 мм; 2000х800х140 мм; 2000х850х140 мм;
2000х900х140 мм.

13. Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, модель МП-13, в следующих размерах:

1200х600х180 мм; 1400х700х180 мм; 1700х800х180 мм; 1900х700х180 мм; 1900х800х180 мм;
1900х850х180 мм; 1900х900х180 мм; 1950х800х180 мм; 1950х850х180 мм; 1950х900х180 мм;
2000х800х180 мм; 2000х850х180 мм; 2000х900х180 мм.

14. Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, модель МП-14, в следующих размерах:

1200х600х140 мм; 1400х700х140 мм; 1700х800х140 мм; 1900х700х140 мм; 1900х800х140 мм;
1900х850х140 мм; 1900х900х140 мм; 1950х800х140 мм; 1950х850х140 мм; 1950х900х140 мм;
2000х800х140 мм; 2000х850х140 мм; 2000х900х140 мм.

15. Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, модель МП-15, в следующих размерах:

1200х600х140 мм; 1400х700х140 мм; 1700х800х140 мм; 1900х700х140 мм; 1900х800х140 мм;
1900х850х140 мм; 1900х900х140 мм; 1950х800х140 мм; 1950х850х140 мм; 1950х900х140 мм;
2000х800х140 мм; 2000х850х140 мм; 2000х900х140 мм.

16. Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, модель МП-16, в следующих размерах:

1200х600х220 мм; 1400х700х220 мм; 1700х800х220 мм; 1900х700х220 мм; 1900х800х220 мм;
1900х850х220 мм; 1900х900х220 мм; 1950х800х220 мм; 1950х850х220 мм; 1950х900х220 мм;
2000х800х220 мм; 2000х850х220 мм; 2000х900х220 мм.

17. Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, модель МП-17, в следующих размерах:

1200х600х140 мм; 1400х700х140 мм; 1700х800х140 мм; 1900х700х140 мм; 1900х800х140 мм;
1900х850х140 мм; 1900х900х140 мм; 1950х800х140 мм; 1950х850х140 мм; 1950х900х140 мм;
2000х800х140 мм; 2000х850х140 мм; 2000х900х140 мм.

18. Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, модель МП-18, в следующих размерах:

1200х600х140 мм; 1400х700х140 мм; 1700х800х140 мм; 1900х700х140 мм; 1900х800х140 мм;
1900х850х140 мм; 1900х900х140 мм; 1950х800х140 мм; 1950х850х140 мм; 1950х900х140 мм;
2000х800х140 мм; 2000х850х140 мм; 2000х900х140 мм.

19. Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, модель МП-19, в следующих размерах:

1200х600х180 мм; 1400х700х180 мм; 1700х800х180 мм; 1900х700х180 мм; 1900х800х180 мм;
1900х850х180 мм; 1900х900х180 мм; 1950х800х180 мм; 1950х850х180 мм; 1950х900х180 мм;
2000х800х180 мм; 2000х850х180 мм; 2000х900х180 мм.

20. Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, модель МП-20, в следующих размерах:

1200х600х140 мм; 1400х700х140 мм; 1700х800х140 мм; 1900х700х140 мм; 1900х800х140 мм;
1900х850х140 мм; 1900х900х140 мм; 1950х800х140 мм; 1950х850х140 мм; 1950х900х140 мм;
2000х800х140 мм; 2000х850х140 мм; 2000х900х140 мм.

21. Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, модель МП-21, в следующих размерах:

1200х600х120 мм; 1400х700х120 мм; 1700х800х120 мм; 1900х700х120 мм; 1900х800х120 мм; 1900х850х120 мм; 1900х900х120 мм; 1950х800х120 мм; 1950х850х120 мм; 1950х900х120 мм; 2000х800х120 мм; 2000х850х120 мм; 2000х900х120 мм.

22. Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, модель МП-22, в следующих размерах:

1200х600х120 мм; 1400х700х120 мм; 1700х800х120 мм; 1900х700х120 мм; 1900х800х120 мм; 1900х850х120 мм; 1900х900х120 мм; 1950х800х120 мм; 1950х850х120 мм; 1950х900х120 мм; 2000х800х120 мм; 2000х850х120 мм; 2000х900х120 мм.

23. Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, модель МП-23, в следующих размерах:

1200х600х120 мм; 1400х700х120 мм; 1700х800х120 мм; 1900х700х120 мм; 1900х800х120 мм; 1900х850х120 мм; 1900х900х120 мм; 1950х800х120 мм; 1950х850х120 мм; 1950х900х120 мм; 2000х800х120 мм; 2000х850х120 мм; 2000х900х120 мм; 1200х600х140 мм; 1400х700х140 мм; 1700х800х140 мм; 1900х700х140 мм; 1900х800х140 мм; 1900х850х140 мм; 1900х900х140 мм; 1950х800х140 мм; 1950х850х140 мм; 1950х900х140 мм; 2000х800х140 мм; 2000х850х140 мм; 2000х900х140 мм.

24. Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, модель МП-24, в следующих размерах:

1200х600х120 мм; 1400х700х120 мм; 1700х800х120 мм; 1900х700х120 мм; 1900х800х120 мм; 1900х850х120 мм; 1900х900х120 мм; 1950х800х120 мм; 1950х850х120 мм; 1950х900х120 мм; 2000х800х120 мм; 2000х850х120 мм; 2000х900х120 мм; 1200х600х140 мм; 1400х700х140 мм; 1700х800х140 мм; 1900х700х140 мм; 1900х800х140 мм; 1900х850х140 мм; 1900х900х140 мм; 1950х800х140 мм; 1950х850х140 мм; 1950х900х140 мм; 2000х800х140 мм; 2000х850х140 мм; 2000х900х140 мм.

25. Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, модель МП-25, в следующих размерах:

1200х600х240 мм; 1400х700х240 мм; 1700х800х240 мм; 1900х700х240 мм; 1900х800х240 мм; 1900х850х240 мм; 1900х900х240 мм; 1950х800х240 мм; 1950х850х240 мм; 1950х900х240 мм; 2000х800х240 мм; 2000х850х240 мм; 2000х900х240 мм.

26. Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, модель МП-26, в следующих размерах:

1200х600х240 мм; 1400х700х240 мм; 1700х800х240 мм; 1900х700х240 мм; 1900х800х240 мм; 1900х850х240 мм; 1900х900х240 мм; 1950х800х240 мм; 1950х850х240 мм; 1950х900х240 мм; 2000х800х240 мм; 2000х850х240 мм; 2000х900х240 мм.

27. Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, модель МП-27, в следующих размерах:

750х450х20 мм; 1200х600х20 мм; 1400х700х20 мм; 1700х800х20 мм; 1900х700х20 мм; 1900х800х20 мм; 1900х850х20 мм; 1900х900х20 мм; 1950х800х20 мм; 1950х850х20 мм; 1950х900х20 мм; 2000х800х20 мм; 2000х850х20 мм; 2000х900х20 мм.

28. Матрац медицинский противопротезный ортопедический, модель МП-28, в следующих размерах:

450х400х70 мм; 750х450х70 мм; 1200х600х70 мм; 1400х700х70 мм; 1700х800х70 мм; 1900х700х70мм; 1900х800х70 мм; 1900х850х70 мм; 1900х900х70 мм; 1950х800х70 мм; 1950х850х70мм; 1950х900х70 мм; 2000х800х70 мм; 2000х850х70 мм; 2000х900х70 мм.

29. Матрац медицинский противопротезный ортопедический, модель МП-29, в следующих размерах:

1200х600х140 мм; 1400х700х140 мм; 1700х800х140 мм; 1900х700х140 мм; 1900х800х140 мм; 1900х850х140 мм; 1900х900х140 мм; 1950х800х140 мм; 1950х850х140 мм; 1950х900х140 мм; 2000х800х140 мм; 2000х850х140 мм; 2000х900х140 мм.

2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭсДжиМедикал»

(ООО «ЭсДжиМедикал»)

Адрес: Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70, эт. 5 пом. I ком. 27

Тел.: +7 499 641-12-91, +7 926 334-76-21

Email: sales@sgmedical.ru

Место производства: Россия, 153021, Ивановская область, г. Иваново, проезд Красных Зорь, 1а

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Матрац предназначен для восстановления кровообращения у лежащего человека, насыщения кислородом покрова кожи и заживления пораженных тканей, предназначенный для длительного лежания тяжело больных в условиях стационарных отделений больниц и клиник, а также по рекомендации врача в домашних условиях, обеспечивающий нормальную циркуляцию крови, распределение веса лежащего человека по большой поверхности, как правило, для уменьшения давления на точки пережатия для обеспечения комфорта и предотвращения возникновения пролежней, создающий удобную поверхность, на которой пациент может лежать и отдыхать/спать, способствующий равномерному распределению массы тела пациентов, в чехле из водонепроницаемого материала, использующегося в качестве физического барьера для защиты Матраца от загрязнения или жидкостей, предотвращения перекрестного заражения, в том числе и в чехле из ткани, обработанной антибактериальным веществом для контроля роста бактерий и грибов и сокращения количества клещей домашней пыли и их аллерген-содержащих экскрементов.

4. ПОКАЗАНИЯ

- Послеоперационный период;
- Послеинфарктное и постинсультное состояние;
- Длительный постельный режим, скелетное вытяжение, остеохондроз, спондилез, спондилолистез позвоночника, спондилопатии легкой степени, остеопороз;
- Различные травмы опорно-двигательного аппарата, неосложненные переломы тел, поперечных и остистых отростков позвонков;
- Период реабилитации после травм и операций на позвоночнике;
- Ожог и ожоговая болезнь;
- Для лиц, по роду занятий, связанных с нагрузкой на позвоночник и вибрациями (грузчики, водители, мотоциклисты, спортсмены);
- Профилактика осложнений и неврологических расстройств позвоночника.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Отсутствуют.

6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ортопедия, терапия.

7. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Данное медицинское изделие может быть использовано в условиях стационарных отделений больниц и клиник, а также по рекомендации врача в домашних условиях.

8. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Не выявлены.

9. ОБЩИЙ ВИД МАТРАЦЕВ







Общий вид исполнений матраца МП-2




Общий вид исполнений матраца МП-3

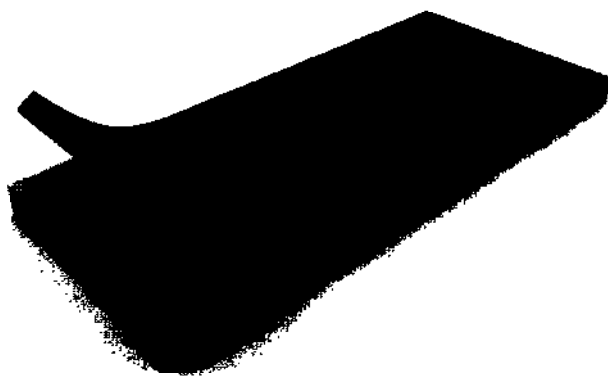

Общий вид исполнений матраца МП-4

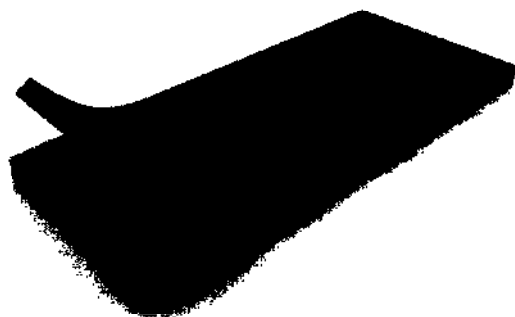


Общий вид исполнений матраца МП-5

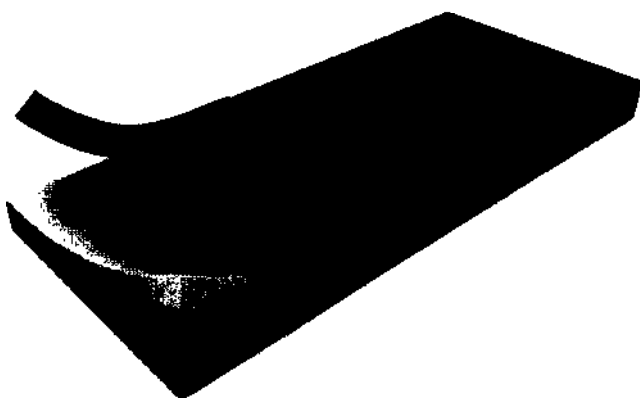


Общий вид исполнений матраца МП-6




Гелиевый лист в сотах

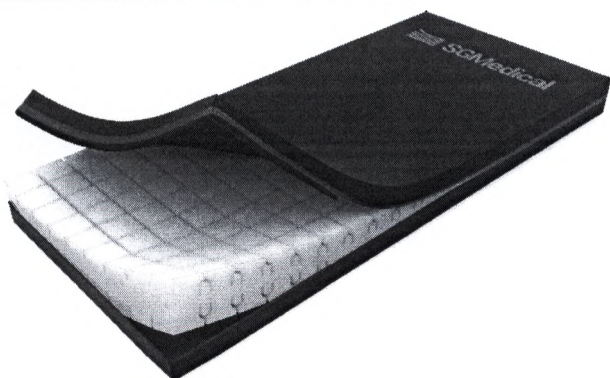


Общий вид исполнений матраца МП-7

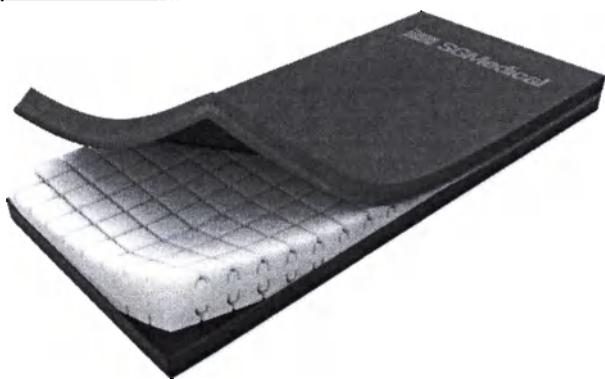


Общий вид исполнений матраца МП-8

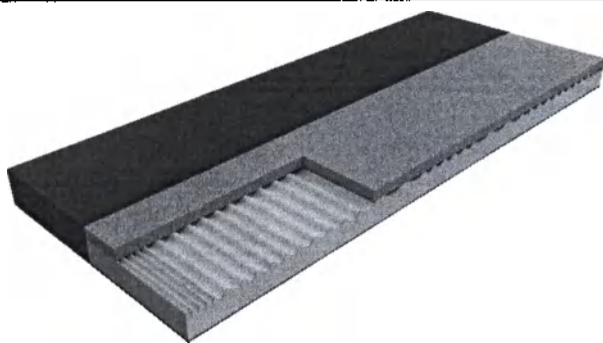


Общий вид исполнений матраца МП-9

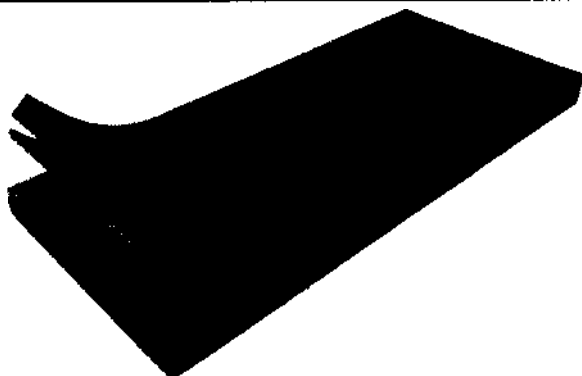


Общий вид исполнений матраца МП-10

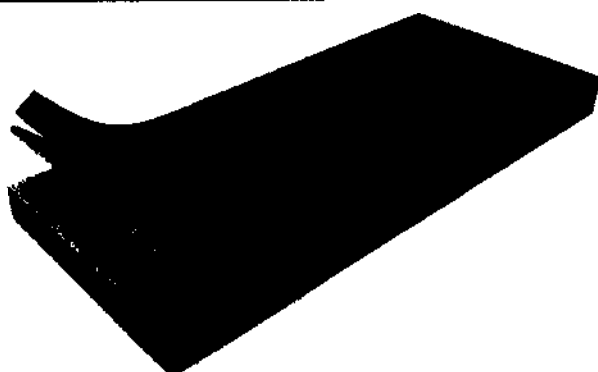

Общий вид исполнений матраца МП-11

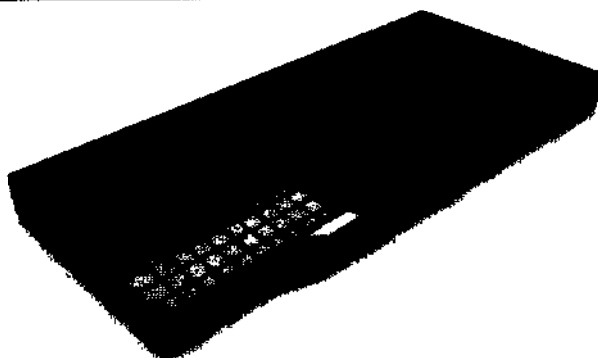


Общий вид исполнений матраца МП-12

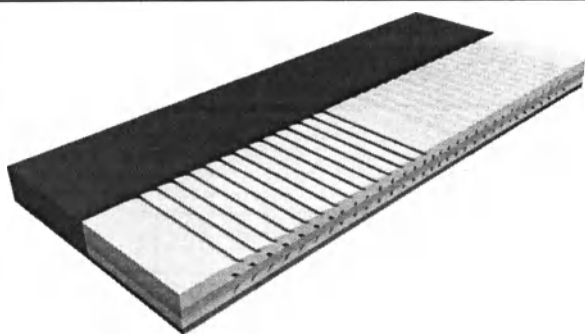


Общий вид исполнений матраца МП-13




Общий вид исполнений матраца МП-14

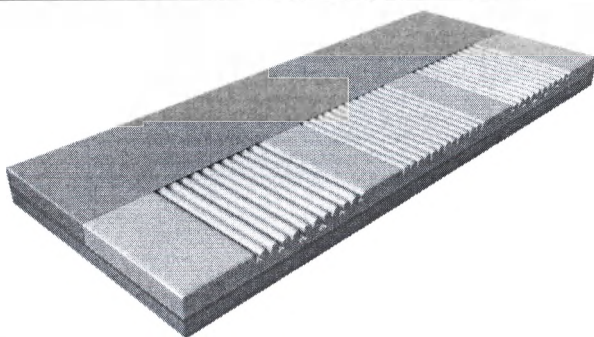


Общий вид исполнений матраца МП-15

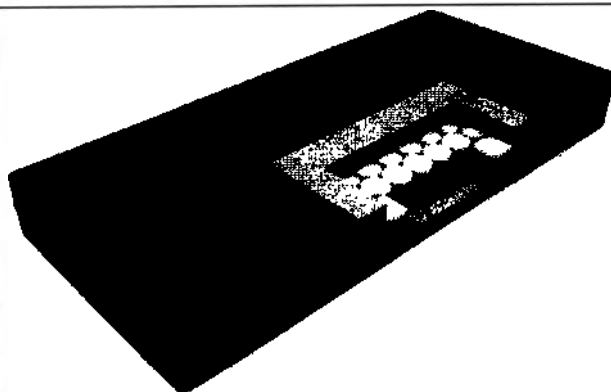


Общий вид исполнений матраца МП-16

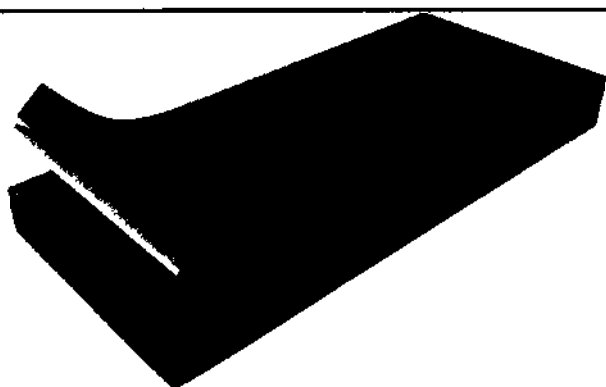


Общий вид исполнений матраца МП-17

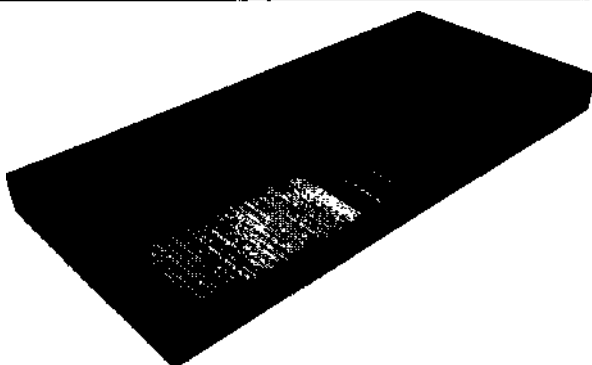


Общий вид исполнений матраца МП-18

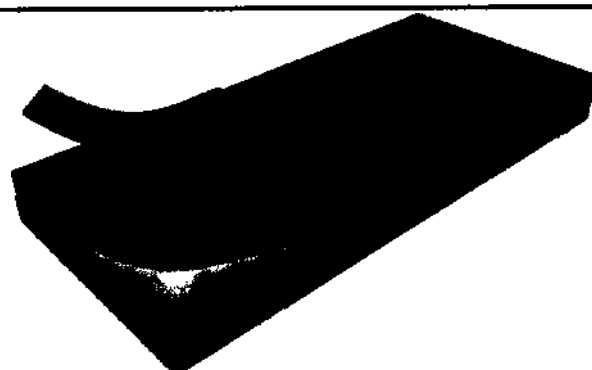


Общий вид исполнений матраца МП-19

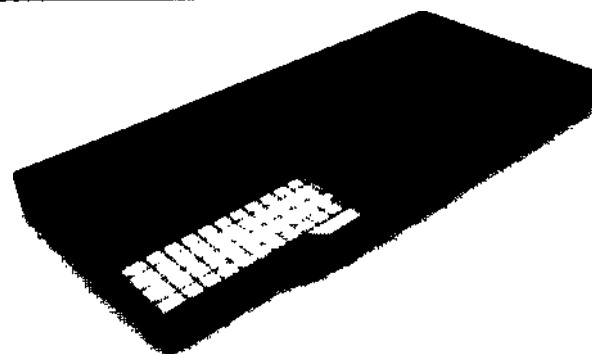


Общий вид исполнений матраца МП-20

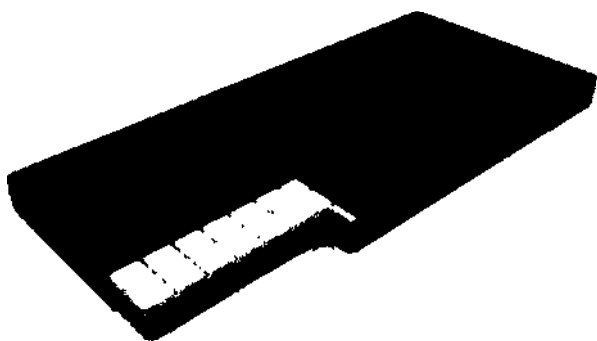


Общий вид исполнений матраца МП-21

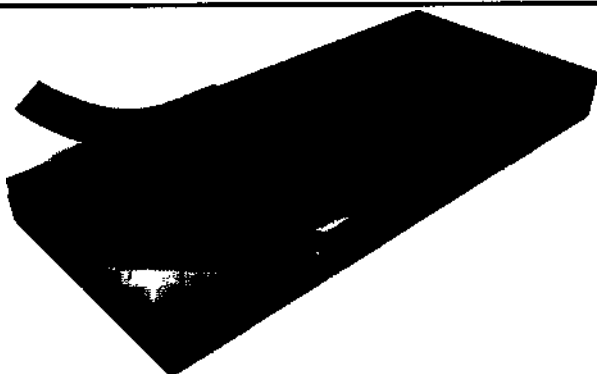


Общий вид исполнений матраца МП-22

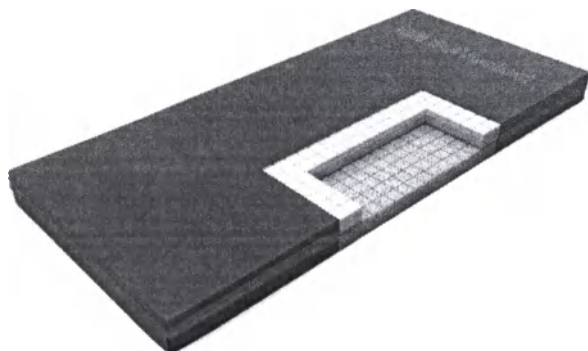


Общий вид исполнений матраца МП-23

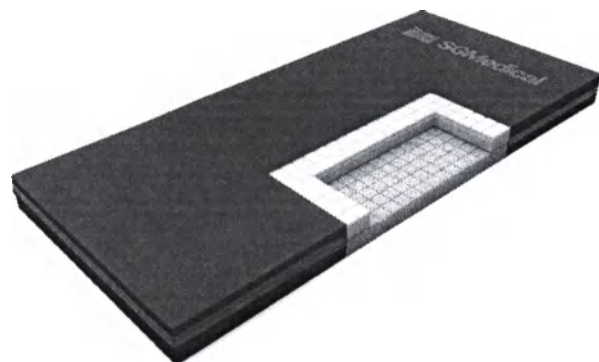


Общий вид исполнений матраца МП-24

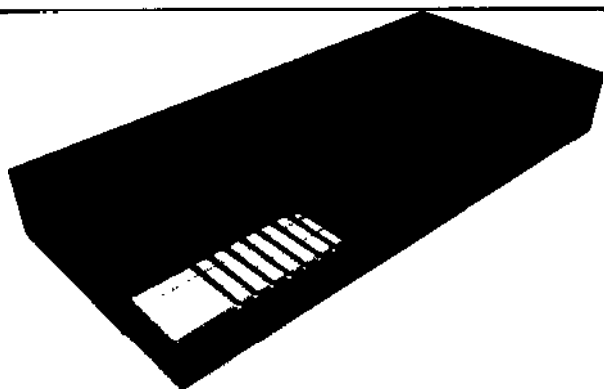


Общий вид исполнений матраца МП-25

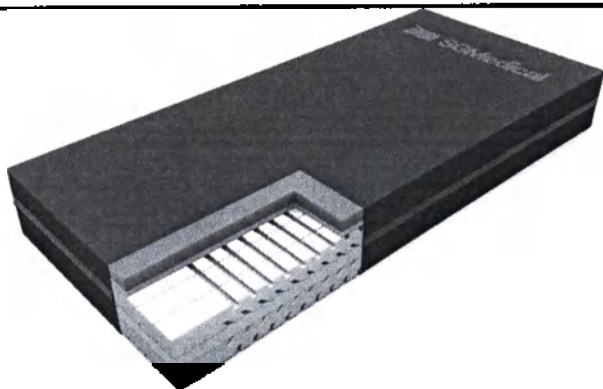


Общий вид исполнений матраца МП-26

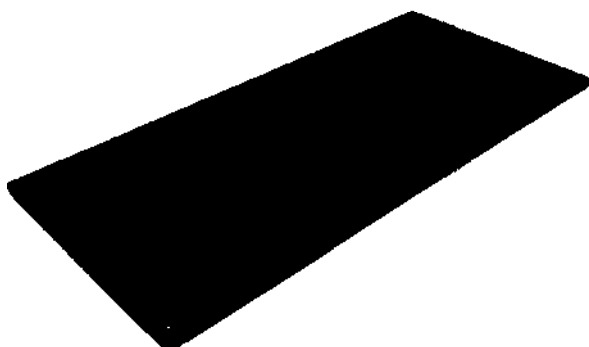

Общий вид исполнений матраца МП-27

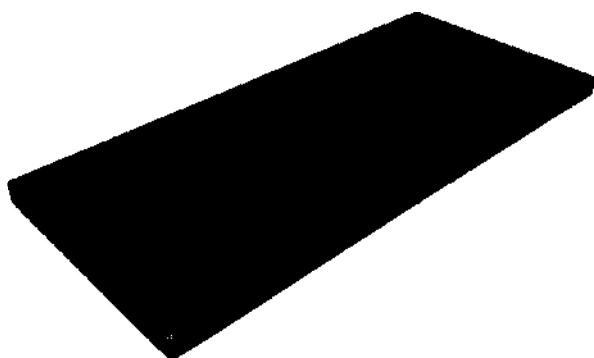


Общий вид исполнений матраца МП-28

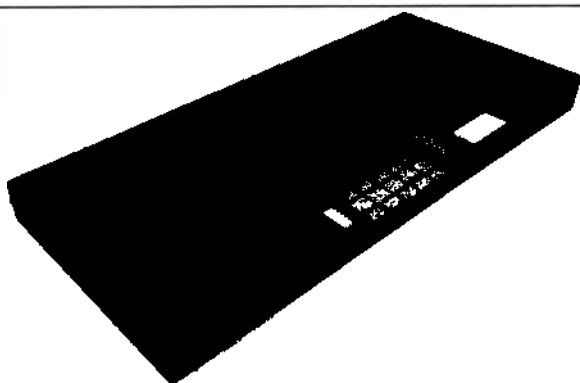


Общий вид исполнений матраца МП-29




Гелиевая решетка

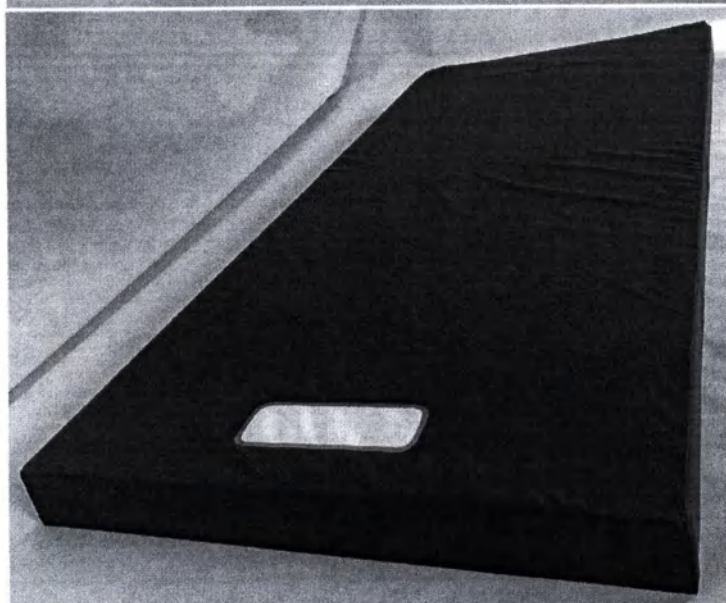

Фотографические
изображения матраца в
чехле

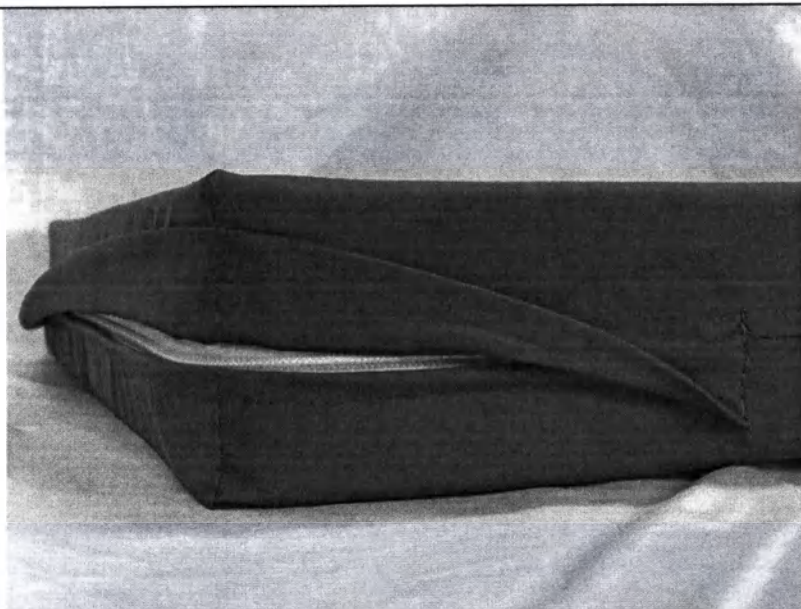

Фотографическое
изображение клапана
антикапельного,
закрывающего застежку-
молнию

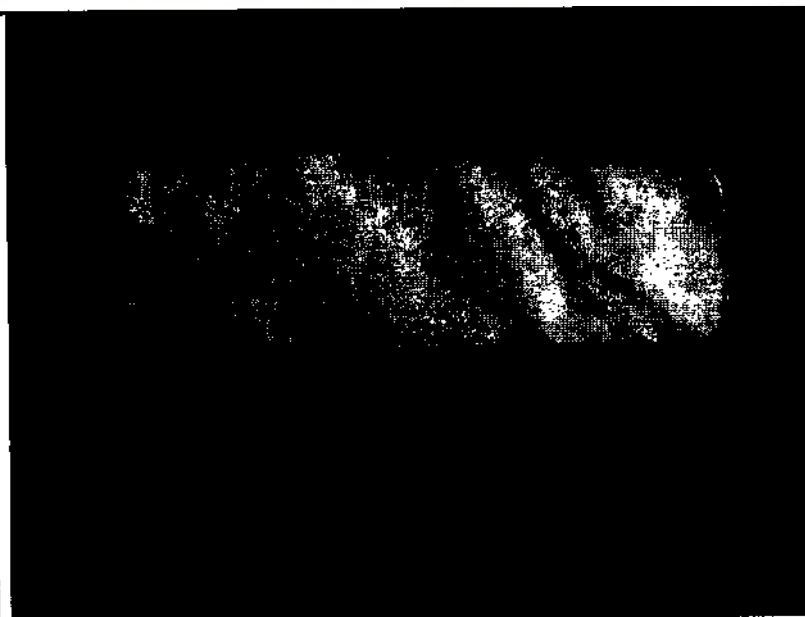

Фотографическое
изображение
антибактериального
воздушного клапана

10. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование и условное обозначение модели	Размеры (длина-шири- высота) в мм/ вес изделия в кг	Максимальная нагрузка (кг)	Наименование и технические характеристики наполнителя	Наименование ткани и технические характеристики чехла
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, Модель МП-1	1200x600x80 / 1,5	110	Беспружинный блок из пенополиуретана эластичного, плотностью не менее 22 кг/м3, высотой 80 мм, профилированный с одной из плоскостей продольно-поперечными штрихами, создающими поверхность в форме «шоколадной плитки»	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической ткани полотняного переплетения с полиуретановой мембраной (белая, серая, бежевая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, зеленая), расположенной на внутренней (изнаночной) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными краями (в том числе и герметизированными) и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном
	1400x700x80 / 2,0			
	1700x800x80 / 2,7			
	1900x700x80 / 2,7			
	1900x800x80 / 3,0			
	1900x850x80 / 3,2			
	1900x900x80 / 3,4			
	1950x800x80 / 3,1			
	1950x850x80 / 3,3			
	1950x900x80 / 3,5			
	2000x800x80 / 3,2			
	2000x850x80 / 3,4			
	2000x900x80 / 3,6			
	1200x600x100 / 1,5	120	Беспружинный блок из пенополиуретана эластичного, плотностью не менее 22 кг/м3, высотой 100 мм, профилированный с одной из плоскостей продольно-поперечными штрихами, создающими поверхность в форме «шоколадной плитки»	
	1400x700x100 / 2,0			
	1700x800x100 / 3,4			
	1900x700x100 / 3,3			
	1900x800x100 / 3,8			
	1900x850x100 / 4,0			
	1900x900x100 / 4,2			
	1950x800x100 / 3,9			
	1950x850x100 / 4,1			
	1950x900x100 / 4,4			
	2000x800x100 / 4,0	110	Беспружинный блок из пенополиуретана эластичного, плотностью не менее 22 кг/м3, высотой 80 мм, профилированный с одной из плоскостей	Комбинированный чехол: одна поверхность из двухслойной водонепроницаемой синтетической ткани полотняного переплетения с полиуретановой мембраной (белая, серая,
	2000x850x100 / 4,2			
	2000x900x100 / 4,5			
	1200x600x80 / 1,5			
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический	1400x700x80 / 2,0	110		
	1700x800x80 / 3,0			
	1900x700x80 / 3,0			
	1900x700x80 / 3,0			

Модель МП-2	1900x800x80 / 3,3	120	продольно-поперечными штрибами, создающими поверхность в форме «шоколадной плитки»	бежевая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, зеленая), расположенной на внутренней (изнаночной) поверхности чехла, вторая поверхность из синтетического трикотажа с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными краями (в том числе и герметизированными) и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном
	1900x850x80 / 3,5			
	1900x900x80 / 3,7			
	1950x800x80 / 3,4			
	1950x850x80 / 3,6			
	1950x900x80 / 3,8			
	2000x800x80 / 3,5			
	2000x800x80 / 3,7			
	2000x850x80 / 3,9			
	1200x600x100 / 1,5	120	Беспружинный блок из пенополиуретана эластичного, плотностью не менее 22 кг/м ³ , высотой 100 мм, профилированный с одной из плоскостей продольно-поперечными штрибами, создающими поверхность в форме «шоколадной плитки»	
	1400x700x100 / 2,0			
	1700x800x100 / 3,7			
	1900x700x100 / 3,6			
	1900x800x100 / 4,1			
	1900x850x100 / 4,3			
	1900x900x100 / 4,5			
	1950x800x100 / 4,2			
	1950x850x100 / 4,4			
	1950x900x100 / 4,7			
	2000x800x100 / 4,3			
	2000x850x100 / 4,5			
	2000x900x100 / 4,8			
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, Модель МП-3	1200x600x80 / 1,5	110	Беспружинный блок из пенополиуретана эластичного, плотностью не менее 22 кг/м ³ , высотой 80 мм, профилированный с одной из плоскостей продольно-поперечными штрибами, создающими поверхность в форме «шоколадной плитки»	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными или сварными герметичными краями и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном
	1400x700x80 / 2,0			
	1700x800x80 / 3,2			
	1900x700x80 / 3,2			
	1900x800x80 / 3,5			
	1900x850x80 / 3,7			
	1900x900x80 / 3,9			
	1950x800x80 / 3,6			
	1950x850x80 / 3,8			
	1950x900x80 / 4,0			
	2000x800x80 / 3,7			
	2000x800x80 / 3,9			

	2000x850x80 / 4,1			
	1700x800x100 / 3,9			
	1200x600x100 / 3,8			
	1400x700x100 / 3,8			
	1700x800x100 / 3,8			
	1900x800x100 / 4,3			
	1900x850x100 / 4,5			
	1900x900x100 / 4,7			
	1950x800x100 / 4,4			
	1950x850x100 / 4,6			
	1950x900x100 / 4,9			
	2000x800x100 / 4,5			
	2000x850x100 / 4,7			
	2000x900x100 / 5,0			
		120	Беспружинный блок из пенополиуретана эластичного, плотностью не менее 22 кг/м ³ , высотой 100 мм, профилированный с одной из плоскостей продольно-поперечными штробами, создающими поверхность в форме «шоколадной плитки»	
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический , Модель МП-4	1200x600x100 / 7,0			
	1400x700x100 / 9,6			
	1700x800x100 / 13,3			
	1900x700x100 / 12,9			
	1900x800x100 / 14,8			
	1900x850x100 / 15,7			
	1900x900x100 / 16,6			
	1950x800x100 / 15,2			
	1950x850x100 / 16,2			
	1950x900x100 / 17,1			
	2000x800x100 / 15,6			
	2000x850x100 / 16,6			
	2000x900x100 / 17,6			
		120	Беспружинный блок из цельнолитого вязкоэластичного пенополиуретана плотностью 50 кг/м ³ , высотой 80 мм, профилированный с одной из плоскостей продольно-поперечными насечками, создающими поверхность в форме «шоколадной плитки», к другой плоскости которого приклеен лист пенополиуретана эластичного плотностью 22 кг/м ³ и высотой 20 мм.	Комбинированный чехол: одна поверхность из двухслойной водонепроницаемой синтетической ткани полотняного переплетения с полиуретановой мембраной (белая, серая, бежевая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, зеленая), расположенной на внутренней (изнаночной) поверхности чехла, вторая поверхность из синтетического трикотажа с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными краями (в том числе и герметизированными) и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический , Модель МП-5	1200x600x100 / 7,2			
	1400x700x100 / 9,8			
	1700x800x100 / 13,7			
	1900x700x100 / 13,4			
	1900x800x100 / 15,3			
		120	Беспружинный блок из цельнолитого вязкоэластичного пенополиуретана плотностью 50 кг/м ³ , высотой 80 мм, профилированный с одной из плоскостей продольно-поперечными насечками, создающими поверхность в	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей)

	1900x850x100 / 16,2		форме «шоколадной плитки», к другой плоскости которого приклеен лист пенополиуретана эластичного плотностью 22 кг/м3 и высотой 20 мм.	поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными или сварными герметичными краями и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном
	1900x900x100 / 17,2			
	1950x800x100 / 15,7			
	1950x850x100 / 16,7			
	1950x900x100 / 17,7			
	2000x800x100 / 16,1			
	2000x850x100 / 17,1			
	2000x900x100 / 18,1			
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, Модель МП-6	1200x600x90 / 6,3	120	Беспружинный блок из цельнолитого вязкоэластичного пенополиуретана плотностью 50 кг/м3, высотой 70 мм, одной из рабочих плоскостей которого залиты гелевые охлаждающие листы в сотах высотой 5 мм, отступающие от каждого края матраца по длине и ширине на 50-100 мм, а поверх другой рабочей гладкой стороны этого листа наклеен вязкоэластичного пенополиуретана плотностью 55 кг/м3 высотой 20 мм.	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани или полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными или сварными герметичными краями и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном
	1400x700x90 / 8,9			
	1700x800x90 / 12,5			
	1900x700x90 / 12,2			
	1900x800x90 / 14,0			
	1900x850x90 / 14,8			
	1900x900x90 / 15,7			
	1950x800x90 / 14,4			
	1950x850x90 / 15,3			
	1950x900x90 / 16,2			
	2000x800x90 / 14,7			
	2000x850x90 / 15,6			
	2000x900x90 / 16,6			
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, Модель МП-7	1200x600x140 / 5,7	130	Беспружинный блок из листа высокоэластичного пенополиуретана HR-45, высотой 140 мм, большие плоскости которого профилированы поперечными насечками в форме латинской буквы «лямбда» и продольными насечками прямоугольной формы, которые образуют на поверхности листа усеченные пирамиды.	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической ткани плотного переплетения с полиуретановой мембраной (белая, серая, бежевая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, зеленая), расположенной на внутренней (изнаночной) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными краями (в том числе и герметизированными) и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном.
	1400x700x140 / 7,7			
	1700x800x140 / 10,8			
	1900x700x140 / 10,6			
	1900x800x140 / 12,1			
	1900x850x140 / 12,8			
	1900x900x140 / 13,6			
	1950x800x140 / 12,4			
	1950x850x140 / 13,2			
	1950x900x140 / 13,9			
	2000x800x140 / 12,7			
	2000x850x140 / 13,5			
	2000x900x140 / 14,2			

Матрац медицинский противопрележневый ортопедический Модель МП-8	1200x600x140 / 5,9	130	Беспружинный блок из листа высокоэластичного пенополиуретана HR-45, высотой 140 мм, большие плоскости которого профилированы поперечными насечками в форме латинской буквы «лямбда» и продольными насечками прямоугольной формы, которые образуют на поверхности листа усеченные пирамиды	Комбинированный чехол: одна поверхность из двухслойной водонепроницаемой синтетической ткани плотного переплетения с полиуретановой мембраной (белая, серая, бежевая бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, зеленая), расположенной на внутренней (изнаночной) поверхности чехла, вторая поверхность из синтетического трикотажа с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, зеленая), расположенной на внешней (рабочей) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными краями (в том числе и герметизированными) и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая
	1400x700x140 / 7,9			
	1700x800x140 / 11,0			
	1900x700x140 / 10,8			
	1900x800x140 / 12,3			
	1900x850x140 / 13,0			
	1900x900x140 / 13,9			
	1950x800x140 / 12,7			
	1950x850x140 / 13,5			
	1950x900x140 / 14,2			
	2000x800x140 / 13,0			
	2000x850x140 / 13,8			
	2000x900x140 / 14,5			
Матрац медицинский противопрележневый ортопедический Модель МП-9	1200x600x140 / 3,0	120	Беспружинный блок из комбинации следующих материалов: лист эластичного пенополиуретана плотностью 22 кг/м ³ , высотой 100 мм, одна из большие плоскости которого разделена на семь зон путем профилирования волнами разной ширины от 50 до 120 мм, поверх которых наклеен лист вязкоэластичного пенополиуретана с гелиевой составляющей плотностью 45 кг/м ³ высотой 40 мм.	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными или сварными герметичными краями и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном
	1400x700x140 / 3,9			
	1700x800x140 / 5,4			
	1900x700x140 / 5,3			
	1900x800x140 / 6,0			
	1900x850x140 / 6,5			
	1900x900x140 / 6,8			
	1950x800x140 / 6,2			
	1950x850x140 / 6,6			
	1950x900x140 / 7,0			
	2000x800x140 / 6,4			
	2000x850x140 / 6,8			
	2000x900x140 / 7,2			
Матрац медицинский противопрележневый ортопедический Модель МП-10	1200x600x140 / 5,9	130	Беспружинный блок из комбинации следующих материалов: лист пенополиуретана вторичного вспенивания плотностью 60 кг/м ³ высотой 100 мм, большие плоскости которого профилированы поперечными и продольными насечками создающими поверхность в форме «шоколадной плитки», к одной из плоскостей	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей), в форме прямоугольника, с тремя стачанными или сварными герметичными краями и одним
	1400x700x140 / 8,1			
	1700x800x140 / 11,2			
	1900x700x140 / 10,9			
	1900x800x140 / 12,6			
	1900x850x140 / 13,4			
	1900x900x140 / 14,1			

	1950x800x140 / 12,9		которого приклеен лист вязкоэластичного пенополиуретана с гелевой составляющей плотностью 45 кг/м3, высотой 20 мм, а к второй - лист пенополиуретана высокоэластичного HR-45 высотой 20 мм.	открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном
	1950x850x140 / 13,7			
	1950x900x140 / 14,5			
	2000x800x140 / 13,3			
	2000x850x140 / 14,1			
	2000x900x140 / 14,9			
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, Модель МП-11	1200x600x140 / 5,7	130	Беспружинный блок из комбинации следующих материалов: лист пенополиуретана вторичного вспенивания плотностью 60 кг/м3 высотой 100 мм, большие плоскости которого профилированы поперечными и продольными насечками создающими поверхность в форме «шоколадной плитки», к одной из плоскостей которого приклеен лист вязкоэластичного пенополиуретана с гелевой составляющей плотностью 45 кг/м3, высотой 20 мм, а к второй - лист пенополиуретана высокоэластичного HR-45 высотой 20 мм.	Комбинированный чехол: одна поверхность из двухслойной водонепроницаемой синтетической ткани полотняного переплетения с полиуретановой мембраной (белая, серая, бежевая бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, зеленая), расположенной на внутренней (изнаночной) поверхности чехла, вторая поверхность из синтетического трикотажа с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, зеленая), расположенной на внешней (рабочей), в форме прямоугольника, с тремя стачанными краями (в том числе и герметизированными) и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном.
	1400x700x140 / 7,9			
	1700x800x140 / 10,9			
	1900x700x140 / 10,7			
	1900x800x140 / 12,4			
	1900x850x140 / 13,2			
	1900x900x140 / 13,9			
	1950x800x140 / 12,7			
	1950x850x140 / 13,5			
	1950x900x140 / 14,3			
	2000x800x140 / 13,1			
	2000x850x140 / 13,9			
	2000x900x140 / 14,7			
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, Модель МП-12	1200x600x120 / 5,6	120	Беспружинный блок из комбинации следующих материалов: лист пенополиуретана вторичного вспенивания 60 кг/м3 высотой 80 мм, к одной стороне которого приклеен лист высокоэластичного пенополиуретана HR 45 высотой 40 мм, внешняя плоскость которого профилирована поперечными и продольными насечками, создающими поверхность в форме «шоколадной плитки»; по длинным сторонам блок окантован каркасом из пенополиуретана плотностью 25 кг/м3 шириной 50 мм.	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными или сварными герметичными краями и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном
	1400x700x120 / 7,4			
	1700x800x120 / 9,4			
	1900x700x120 / 10,0			
	1900x800x120 / 11,5			
	1900x850x120 / 12,2			
	1900x900x120 / 12,9			
	1950x800x120 / 11,8			
	1950x850x120 / 12,5			
	1950x900x120 / 13,3			
	2000x800x120 / 12,1			
	2000x850x120 / 12,9			
	2000x900x120 / 13,6			
	1200x600x140 / 6,1			

	1400x700x140 / 8,0	130	Беспружинный блок из комбинации следующих материалов: лист пенополиуретана вторичного вспенивания 60 кг/м ³ высотой 100 мм, к одной стороне которого приклеен лист высокоэластичного пенополиуретана HR 45 высотой 40 мм, внешняя плоскость которого профилирована поперечными и продольными насечками, создающими поверхность в форме «шоколадной плитки»; по длинным сторонам блок окантован каркасом из пенополиуретана плотностью 25 кг/м ³ , шириной 50 мм.	
	1700x800x140 / 10,2			
	1900x700x140 / 10,8			
	1900x800x140 / 12,4			
	1900x850x140 / 13,2			
	1900x900x140 / 13,9			
	1950x800x140 / 12,7			
	1950x850x140 / 13,5			
	1950x900x140 / 14,3			
	2000x800x140 / 13,0			
	2000x850x140 / 13,9			
	2000x900x140 / 14,7			
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, Модель МП-13	1200x600x180 / 4,4	130	Трехслойный беспружинный блок из комбинации следующих материалов: 2 листа высокоэластичного пенополиуретана HR-45 высотой 70 мм, большие плоскости которых профилированы продольными насечками под углом 90° и поперечными насечками под углом 45°, создающими поверхность в форме «ребер», между этими профилированными листами приклеен лист эластичного пенополиуретана плотностью 25 кг/м ³ высотой 40 мм.	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными или сварными герметичными краями и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном
	1400x700x180 / 6,0			
	1700x800x180 / 8,4			
	1900x700x180 / 8,9			
	1900x800x180 / 9,3			
	1900x850x180 / 9,9			
	1900x900x180 / 10,5			
	1950x800x180 / 9,6			
	1950x850x180 / 10,2			
	1950x900x180 / 10,8			
	2000x800x180 / 9,8			
	2000x850x180 / 10,5			
	2000x900x180 / 11,1			
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, Модель МП-14	1200x600x140 / 4,2	130	Трехслойный беспружинный блок из комбинации следующих склеенных материалов: лист пенополиуретана вторичного вспенивания плотностью 60 кг/м ³ высотой 60 мм, большие плоскости которого профилированы поперечными и продольными насечками создающими поверхность в форме «шоколадной плитки», поверх каждой из профилированных сторон приклеены 2 листа	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными или сварными герметичными краями и одним открытым краем (вход), в который
	1400x700x140 / 5,7			
	1700x800x140 / 8,0			
	1900x700x140 / 7,8			
	1900x800x140 / 8,9			
	1900x850x140 / 9,5			
	1900x900x140 / 10,0			
	1950x800x140 / 9,1			
	1950x850x140 / 9,7			

	1950x900x140 / 10,3		эластичного пенополиуретана плотностью 22 кг/м3 высотой 40 мм, внешняя плоскость каждого профилирована и имеет волнообразную форму.	вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном
	2000x800x140 / 9,4			
	2000x850x140 / 10,0			
	2000x900x140 / 10,6			
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический , Модель МП-15	1200x600x140 / 2,5	120	Беспружинный блок из листа эластичного пенополиуретана плотностью 22 кг/м3 высотой 140 мм, обе большие плоскости которого профилированы в поперечном направлении фигурными штробами, создающими на поверхности листа множество повторяющихся поперечных цилиндров диаметром 25 мм.	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными или сварными герметичными краями и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном
	1400x700x140 / 3,5			
	1700x800x140 / 4,8			
	1900x700x140 / 4,7			
	1900x800x140 / 5,4			
	1900x850x140 / 5,7			
	1900x900x140 / 6,0			
	1950x800x140 / 5,5			
	1950x850x140 / 5,9			
	1950x900x140 / 6,2			
	2000x800x140 / 5,7			
	2000x850x140 / 6,0			
	2000x900x140 / 6,4			
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический , Модель МП-16	1200x600x220 / 6,3	150	Многослойный блок из комбинации следующих склеенных материалов: блок независимых пружин из пенополиуретана высотой 100 мм, поверх которого наклеены: с одной стороны – лист пенополиуретана вторичного вспенивания плотностью 60 кг/м3 высотой 40 мм и лист пенополиуретана вязкоэластичного (в том числе и с гелевой составляющей) плотностью 50 кг/м3 высотой 20 мм, с другой стороны – лист пенополиуретана вторичного вспенивания плотностью 60 кг/м3 высотой 40 мм и лист высокоэластичного пенополиуретана HR-45 высотой 20 мм, торцы блока по периметру окантованы каркасом из пенополиуретана эластичного плотностью 25 кг/м3, шириной 50 мм.	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными или сварными герметичными краями и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном
	1400x700x220 / 8,5			
	1700x800x220 / 11,8			
	1900x700x220 / 11,6			
	1900x800x220 / 13,2			
	1900x850x220 / 14,0			
	1900x900x220 / 14,9			
	1950x800x220 / 13,7			
	1950x850x220 / 14,5			
	1950x900x220 / 15,3			
	2000x800x220 / 14,0			
	2000x850x220 / 14,8			
	2000x900x220 / 15,7			

Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, Модель МП-17	1200x600x140 / 7,4	250	Многослойный беспружинный блок из комбинации следующих склеенных материалов: лист пенополиуретана вторичного вспенивания 60 кг/м ³ высотой 60 мм, большие плоскости которого профилированы поперечными и продольными насечками создающими поверхность в форме «шоколадной плитки», поверх которых наклеены: с одной стороны – лист латексированной кокосовой койры высотой 20 мм и лист вязкоэластичного пенополиуретана 50 кг/м ³ (в том числе и с гелевой составляющей) высотой 20 мм, с другой – лист латекса высотой 20 мм и лист пенополиуретана высокоэластичного HR-45 высотой 20 мм.	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными или сварными герметичными краями и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном
	1400x700x140 / 9,2			
	1700x800x140 / 12,7			
	1900x700x140 / 12,5			
	1900x800x140 / 14,2			
	1900x850x140 / 15,1			
	1900x900x140 / 16,0			
	1950x800x140 / 14,6			
	1950x850x140 / 15,6			
	1950x900x140 / 16,5			
	2000x800x140 / 15,0			
	2000x850x140 / 16,0			
	2000x900x140 / 16,9			
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, Модель МП-18	1200x600x140 / 4,0	130	Многослойный беспружинный блок из комбинации следующих материалов: лист пенополиуретана вторичного вспенивания плотность 60 кг/м ³ высотой 60 мм, большие плоскости которого профилированы поперечными и продольными насечками создающими поверхность в форме «шоколадной плитки», поверх которых наклеены: с одной стороны лист эластичного пенополиуретана плотностью 22 кг/м ³ высотой 40 мм, внешняя плоскость которого профилирована и имеет волнообразную форму, с другой – лист вязкоэластичного пенополиуретана с гелевой составляющей плотностью 45 кг/м ³ высотой 40 мм.	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с четырьмя сварными герметичными краями, в одну из больших плоскостей которого герметично запаян воздушный водонепроницаемый клапан с инфекционным контролем «Sleep Angel» производства фирмы Pneuma Pure L.P. Limited, Paramount Court, Corrig Road Sandyford Dublin 18 (IE)
	1400x700x140 / 5,4			
	1700x800x140 / 7,5			
	1900x700x140 / 7,4			
	1900x800x140 / 8,4			
	1900x850x140 / 8,9			
	1900x900x140 / 9,5			
	1950x800x140 / 8,6			
	1950x850x140 / 9,2			
	1950x900x140 / 9,8			
	2000x800x140 / 8,9			
	2000x850x140 / 9,4			
	2000x900x140 / 10,0			
	1200x600x180 / 7,7	130		

Матрац медицинский противопролежневый ортопедический , Модель МП-19	1400x700x180 / 10,5		Беспружинный блок из листа высокоэластичного пенополиуретана HR-45, высотой 140 мм, большие плоскости которого профилированы поперечными насечками в форме латинской буквы «лямбда» и продольными насечками прямоугольной формы, которые образуют на поверхности листа усеченные пирамиды, поверх одной из больших плоскостей наклеен вязкоэластичного пенополиуретана плотностью 50 кг/м3 высотой 40 мм.	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными или сварными герметичными краями и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном
	1700x800x180 / 14,5			
	1900x700x180 / 14,2			
	1900x800x180 / 16,1			
	1900x850x180 / 17,1			
	1900x900x180 / 18,1			
	1950x800x180 / 16,6			
	1950x850x180 / 17,6			
	1950x900x180 / 18,6			
	2000x800x180 / 17,0			
	2000x850x180 / 18,0			
	2000x900x180 / 19,1			
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический , Модель МП-20	1200x600x140 / 5,9	130	Беспружинный блок из пенополиуретана вторичного вспенивания 60 кг/м3 высотой 80 мм, поверх которой наклеен лист высокоэластичного пенополиуретана HR-45 высотой 60 мм, внешняя плоскость которого профилирована поперечными и продольными насечками, создающими поверхность в форме «шоколадной плитки». По длинным сторонам блока окантован каркасом из пенополиуретана плотностью 25 кг/м3 шириной 50 мм	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с четырьмя сварными герметичными краями, одну из больших плоскостей которого герметично запаян воздушный водонепроницаемый клапан с инфракрасным контролем «Sleep Angel» производства фирмы Pneuma Pure L.P. Limited, Paramount Court, Corrig Road Sandyford Dublin 18 (IE)
	1400x700x140 / 8,0			
	1700x800x140 / 9,5			
	1900x700x140 / 10,8			
	1900x800x140 / 12,4			
	1900x850x140 / 13,2			
	1900x900x140 / 13,9			
	1950x800x140 / 12,7			
	1950x850x140 / 13,5			
	1950x900x140 / 14,3			
	2000x800x140 / 13,0			
	2000x850x140 / 13,9			
	2000x900x140 / 14,7			
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический , Модель МП-21	1200x600x120 / 5,6	130	Беспружинный блок, имеющий монолитную форму, состоящий из комбинации следующих материалов: лист пенополиуретана вторичного вспенивания 60 кг/м3 высотой 60 мм, габаритные размеры (длина и ширина) которого	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей)
	1400x700x120 / 7,7			
	1700x800x120 / 10,7			
	1900x700x120 / 10,4			
	1900x800x120 / 11,9			

	1900x850x120 / 12,6		на 50 мм меньше размера готовой продукции, полностью залитый в специальной форме вязкоэластичным пенополиуретаном плотностью 50 кг/м ³ , обе большие плоскости монолитного блока профилированы поперечными и продольными насечками создающими поверхность в форме «шоколадной плитки».	поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными или сварными герметичными краями и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном
	1900x900x120 / 13,4			
	1950x800x120 / 12,2			
	1950x850x120 / 13,0			
	1950x900x120 / 13,7			
	2000x800x120 / 12,5			
	2000x850x120 / 13,3			
	2000x900x120 / 14,1			
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический , Модель МП-22	1200x600x170 / 5,8	150	Многослойный беспружинный блок из комбинации следующих материалов: лист высокоэластичного пенополиуретана HR-45 высотой 80 мм, внешняя плоскость которого профилирована поперечными и продольными насечками создающими поверхность в форме «шоколадной плитки» поверх которого наклеены: с одной стороны - лист из пенополиуретана эластичного плотностью 25 кг/м ³ высотой 80 мм, с другой стороны – лист высокоэластичного пенополиуретана HR-45 высотой 40 мм. По длинным сторонам блок окантован каркасом из пенополиуретана плотностью 25 кг/м ³ шириной 50 мм.	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными или сварными герметичными краями и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном
	1400x700x170 / 8,0			
	1700x800x170 / 11,1			
	1900x700x170 / 10,8			
	1900x800x170 / 11,7			
	1900x850x170 / 13,2			
	1900x900x170 / 14,0			
	1950x800x170 / 12,7			
	1950x850x170 / 13,5			
	1950x900x170 / 14,3			
	2000x800x170 / 13,0			
	2000x850x170 / 13,9			
	2000x900x170 / 14,7			
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический , Модель МП-23	1200x600x120 / 6,2	120	Беспружинный блок из комбинации следующих материалов: лист пенополиуретана вторичного вспенивания 60 кг/м ³ высотой 80 мм, наружная плоскость которого профилирована поперечными насечками вдоль всей плоскости листа, а вторая (внутренняя) - продольными и поперечными насечками, создающими поверхность в форме «шоколадной плитки», к которой приклеен лист высокоэластичного	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической ткани полотняного переплетения с полиуретановой мембраной (белая, серая, бежевая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, зеленая), расположенной на внутренней (изнаночной) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными краями (в том числе и герметизированными) и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном
	1400x700x120 / 7,0			
	1700x800x120 / 9,8			
	1900x700x120 / 9,6			
	1900x800x120 / 10,9			
	1900x850x120 / 11,6			
	1900x900x120 / 12,3			
	1950x800x120 / 11,2			

	1950x850x120 / 11,9		пенополиуретана HR 55 высотой 40 мм, внешняя плоскость которого в свою очередь профилирована поперечными и продольными насечками создающими поверхность в форме «шоколадной плитки».		
	1950x900x120 / 12,6				
	2000x800x120 / 11,5				
	2000x850x120 / 12,7				
	2000x900x120 / 13,0				
	1200x600x140 / 6,0	130	Беспружинный блок из комбинации следующих материалов: лист пенополиуретана вторичного вспенивания 60 кг/м3 высотой 100 мм, наружная плоскость которого профилирована поперечными насечками вдоль всей плоскости листа, а вторая внутренняя - продольными и поперечными насечками, создающими поверхность в форме «шоколадной плитки», к которой приклеен лист высокоэластичного пенополиуретана HR 45 высотой 40 мм, внешняя плоскость которого в свою очередь профилирована поперечными и продольными насечками создающими поверхность в форме «шоколадной плитки».		
	1400x700x140 / 8,2				
	1700x800x140 / 11,4				
	1900x700x140 / 11,2				
	1900x800x140 / 12,8				
	1900x850x140 / 13,6				
	1900x900x140 / 14,4				
	1950x800x140 / 13,1				
	1950x850x140 / 13,9				
	1950x900x140 / 14,7				
	2000x800x140 / 13,4				
	2000x850x140 / 14,3				
	2000x900x140 / 15,2				
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический, Модель МП-24	1200x600x120 / 6,6	120	Беспружинный блок из комбинации следующих материалов: лист пенополиуретана вторичного вспенивания 60 кг/м3 высотой 80 мм, наружная плоскость которого профилирована поперечными насечками вдоль всей плоскости листа, а вторая внутренняя - продольными и поперечными насечками, создающими поверхность в форме «шоколадной плитки», к которой приклеен лист высокоэластичного пенополиуретана HR 45 высотой 40 мм, внешняя плоскость которого в свою очередь профилирована поперечными и продольными насечками создающими	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными или сварными герметичными краями и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном	
	1400x700x120 / 7,4				
	1700x800x120 / 10,2				
	1900x700x120 / 10,0				
	1900x800x120 / 11,3				
	1900x850x120 / 12,0				
	1900x900x120 / 12,7				
	1950x800x120 / 11,6				
	1950x850x120 / 12,3				
	1950x900x120 / 13,0				
	2000x800x120 / 11,9				

	2000x850x120 / 13,1		поверхность в форме «шоколадной плитки».	
	2000x900x120 / 13,4			
	1200x600x140 / 6,4	130	Беспружинный блок из комбинации следующих материалов: лист пенополиуретана вторичного вспенивания 60 кг/м3 высотой 100 мм, наружная плоскость которого профилирована поперечными насечками вдоль всей плоскости листа, а вторая внутренняя - продольными и поперечными насечками, создающими поверхность в форме «шоколадной плитки», к которой приклеен лист высокоэластичного пенополиуретана HR 55 высотой 40 мм, внешняя плоскость которого в свою очередь профилирована поперечными и продольными насечками создающими поверхность в форме «шоколадной плитки».	
	1400x700x140 / 8,6			
	1700x800x140 / 11,8			
	1900x700x140 / 11,6			
	1900x800x140 / 13,2			
	1900x850x140 / 14,0			
	1900x900x140 / 14,8			
	1950x800x140 / 13,5			
	1950x850x140 / 14,4			
	1950x900x140 / 15,1			
	2000x800x140 / 13,8			
	2000x850x140 / 14,7			
	2000x900x140 / 15,6			
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический Модель МП-25	1200x600x240 / 6,5	150	Трехслойный беспружинный блок из комбинации следующих материалов: 2 листа высокоэластичного пенополиуретана HR-45 высотой 70 мм, большие плоскости которых профилированы продольными насечками под углом 90° и поперечными насечками под углом 45°, создающими поверхность в форме «ребер», между этими профилированными листами приклеен лист эластичного пенополиуретана плотностью 25 кг/м3 высотой 40 мм, в одной из ребристых сторон блока последовательно приклеены лист вязкоэластичного пенополиуретана плотностью 50 кг/м3 высотой 40 мм и лист вязкоэластичного пенополиуретана с добавлением геля плотностью 45 кг/м3 высотой 20 мм.	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с четырьмя сварными герметичными краями, в одну из больших плоскостей которого герметично запаян воздушный водонепроницаемый клапан с инфракрасным контролем «Sleep Angel» производства фирмы Pneuma Pure I.P. Limited, Paramount Court, Corrig Road Sandyford Dublin 18 (IE)
	1400x700x240 / 8,8			
	1700x800x240 / 12,2			
	1900x700x240 / 12,0			
	1900x800x240 / 13,7			
	1900x850x240 / 14,5			
	1900x900x240 / 15,4			
	1950x800x240 / 14,0			
	1950x850x240 / 14,9			
	1950x900x240 / 15,8			
	2000x800x240 / 14,4			
	2000x850x240 / 15,3			
	2000x900x240 / 16,2			
	1200x600x240 / 6,5	150		

Матрац медицинский противопролежневый ортопедический Модель МП-26	1400x700x240 / 8,8		Трехслойный беспружинный блок из комбинации следующих материалов: 2 листа высокоэластичного пенополиуретана HR-45 высотой 70 мм, большие плоскости которых профилированы продольными насечками под углом 90° и поперечными насечками под углом 45°, создающими поверхность в форме «ребер», между этими профилированными листами проклеен лист эластичного пенополиуретана плотностью 25 кг/м ³ высотой 40 мм, а к одной из ребристых сторон блока последовательно приклеены лист вязкоэластичного пенополиуретана плотностью 50 кг/м ³ высотой 40 мм и лист вязкоэластичного пенополиуретана с добавлением геля плотностью 45 кг/м ³ высотой 20 мм.	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными или сварными герметичными краями и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном.
	1700x800x240 / 12,2			
	1900x700x240 / 12,0			
	1900x800x240 / 13,7			
	1900x850x240 / 14,5			
	1900x900x240 / 15,4			
	1950x800x240 / 14,0			
	1950x850x240 / 14,9			
	1950x900x240 / 15,8			
	2000x800x240 / 14,4			
	2000x850x240 / 15,3			
	2000x900x240 / 16,2			
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический Модель МП-27	750x450x20 / 1,2	130	Двухслойный беспружинный блок из комбинации следующих материалов: лист пенополиуретана эластичного плотностью 25 кг/м ³ высотой 15 мм, поверх которого наклеены листы геля в сотах высотой 5 мм.	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с четырьмя стачанными или сварными герметичными краями.
	1200x600x20 / 2,5			
	1400x700x20 / 3,5			
	1700x800x20 / 4,8			
	1900x700x20 / 4,7			
	1900x800x20 / 5,4			
	1900x850x20 / 5,7			
	1900x900x20 / 6,0			
	1950x800x20 / 5,6			
	1950x850x20 / 5,9			
	1950x900x20 / 6,3			
	2000x800x20 / 5,7			
	2000x850x20 / 6,0			
	2000x900x20 / 6,4			
	450x400x70 / 1,2			

Матрац медицинский противопролежневый ортопедический Модель МП-28	750x450x70 / 2,0	120	Беспружинный блок из комбинации следующих материалов: лист пенополиуретана эластичного плотностью 25 кг/м3 высотой 45 мм, поверх которого последовательно наклеены листы вязкоэластичного пенополиуретана плотностью 50 кг/м3 высотой 20 мм и листы геля в сотах высотой 5 мм.	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с четырьмя стачанными или сварными герметичными краями.
	1200x600x70 / 4,2			
	1400x700x70 / 5,8			
	1700x800x70 / 8,0			
	1900x700x70 / 7,9			
	1900x800x70 / 9,0			
	1900x850x70 / 9,5			
	1900x900x70 / 10,1			
	1950x800x70 / 9,2			
	1950x850x70 / 9,8			
	1950x900x70 / 10,4			
	2000x800x70 / 9,5			
	2000x850x70 / 10,0			
	2000x900x70 / 10,7			
Матрац медицинский противопролежневый ортопедический Модель МП-29	1200x600x140 / 9,2	150	Беспружинный блок из комбинации следующих материалов: лист пенополиуретана вторичного вспенивания 60 кг/м3 высотой 80 мм, одна из больших плоскостей которого профилирована поперечными и продольными насечками создающими поверхность в форме «шоколадной плитки», поверх которой приклеен лист высокоэластичного пенополиуретана HR 45 высотой 30 мм, поверх которого, в свою очередь, приклеены листы гелевой решетки высотой 30 мм, общая длина и ширина которой на 100 мм отступает от каждого края основного блока. По длинным и коротким торцевым сторонам гелевая решетка окантована каркасом из пенополиуретана эластичного плотностью 25 кг/м3 высотой 30 мм, шириной 100 мм.	Чехол из двухслойной водонепроницаемой синтетической трикотажной ткани с полиуретановой или поливинилхлоридной мембраной (белая, серая, бежевая, бордовая, оранжевая, желтая, голубая, синяя, зеленая), расположенной на внешней (рабочей) поверхности чехла, в форме прямоугольника, с тремя стачанными или сварными герметичными краями и одним открытым краем (вход), в который вшита застежка-молния, закрытая антикапельным клапаном
	1400x700x140 / 12,5			
	1700x800x140 / 17,4			
	1900x700x140 / 17,0			
	1900x800x140 / 19,5			
	1900x850x140 / 20,7			
	1900x900x140 / 21,9			
	1950x800x140 / 20,0			
	1950x850x140 / 21,2			
	1950x900x140 / 22,5			
	2000x800x140 / 20,5			
	2000x850x140 / 21,8			
	2000x900x140 / 23,1			

Допустимые предельные отклонения размеров матраца: по длине и ширине ± 10 мм, по высоте ± 15 мм.

Массогабаритные параметры чехлов

Вид ткани	Длина*, мм	Ширина**, мм	Высота***, мм	Диапазон веса, кг
Чехол матрацев из синтетической ткани с полиуретановой мембраной Рабочая сторона - тканевая Модели МП-1, МП-7, МП-23	1200	600	от 80 до 140	от 0,22 до 0,24
	1400	700	от 80 до 140	от 0,3 до 0,33
	1700	800	от 80 до 140	от 0,4 до 0,42
	1900	от 700 до 900	от 80 до 140	от 0,43 до 0,48
	1950	от 800 до 900	от 80 до 140	от 0,45 до 0,52
	2000	800 до 900	от 80 до 140	от 0,46 до 0,53
Чехол матрацев из синтетического трикотажа с полиуретановой мембраной Рабочая сторона – полиуретановая мембрана Модели МП-3, МП-5, МП-6, МП-9, МП-10, МП-12, МП-13, МП-14, МП-15, МП-16, МП-17, МП-18, МП-19, МП-20, МП-21, МП-22, МП-24, МП-25, МП-26, МП-27, МП-28, МП-29	1200	600	от 20 до 80	от 0,37 до 0,4
	1400	700	от 20 до 80	от 0,46 до 0,49
	1700	800	от 20 до 80	от 0,64 до 0,7
	1900	от 700 до 900	от 20 до 80	от 0,68 до 0,8
	1950	от 800 до 900	от 20 до 80	от 0,75 до 0,86
	2000	от 800 до 900	от 20 до 80	от 0,77 до 0,88
	1200	600	от 100 до 140	от 0,44 до 0,47
	1400	700	от 100 до 140	от 0,54 до 0,58
	1700	800	от 100 до 140	от 0,72 до 0,76
	1900	от 700 до 900	от 100 до 140	от 0,75 до 0,86
	1950	от 800 до 900	от 100 до 140	от 0,82 до 0,94
	2000	от 800 до 900	от 100 до 140	от 0,84 до 0,97
	1200	600	от 180 до 240	от 0,49 до 0,54
	1400	700	от 180 до 240	от 0,6 до 0,66
	1700	800	от 180 до 240	от 0,8 до 0,86
	1900	от 700 до 900	от 180 до 240	от 0,84 до 0,97
	1950	от 800 до 900	от 180 до 240	от 0,92 до 1,05
	2000	от 800 до 900	от 180 до 240	от 0,94 до 1,08
Чехол матрацев из синтетического трикотажа с поливинилхлоридной мембраной Рабочая сторона – поливинилхлоридная мембрана Модели МП-3, МП-5, МП-6, МП-9, МП-10, МП-12, МП-13, МП-14, МП-15, МП-16, МП-17, МП-18, МП-19, МП-20, МП-21, МП-22, МП-24, МП-25, МП-26, МП-27, МП-28, МП-29	1200	600	от 20 до 80	от 0,59 до 0,64
	1400	700	от 20 до 80	от 0,74 до 0,78
	1700	800	от 20 до 80	от 1,02 до 1,12
	1900	от 700 до 900	от 20 до 80	от 1,09 до 1,28
	1950	от 800 до 900	от 20 до 80	от 1,2 до 1,38
	2000	от 800 до 900	от 20 до 80	от 1,23 до 1,41
	1200	600	от 100 до 140	от 0,7 до 0,75
	1400	700	от 100 до 140	от 0,86 до 0,93
	1700	800	от 100 до 140	от 1,15 до 1,22
	1900	от 700 до 900	от 100 до 140	от 1,2 до 1,38
	1950	от 800 до 900	от 100 до 140	от 1,31 до 1,5
	2000	от 800 до 900	от 100 до 140	от 1,34 до 1,55
	1200	600	от 180 до 240	от 0,78 до 0,86
	1400	700	от 180 до 240	от 0,96 до 1,06
	1700	800	от 180 до 240	от 1,28 до 1,38

Вид ткани	Длина*, мм	Ширина**, мм	Высота***, мм	Диапазон веса, кг
	1900	от 700 до 900	от 180 до 240	от 1,34 до 1,55
	1950	от 800 до 900	от 180 до 240	от 1,47 до 1,68
	2000	от 800 до 900	от 180 до 240	от 1,5 до 1,73
Чехол комбинированный: Синтетическая ткань с полиуретановой мембраной/синтетический трикотаж с полиуретановой мембраной Рабочие стороны: первая сторона - тканевая, вторая сторона – полиуретановая мембрана. Модели МП- 2, МП-4, МП-8, МП-11	1200	600	от 80 до 140	от 0,31 до 0,35
	1400	700	от 80 до 140	от 0,39 до 0,45
	1700	800	от 80 до 140	от 0,55 до 0,59
	1900	от 700 до 900	от 80 до 140	от 0,62 до 0,67
	1950	от 800 до 900	от 80 до 140	от 0,66 до 0,73
	2000	от 800 до 900	от 80 до 140	от 0,67 до 0,75
Чехол комбинированный: Синтетическая ткань с полиуретановой мембраной/синтетический трикотаж с поливинилхлоридной мембраной Рабочие стороны: первая сторона - тканевая, вторая сторона – поливинилхлоридная мембрана. Модели МП- 2, МП-4, МП-8, МП-11	1200	600	от 80 до 140	от 0,43 до 0,5
	1400	700	от 80 до 140	от 0,54 до 0,63
	1700	800	от 80 до 140	от 0,75 до 0,86
	1900	от 700 до 900	от 80 до 140	от 0,86 до 0,93
	1950	от 800 до 900	от 80 до 140	от 0,92 до 1,01
	2000	от 800 до 900	от 80 до 140	от 0,94 до 1,05

* допустимое отклонение составляет ± 10 мм

** допустимое отклонение составляет ± 10 мм

*** допустимое отклонение составляет ± 15 мм

Описание и размеры антикапельного клапана, закрывающего застежку-молнию

Описание

Антикапельный клапан, закрывающий застежку-молнию, расположен в торцевой части матраца и изготавливается из того же материала, что и чехол матраца. Этот клапан, является конструктивной особенностью пошива данного чехла. Он имеет «П»-образную форму и закрывает молнию по всей ее ширине.

При производстве чехла с антикапельным клапаном, верхняя «петля» изготавливается в 2 раза длиннее нижней «петли», напозая на нее сверху, и тем самым закрывает собой вшитую в чехол молнию, защищая ее от проникновения влаги и загрязнений либо через сомкнутые пластиковые спирали, либо замок молнии. Раскрой чехла с антикапельным клапаном выполнен цельнокроено. Ширина клапана в готовом виде 25 ± 2 мм, длина клапана зависит от ширины матраца и составляет, соответственно: 900 ± 5 мм для матраца шириной 600 мм, 1000 ± 5 мм для матраца шириной 700 мм, 1100 ± 5 мм для матраца шириной 800 мм, 1050 ± 5 мм для матраца шириной 850 мм, 1200 ± 5 мм для матраца шириной 900 мм. При пошиве чехла с антикапельным клапаном закладывают углы под высоту матраца с учётом ширины клапана, по лицевой стороне концы антикапельного клапана фиксируют застежками перпендикулярно линии втачивания молнии.

Фрагмент матраца с антикапельным клапаном показан на рисунке 1.

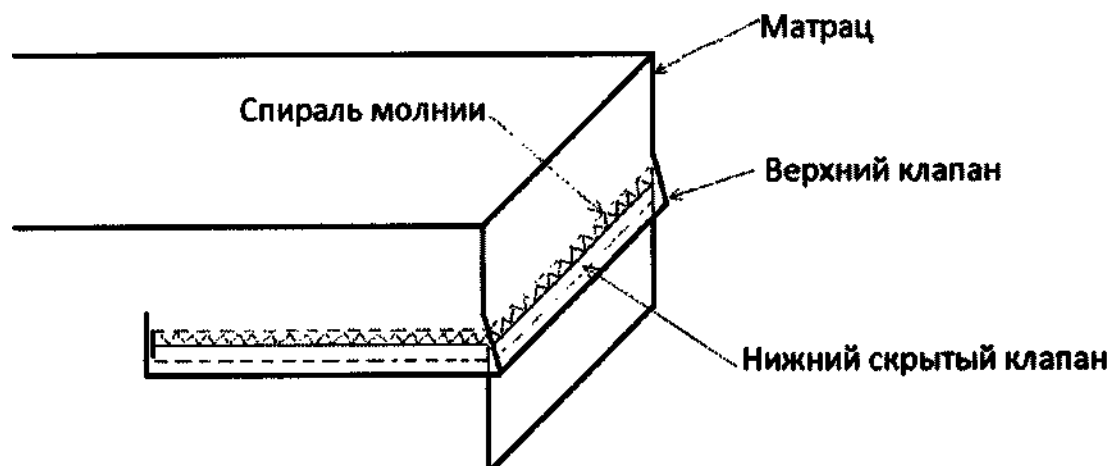


Рисунок 1. Антикапельный клапан матраца.

Описание, состав, расположение и параметры клапана воздушного

Описание

Антибактериальный воздушный клапан чехла представляет собой комбинацию 3-х скрепленных друг с другом термическим способом материалов, имеющих прямоугольную форму. Клапан герметично впаян в соответствующий размеру клапана, вырез на одной из широких плоскостей чехла матраца. Т.к. модели матрацев с данным клапаном выполняются со сварными герметичными швами, т.е. матрац полностью запаян, то, чтобы избежать разрыва этих швов при оказании механического воздействия на изделие (резкое сжатие матраца при помещении на него тела пациента) нужен клапан, через который будет выходить воздух из сжимаемого матраца.

Учитывая специфику эксплуатации матрацев, данный клапан должен служить барьером для проникновения внутрь матраца жидкостей, взвешенных в воздухе пыли, грязи и влаги, в которых могут содержаться болезнетворные бактерии и вирусы, которые могут через клапан проникнуть внутрь матраца, когда через него будет всасываться воздух для нормализации атмосферного давления после снятия механической нагрузки на матрац.

Клапан состоит из 3-х материалов:

1 слой – представляет собой плотное нетканное синтетическое полотно, являющееся армирующим слоем, придающим клапану форму и защищающим медицинскую мембрану от повреждения снаружи.

2 слой – медицинская мембрана, которая не пропускает бактерии и вирусы.

Принцип работы мембраны основан на гидрофобной микропористой структуре.

3 слой – полиуретановая прокладка, которая усиливает армирующие свойства клапана, защищает мембрану от повреждения изнутри, увеличивает период эксплуатации клапана.

Расположение воздушного клапана:

Антибактериальный воздушный клапан расположен по центральной оси одной из больших плоскостей матраца на расстоянии 100 мм (± 10 мм) от узкого края. Он имеет форму прямоугольника со скругленными краями.

Размеры воздушного клапана

Длина клапана 270 мм (± 5 мм)

Ширина 95 мм (± 5 мм)

Схема устройства клапана

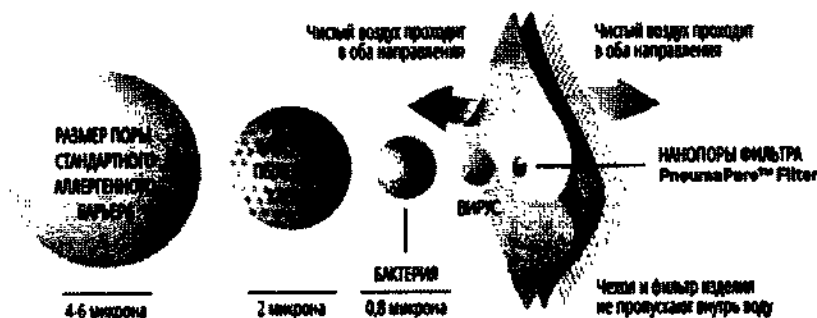


Рисунок 2. Устройство антибактериального клапана

Схема расположения клапана

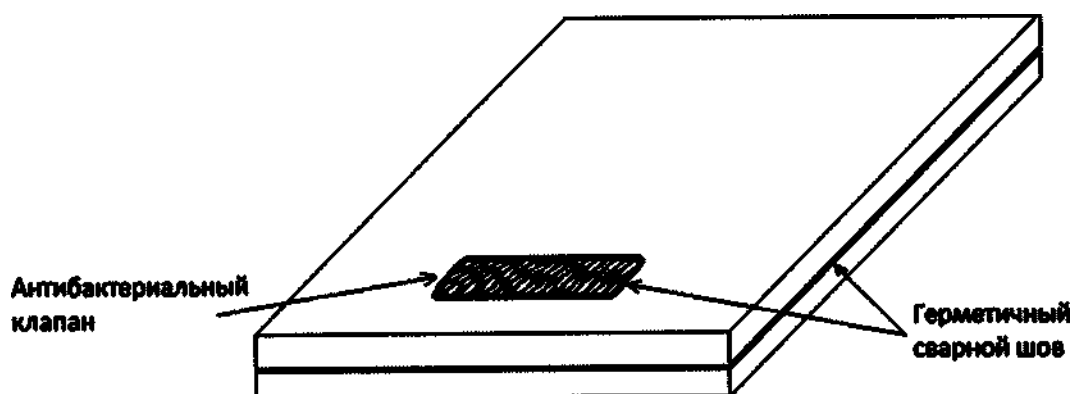


Рисунок 3. Расположение антибактериального воздушного клапана

Допускаемые дефекты не должны превышать величин, указанных в таблице:

Наименование дефекта	Размеры дефектов	Допускаемое количество дефектов
Производственно-швейные дефекты пошива:		
- отклонение строчки от края стачиваемых полотнищ	Не более 0,3 см	По всему периметру
- вертикальное застрачивание углов	Не более 0,5 см	1-2
Дефекты внешнего вида материала:		
- местные утолщения нити основы или утка более 2-х кратной толщин	До 5	2
- масляные пятна	Не более ø 0,5 см	5

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Для изготовления чехла матраца, включая антикапельный клапан, используются следующие материалы:

Кожзаменитель ПВХ марки «Волжанка вид 4-ТР «Эвита» (ТУ 8710002-00300340-03), пр-ва ЗАОр НП «Завод Искож», г. Йошкар-Ола. Состав материала указан в Таблице 3.

Таблица 3

Компонент	Марка	Производитель
Полиэфирное полотно	218A (CAS № 24938-37-2)	ОАО «СветлогорскХимволокно» (Беларусь)
Поливинилхлорид	Slovinil (CAS № 9002-86-2)	Fortischem a.s. (Словакия)
Краситель, в возможных вариантах: - белый; - серый; - бежевый; - бордовый; - оранжевый; - желтый; - голубой; - синий; - зеленый	(CAS № 117-81-7, 13463-67-7); (CAS № 117-81-7, 13463-67-7, 7782-42-5); (CAS № 117-81-7, 13463-67-7, 64696-98-6); (CAS № 1309-37-1); (CAS № 51274-00-1); (CAS № 12286-66-7); (CAS № 147-14-8); (CAS № 110157-96-5); (CAS № 1328-53-6)	ООО «НОВЫЙ ДОМ» (Россия)

Основные технические характеристики:

- основа -синтетический трикотаж (100% полиэстер).....62%;
- мембрана -поливинилхлорид (100%)38%;
- плотность.....352 г/м²;
- разрывная нагрузка полоски ткани размером 50х200 мм, не менее:
 - в продольном направлении.....400 Н;
 - в поперечном.....300 Н;
- стойкость покрытия к истиранию, не менее.....1500 циклов;
- устойчивость к многократным изгибам, не менее.....100 килоциклов.

Синтетическая ткань с полиуретановой мембраной марки Changshu, производства фирмы «SUZHOU CMT IMPORT & EXPORT CO. LTD» (Китай). Состав материала указан в Таблице 4.

Таблица 4

Компонент	Марка	Производитель
Полиэфирное полотно (70%)	Changshu (CAS № 24938-37-2)	CHANGSHU ZHANYUE WEAVING CO., LTD, КИТАЙ
Полиуретан (30%)	Chuanghong (CAS № 9009-54-5)	Shijiazhuang Chuanghong Technology Co., Ltd., Китай
Краситель, в возможных вариантах: - белый; - серый; - бежевый; - бордовый; - оранжевый; - желтый; - голубой; - синий; - фиолетовый; - зеленый	Yabang TECHCRON Rubine D-MD 250 (CAS № 13463-67-7); Yabang TECHCRON Rubine D-MD 250 (CAS № 13463-67-7, 1326-82-5); Yabang TECHCRON Rubine D-MD 250 (CAS № 13463-67-7, 12237-41-1); Yabang TECHCRON Rubine D-MD 250 (CAS № 2786-76-7); Yabang TECHCRON Orang D-MD 200 (CAS № 79300-11-1); Yabang TECHCRON Yellow E-RP (CAS № 12223-85-7); Yabang TECHCRON T/Q Blue S-GL (CAS № 12217-79-7); Yabang TECHCRON Blue E-RPD (CAS № 12217-79-7); Yabang TECHCRON Violet SP- 2R (CAS № 6798-03-4); Yabang TECHCRON Green C-6B/G-9 (CAS № 569-64-2)	JIANGSU YABANG DYESTUFF CO., LTD (Китай)

Основные технические характеристики:

- плотность не менее..... 90 г/м²;
- толщина нитей FDI
 - по основе 150 den
 - по утку 200 den
- количество нитей на кв.дюйм
 - по основе..... 35
 - по утку 19
- разрывная нагрузка полоски ткани размером 50x200 мм, не менее:
 - по основе.....390 (29,7) Н (кгс);
 - по утку.....240 (18,3) Н (кгс);
- изменение линейных размеров после мокрой обработки, не более:
 - по основе..... 3%;
 - по утку..... 2%.
- стойкость к истиранию (не менее), циклы 8000

Синтетический трикотаж с полиуретановой мембраной марки «FLORA BI-ELASTIC», производства фирмы "PLASTIBERT NV" (Бельгия). Состав материала указан в Таблице 5.

Таблица 5

Компонент	Марка	Производитель
Полиуретан (42%)	Марка PU7621 (CAS № 9009-54-5)	Ursa-Chemie GmbH (Германия)
Полиэфирное полотно (58%)	Марка PE1129 (CAS № 24938-37-2)	"PLASTIBERT NV" (Бельгия)
Покрывание		
хлорид серебра	(CAS № 7783-90-6)	SANITIZED AG (Швейцария)
Краситель, в возможных вариантах: - белый; - серый; - бежевый; - бордовый; - оранжевый; - желтый; - голубой; - синий; - фиолетовый; - зеленый	(CAS № 13463-67-7); (CAS № 13463-67-7, 7782-42-5); (CAS № 13463-67-7, 64696-98-6); (CAS № 1309-37-1); (CAS № 51274-00-1); (CAS № 12286-66-7); (CAS № 147-14-8); (CAS № 57455-37-5); (CAS № 6358-30-1); (CAS № 1305-38-9)	Clariant Benelux S.A. (Бельгия)

Основные технические характеристики:

- плотность не менее145 г/м²;
- разрывная нагрузка полоски ткани размером 50х200 мм, не менее:
по основе450 Н;
по утку320 Н;
- устойчивость к многократным изгибам, не менее150 килоциклов;
- антибактериальная - по стандартам NF G 39-011 и Oeko-Tex Standard 100 (class 1) ;
- пожаробезопасная - по британскому стандарту BS 7175;
- водонепроницаемая - не менее 3000 мм водного столба;
- паропроницаемая - 840 г/м² за 24 часа.

Нитки швейные марки 44ЛХ для пошива изделий из тканых и нетканых материалов по ГОСТ 6309 – 93, производства ОАО «Прядильно-ниточный комбинат» им. С.М. Кирова, Россия, г. Санкт-Петербург.

Состав:

- лавсановый сердечник67% (полиэфир 100%)
- хлопковая оплетка33% (хлопок 100%)

Технические характеристики:

- направление окончательной круткиправое
- линейная плотность, текс/ кол-во сложений45/2 слож.
- разрывная нагрузка1,82 кгс
- удлинение18 %
- намотка5000 м
- индекс токсичности (It)90,4 %
- содержание свободного формальдегида, не более20 мкг/г
- влажность3 %

Термические свойства ниток ЛХ:

- температура плавления.....260 °C
- температура нижней плиты утюга.....200 °C
- линейная усадка в кипящей воде, при температуре 100°C.....2 %

Химические свойства ниток ЛХ:

- устойчивы к кислоте, щелочи, органическим растворителям, отбелике, микроорганизмам и плесени, химической и мокрой стирке.

Рулонная застежка-молния для швейных изделий, спиральная, тканая марки SBS, производства Fujian SBS Zipper Science & Technology Co., Ltd., Китай, (ГОСТ 28496). Состав застежки-молнии указан в Таблице 6.

Таблица 6

Компонент	Марка	Производитель
Тканевая основа молнии - полиэфир	Марка U0197UG (CAS №24938-37-2)	Fujian SBS Zipper Science & Technology Co., Ltd. (Китай)
Спираль молнии - полиамид (нейлон)	Марка XC99182 (CAS №25038-74-8)	Fujian SBS Zipper Science & Technology Co., Ltd. (Китай)
Замок молнии - алюминий	Марка WE76 (CAS №7429-90-5)	Fujian SBS Zipper Science & Technology Co., Ltd. (Китай)

Клапан воздушный водонепроницаемый с инфекционным контролем (антибактериальный), торговой марки «Sleep Angel» производства фирмы Pneuma Pure I.P. Limited, Paramount Court, Corrig Road Sandyford Dublin 18 (IE). Состав указан в Таблице 7.

Таблица 7

Компонент	Марка	Производитель
Медицинская мембрана	MMT-302	W.L.Gore&Assciates,Inc. (USA)
Полипропиленовая мембрана, полученная фильерным способом - полипропилен 100%	Adstif HA740J (CAS № 9003-07-0)	Basell Polyolefins (Нидерланды)
Полиуретановая прокладка - полиуретан 100%	Baumedix (CAS № 9009-54-5)	Covestro (Германия)

Для изготовления наполнителя матраца должны использоваться следующие материалы:

Пенополиуретан эластичный марки ST (ТУ 2254-001-53938077-2009), производства ООО «Рошальская индустриальная фирма «Аметист», Россия, 140730, Московская обл., г. Рошаль, ул. 2-й Пятилетки.

Кажущаяся плотность - от 18 до 39 кг/м³ по ГОСТ 409.

Условная прочность, кПа (ГОСТ 29088) - не менее 35.

Напряжение при сжатии 40% (жесткость), кПа (ГОСТ 26605) - от 1,5 до 4.

Относительная остаточная деформация при сжатии, % (ГОСТ 18268) – от 12 до 9.

Относительное удлинение при разрыве, % (ГОСТ 15873) – от 140 до 120.

Эластичность по отскоку, % - от 20 до 30.

Пенополиуретан высокоэластичный марки HR (ТУ 2254-001-53938077-2009), производства ООО «Рошальская индустриальная фирма «Аметист», Россия, 140730, Московская обл., г. Рошаль, ул. 2-й Пятилетки.

Кажущаяся плотность от 45 кг/м³ по ГОСТ 409.

Условная прочность, кПа (ГОСТ 29088) - не менее 90.

Напряжение при сжатии 40% (жесткость), кПа (ГОСТ 26605) - от 5,5.

Относительная остаточная деформация при сжатии, % (ГОСТ 18268) – 7.

Относительное удлинение при разрыве, % (ГОСТ 15873) – 80.

Эластичность по отскоку, % - 40.

Пенополиуретан вторичного вспенивания марки «ППУ R 60» (смесь крошки пенополиуретана эластичного и клеящей композиции из полиола и полиизоната). ТУ 2254-002-32962373-2015, производства ООО «Органика-Кузнецк», Россия, Пензенская обл, г. Кузнецк ул. Сухановская 1.

Кажущаяся плотность от 60 до 100 кг/м³ по ГОСТ 409.

Твердость, Н - не менее 170.

Условная прочность, кПа (ГОСТ 29088) - не менее 40.

Напряжение при сжатии 40% (жесткость), кПа (ГОСТ 26605) - 4,3.

Относительная остаточная деформация при сжатии, % (ГОСТ 18268) - 15.

Относительное удлинение при разрыве, % (ГОСТ 15873) - не менее 55.

Пенополиуретан вязкоэластичный и пенополиуретан вязкоэластичный с гелем марки LR 5014 и LR 4509 PG (ТУ 2254-001-53938077-2009), производства ООО «Рошальская индустриальная фирма «Аметист», Россия, 140730, Московская обл., г. Рошаль, ул. 2-й Пятилетки

Кажущаяся плотность кг/м³ (ГОСТ 409) - соответственно 50 и 45.

Условная прочность, кПа (ГОСТ 29088) - не менее 80.

Напряжение при сжатии 40% (жесткость), кПа (ГОСТ 26605) - 1,5.

Относительная остаточная деформация при сжатии, % (ГОСТ 18268) - 7.

Относительное удлинение при разрыве, % (ГОСТ 15873) - не менее 90.

Эластичность по отскоку, % - не менее 35.

Латекс листовой марки «Латекс мебельный 119/59/2/65» (ТУ 2514-001-49938568-2010), производства ООО Компания «Нафта-Хим», Россия, 141602, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 47.

Размер листа – 1800-2000 мм

Плотность – 65 кг/м³

Состав:

- латекс искусственный (газонаполненная масса на основе полиола и полиизоната) - 80%;
- латекс натуральный, представляющий собой водную дисперсию полимеров, состоящую из 34 – 37% каучука, 52 – 60% воды, а также небольшого количества белков, сахара, смол и минеральных веществ - 20%.

Латексированная кокосовая койра марки «Мат кокосовый латексированный» (ТУ 2514-001-72116406-2009), представляющая собой очищенное волокно кокосового ореха, без посторонних примесей, длиной от 150 мм, пропитанное искусственным латексом и подверженное термообработке в печи при температуре 140-150 °С, в листах, производства ООО Компания «Нафта-Хим», Россия, 141602, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 47.

Размер листа – 1800-2000 мм

Плотность – 100 кг/м³

Состав:

- кокосовое волокно - 50%
- латекс искусственный - 50%

Вспененный формованный вязкоэластичный пенополиуретан ФППУ марки ППУ-60 (ТУ 2514-001-34887629-2014) - смесь полиолов и изоцианатов, производства ООО «Эллада», Россия, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2.

Размер листа – 200х900х70, 2000х900х80.

Кажущаяся плотность (ГОСТ 409), кг/м³ - 50 кг/м³.

Условная прочность, кПа (ГОСТ 29088) - не менее 90.

Напряжение при сжатии 40% (жесткость), кПа (ГОСТ 26605) - 1,4.

Относительная остаточная деформация при сжатии, % (ГОСТ 18268) - 3.

Относительное удлинение при разрыве, % (ГОСТ 15873) - не менее 160.

Эластичность поотскоку, % - не менее 40.

Условная прочность при разрыве, кПа - 80.

Гель в сотах литевой полиуретановый охлаждающий листовой производства Shijiazhuang Chuanghong Technology Co., Ltd., Китай.

Полиуретан марки Chuanghong – 100%.

Размер листа - 350х400х5 мм.

Вес одного листа – 0,5 кг.

Цвет – синий.

Охлаждающее действие - 1,5-2°C от контактной зоны (путем поглощения тепла тела).

Гелиевая решетка литьевая в листах из термопластичного силикона (TPR gel), с термопластичными и эластомерными свойствами, способная под нагрузкой растягиваться до умеренных удлинений, а при снятии напряжения, возвращаться к своей первоначальной форме, производства Huizhou Housefar Technology Co., Ltd., Китай.

Состав - Силиконовая резина марки Lianhuan Shenzhen Lianhuan Silicone Rubber Co, Китай (100%).

Размер листа – 400-440х30 мм.

Вес одного листа -1, 2 кг.

Цвет – синий.

Клей марки АОС-ТАП РО-Н – смесь из каучука СБС, смолы реактивной и растворителей, производства ООО «АОС-Клей», Россия, 140105, Московская область, г. Раменское, ул. Фабричная, д. 21.

Цвет: красный, прозрачный.

Вязкость: 280-360 мПа*с.

Плотность: 0,82 г/см³.

Сухой остаток: 54% ± 2%.

Нанесение: распыление, кисть.

Расход: от 120-160 грамм на 1 кв.метр.

Время сушки: 5-7 минут.

Время склеивания: 0,4 – 1 минута.

Окончательное склеивание: 12 часов.

12. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- матрас в водонепроницаемом чехле (наволочке тюфячной);
- руководство по эксплуатации
- товарный ярлык

13. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Распаковать матрас в водонепроницаемом чехле (наволочке тюфячной)
2. Разместить матрас на спальном месте.
3. Поверх матраса постелить простыню или специальную впитывающую простынку.

14. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие, согласно ГОСТ 50444, пригодно к эксплуатации при температуре окружающей среды от +40° до - 25° С и номинальной относительной влажности воздуха от 70% (при +15°С) до 100% (при +25° С).

После транспортирования в условиях отрицательных температур матрацы должны быть выдержаны в распакованном виде в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 не менее 24 ч.

15. УКАЗАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ

Очистку наружной поверхности следует осуществлять мягкой салфеткой или щеткой, смоченной в нейтральных мыльных растворах по МУ-287-113.

Не допускается применение абразивных материалов.

Допустимость химической чистки или стирки чехлов матрацев по ГОСТ 25652 оформляют символами согласно ГОСТ Р ИСО 3758. Перед началом химической чистки или стирки ознакомьтесь с изображениями на ярлыке изделия, чтобы правильно выбрать температурный режим.

16. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать матрацы следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортирования должны соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150 с учётом следующих требований: температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -50° до +40°С.

Готовые изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя, в помещениях по условиям 2 ГОСТ 15150 (температура окружающей среды в диапазоне от -50° до +40°С). не более 2-х лет.

Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку изделий производить в соответствии с ГОСТ 12.3.009 и действующими правилами для данного вида транспортных средств.

17. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы матраца до списания не менее 5 лет.

18. МАРКИРОВКА

Маркировка матраца осуществляется на ярлыке (этикетке) из коробочного картона по ГОСТ 7933, этикеточной бумаги по ГОСТ 7625. Допускается изготавливать ярлык из межлекальных хлопчатобумажных тканей белого цвета.

Товарный ярлык вложен в упаковку.

Маркировка содержит:

- наименование изделия по эксплуатационному и функциональному назначению;
- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- адрес предприятия-изготовителя;
- наименование / вариант исполнения;
- порядковый номер матраца по системе завода-изготовителя;
- наименование применяемых материалов матраца;
- символы по уходу в соответствии с ГОСТ 16958;
- номер настоящих технических условий;
- дата изготовления;
- гарантийный срок;
- символ «Не стерильно»;
- символ «Температурный диапазон хранения»;
- символ «Беречь от влаги»;
- знак добровольной сертификации.
- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Допускается нанесение других сведений, в том числе информационного и рекламного характера.

Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака:  «Беречь от влаги».

19. УПАКОВКА

Упаковка соответствует требованиям ГОСТ Р 50444.

Каждый матрац, этикетка и руководство по эксплуатации уложены в отдельные пакеты из пленки полиэтиленовой марки НС, толщиной не менее 0,15 мм по ГОСТ 10354. Пакеты заварены.

Общая масса тары определяется и указывается на транспортной маркировке.

При отгрузке матрасов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности упаковка производится с учетом ГОСТ 15846.

В случае крупных поставок матрасы упаковываются в коробки из картона по ГОСТ 12301, в которую вложен упаковочный лист по ГОСТ Р 50444 с указанием:

- 1) наименование предприятия – изготовителя;
- 2) наименование изделия;
- 3) условный номер упаковщика и контролера;
- 4) дата упаковки.

Допускается изменение упаковки, не ухудшающей устойчивость к механическим и климатическим воздействиям при транспортировании и хранении.

20. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При изготовлении, испытаниях, хранении, транспортировании, эксплуатации матрас нетоксичен, не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

Изготовление изделий проводится с соблюдением общих требований безопасности согласно ГОСТ 12.0.230, ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.005.

Производственные помещения оборудованы общей и местной приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и СНиП 41-01-2003.

Рабочие снабжены средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011.

При производстве матрасов образующиеся отходы складываются в сборные контейнеры и утилизируются в установленном порядке.

Загрязнение окружающей среды отходами производства не допускается.

21. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию матраса следует проводить как отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21 с обязательной предварительной очисткой. Матрасы по результатам эксплуатации, признанные не соответствующими техническим условиям, подлежат утилизации и уничтожению специализированными предприятиями по сбору и переработке вторичного сырья.

22. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие матрасов требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации матраца – 12 месяцев со дня продажи.

За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке или в результате неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.

Приложение А

Общество с ограниченной ответственностью «ЭсДжиМедикал»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон)

Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70, эт. 5 пом. I ком. 27

+7 499 120-10-67

+7 926 334-76-21

sales@sgmedical.ru

Гарантийный талон № _____

Матрац медицинский противопролежневый ортопедический,

модель _____

(год, месяц, число выпуска)

Гарантируется исправность изделия в течение

12 месяцев

(месяцев, дней, часов и т.д.),

(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

(подпись)

М.П.

ООО «ЭсДжиМедикал»
Пронумеровано 48
Прошнуровано 48
Дата 17.09.21 подпись Иванова Т.Ю.

