

Инструкция по использованию

Бандаж грыжевой паховый с пружиной односторонний БН1-01

Наименование изделия

Бандаж одевается, предварительно вправив грыжу, лежа на спине с приподнятым тазом, т.к. в этом положении грыжа легко вправляется. Пояс подводится под крестец, на грыжевое отверстие накладывается пелот бандажа, затем к пелоту прикрепляют штрипкой пояс и подбедренник. Перед сном бандаж снимают. При грыжах, склонных к ущемлению, по совету врача, бандажи на ночь не снимают.

Инструкция по уходу за изделием: не допускать контакта с растворителями, щелочами, красящими веществами, растворами кислот. По мере загрязнения рекомендуется бережная обработка бандажа мыльным раствором. Сушить вдали от нагревательных приборов.

Директор



В.И. Трофимов