

ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Корсеты на поясничный отдел позвоночника

КРО-14, КРО-14.2, КРО-14.3, КРО-14.5

ТУ 9396-013-03151403-2009

1 НАЗНАЧЕНИЕ КОРСЕТОВ

Корсеты на поясничный отдел позвоночника КРО-14, КРО-14.2, КРО-14.3, КРО-14.5, далее корсеты, предназначены для частичной фиксации позвоночника при травмах и заболеваниях поясничного отдела позвоночника.

Корсеты являются изделием индивидуального и массового изготовления, могут использоваться в лечебных учреждениях, а также для реабилитации на дому в условиях повседневной жизни.

2 ОПИСАНИЕ КОРСЕТОВ

Корсеты на поясничный отдел позвоночника КРО-14, КРО-14.2, КРО-14.3 изготавливаются из хлопчатобумажной ткани на подкладке с фиксирующими застежками.

Фиксация корсета на поясничный отдел позвоночника КРО-14.3 на теле пользователя осуществляется шнуровкой через блочки, расположенной посередине передней и задней деталей, корсета на поясничный отдел позвоночника КРО-14 только посередине передней детали.

Шнуровка с внутренней стороны корсетов закрыта клапаном из ткани хлопчатобумажной.

Блочки под шнуровку хорошо обжаты, без заусенцев и выпячивания ткани.

Корсет на поясничный отдел позвоночника КРО-14.2 две передние и задняя детали изготовлены из ткани хлопчатобумажной, боковые детали из ленты эластичной.

Корсет на поясничный отдел позвоночника КРО-14.5 изготовлен из сетки эластичной с застежкой текстильной «Контакт».

Для дополнительной фиксации в корсете на поясничный отдел позвоночника КРО-14.5 к середине задней детали под ленту корсетную пришит пояс-подхват из ленты эластичной бандажной с застежкой текстильной «Контакт».

Корсеты усилены металлическими планшетами, расположенными вертикально между основным материалом и планками из лент корсетных, нашитых с наружной стороны изделия.

Верхний и нижний края корсетов обработаны лентой эластичной отделочной.

Швы стачивания с изнаночной стороны обработаны настрочными планками из основной ткани.

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД ЗА КОРСЕТАМИ

Конструкция корсетов обеспечивает удобство пользования, надевания и снятия.

Корсет должен плотно прилегать к телу, не оказывая болезненного давления, не смещается вдоль тела и не ограничивает дыхательные движения брюшной полости.

Корсет надевается на хлопчатобумажное белье, в положении лежа, фиксируется спереди шнуровкой. Планшеты корсета должны быть расположены параллельно позвоночнику.

Изделие устойчиво к воздействию агрессивной биологической жидкости организма человека – поту. Не допускается соприкосновение с красящими веществами и растворителями. Корсет необходимо стирать вручную, по мере загрязнения, с использованием растворов нейтральных моющих средств или раствором детского мыла. Корсет рекомендуется просушивать при комнатной температуре вдали от источников тепла.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входит:

- корсет – 1 шт.;
- памятка по пользованию – 1 экз.;
- упаковка – 1 шт.

5 ГАРАНТИЯ


Гарантийный срок эксплуатации корсетов - один месяц со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит ремонт или замену корсета бесплатно.

Установленный срок службы корсетов для детей – на протяжении времени медицинского назначения.

Установленный срок службы корсетов для взрослых – не менее одного года.

Срок сохраняемости корсетов в заводской упаковке – не менее шести месяцев.

Зам. директора

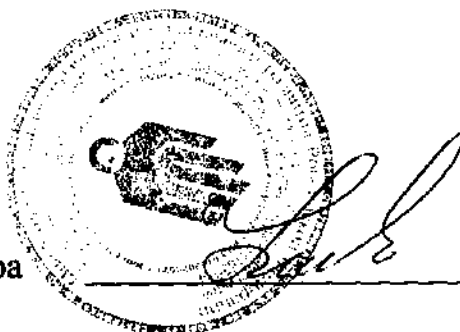

Г.А. Кибальченко

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 2

(два) листов.

Заместитель директора

ФГУП «Ростовское ПрОП»

Министерства здравоохранения России

Г.А. Кибальченко