

ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ТУТОР НА ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ ТН6-02


ТУ 9396-081-55220088-2006

1 НАЗНАЧЕНИЕ ТУТОРА

Тутор на тазобедренный сустав ТН6-02, далее тутор, предназначен для фиксации тазобедренного сустава по различным медицинским показаниям. Назначается при патологических состояниях тазобедренного сустава, при необходимости исключения в нем движений для профилактики деформации костей, после различных операций на тазобедренном суставе.

2 ОПИСАНИЕ ТУТОРА

Тутор на тазобедренный сустав состоит из гильзы на тазобедренный сустав и креплений для удержания тутора на конечности. По медицинским показаниям туторы изготавливают со смягчающим вкладышем.

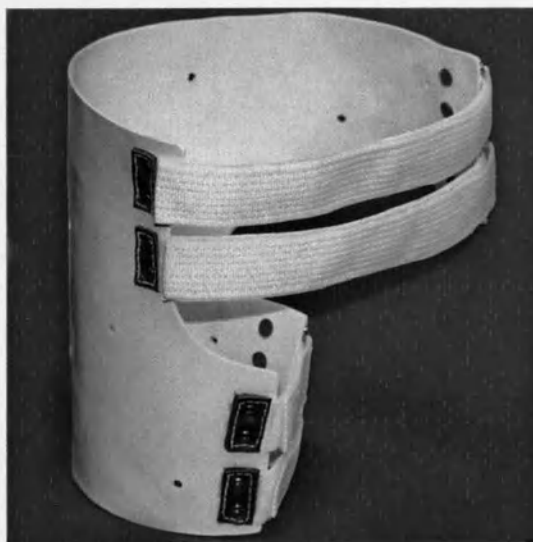

Тутор на тазобедренный сустав ТН6-02

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тутор одевают на хлопчатобумажный чулок, задают указанное врачом положение нижней конечности, вкладывают конечность в гильзу тутора, последовательно фиксируя снизу вверх элементы крепления. Сегмент конечности должен плотно удерживаться в гильзе тутора без явлений локального давления на костные выступы и мягкие ткани. Тутор предназначен на время дневного и ночного сна. Ходьба в туторе запрещена.

4 УХОД ЗА ТУТОРОМ

Внутреннюю поверхность гильзы рекомендуется протирать влажной тканью, смоченной в нейтральном моющем растворе (детском мыле), с последующей просушкой.

Кожаную гильзу предохранять от намокания, т.к. возникает опасность ее деформации.

Металлические части тьютора следует также предохранять от попадания влаги.

Нельзя сушить и хранить тьютор вблизи источников тепла.

5 УХОД ЗА КОЖНЫМИ ПОКРОВАМИ

Ежедневно необходимо проводить гигиеническую обработку кожных покровов пораженной конечности теплой водой с мылом с последующим массажем ее. По назначению лечащего врача-ортопеда, ежедневно выполнять комплекс общеукрепляющих и специальных гимнастических упражнений.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входит:

- тьютор – 1 шт;
- памятка по пользованию – 1 шт.;

7 ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок службы – шесть месяцев со дня выдачи пациенту готового изделия.

Срок службы – 6 месяцев для детей и один год для взрослых при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Зам. директора



Г.А. Кибальченко