

**ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

**ТУТОР НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ  
С ЗАХВАТОМ ГОЛЕНИ И БЕДРА ТН4-02**

**ТУ 9396-081-55220088-2006**

**1 НАЗНАЧЕНИЕ ТУТОРА**

Тутор на коленный сустав с захватом голени и бедра ТН4-02, далее тутор, предназначен для фиксации коленного сустава в функционально выгодном положении при различной патологии. Назначается как нагрузочный при патологических состояниях коленного сустава, требующих его иммобилизации в заданном положении при нагрузке и в покое.

**2 ОПИСАНИЕ ТУТОРА**

Тутор на коленный сустав состоит из гильзы на коленный сустав и креплений для удержания тутора на конечности. По медицинским показаниям туторы изготавливают со смягчающим вкладышем.



**Тутор на коленный сустав ТН4-02**

**3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Тутор надевают на хлопчатобумажный чулок, задают указанное врачом положение нижней конечности, вкладывают конечность в гильзу тутора, последовательно фиксируя снизу вверх элементы крепления. Сегмент конечности должен плотно удерживаться в гильзе тутора без явлений локального давления на костные выступы и мягкие ткани. Тутор предназначен на время дневного и ночного сна. Ходьба в туторе запрещена.

**4 УХОД ЗА ТУТОРОМ**

Внутреннюю поверхность гильзы рекомендуется протирать влажной тканью, смоченной в нейтральном моющем растворе (детском мыле), с последующей просушкой.

Кожаную гильзу предохранять от намокания, т.к. возникает опасность ее деформации.

Металлические части тьютора следует также предохранять от попадания влаги.

Нельзя сушить и хранить тьютор вблизи источников тепла.

## **5 УХОД ЗА КОЖНЫМИ ПОКРОВАМИ**

Ежедневно необходимо проводить гигиеническую обработку кожных покровов пораженной конечности теплой водой с мылом с последующим массажем ее. По назначению лечащего врача-ортопеда, ежедневно выполнять комплекс общеукрепляющих и специальных гимнастических упражнений.

## **6 КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект входит:

- тьютор – 1 шт;
- памятка по пользованию – 1 шт.;

## **7 ГАРАНТИЯ**

Гарантийный срок службы – шесть месяцев со дня выдачи пациенту готового изделия.

Срок службы – 6 месяцев для детей и один год для взрослых при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Зам. директора



Г.А. Кибальченко