

ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Реклинаторы на груднопоясничный отдел позвоночника КР1-01, КР1-01.1

ТУ 9396-013-03151403-2009

1 НАЗНАЧЕНИЕ РЕКЛИНАТОРОВ

Реклинаторы на груднопоясничный отдел позвоночника КР1-01, КР1-01.1, далее реклинаторы, предназначена для формирования правильной осанки, а также при кифозах, кифосколиозах, остеохондрозах грудного отдела позвоночника.

Реклинаторы являются изделием индивидуального и массового изготовления, могут использоваться в лечебных учреждениях, а также для реабилитации на дому в условиях повседневной жизни.

2 ОПИСАНИЕ РЕКЛИНАТОРОВ

Спинка и левая деталь переда изготовлены из хлопчатобумажной ткани на подкладке, а правая деталь переда из ленты эластичной. Фиксируются спереди застежкой текстильной «Контакт».

Лямки реклинаторов изготовлены из ленты ременной, на концах которой настроены застежки текстильные «Контакт».

Лямки реклинаторов, проходящие в подмышечной области, закрыты смягчающими элементами.

Реклинаторы усилены металлическими планшетами, расположенными вертикально между основным материалом и планками из лент корсетных, нашитых с наружной стороны изделия.

Спинка и левая деталь переда обработаны лентой эластичной отделочной.

Реклинатор на груднопоясничный отдел позвоночника КР1-01.1 имеет пояс-подхват из ленты эластичной бандажной с застежкой текстильной «Контакт», пришитый под ленту корсетную к середине спинки.

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД ЗА РЕКЛИНАТОРАМИ

Реклинатор должен плотно прилегать к телу, не оказывая болезненного давления, и не ограничивая дыхательные движения грудной клетки. Лямки реклинатора, проходящие в подмышечной области, не должны вызывать болезненных ощущений.

Реклинатор надевается на хлопчатобумажное белье. Планшеты реклинатора должны быть расположены параллельно позвоночнику. Фиксируется реклинатор спереди текстильной застежкой «Контакт». Лямки реклинатора должны проходить в подмышечной области, скрещиваться на спине и фиксироваться спереди текстильной застежкой «Контакт».

Реклинатор устойчив к воздействию агрессивной биологической жидкости организма человека — поту. Не допускается соприкосновение с красящими веществами и растворителями. Реклинатор необходимо стирать вручную, по мере загрязнения, с использованием растворов нейтральных моющих средств или раствором детского мыла. Изделие рекомендуется просушивать при комнатной температуре вдали от источников тепла.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входит:

- реклинатор — 1 шт.;
- памятка по пользованию — 1 экз.;