

ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Корсеты на поясничный отдел позвоночника КРО-87, КРО-87.1

ТУ 9396-013-03151403-2009

1 НАЗНАЧЕНИЕ КОРСЕТОВ

Корсет на поясничный отдел позвоночника КРО-87 и корсет на поясничный отдел позвоночника с реклинирующей системой КРО-87.1, далее корсеты, предназначены для фиксации поясничного отдела позвоночника при травмах и заболеваниях поясничного отдела позвоночника, а также в качестве реклинирующей системы при нарушении осанки и кифотических деформациях позвоночника.

Корсеты являются изделиями индивидуального и массового изготовления, могут использоваться в лечебных учреждениях, а также для реабилитации на дому в условиях повседневной жизни.

2 ОПИСАНИЕ КОРСЕТОВ

Корсеты изготавливаются из материала «Неопрен» с застежкой текстильной «Контакт».

Для дополнительной фиксации корсет имеет накладку из материала «Неопрен», прикрепленную к спинке корсета застежкой текстильной «Контакт».

К верхней части спинки корсета, под ленту корсетную, пришиты сдвоенные ленты эластичные бандажные, на концах которых пришиты металлические шлевки.

К накладке с правой стороны к шлевке металлической пришит элемент из материала «Неопрен» с настроенной застежкой текстильной «Контакт».

Реклинатор корсета изготовлен из материала «Неопрен» и пришитых к нему лямок из ленты ременной, на концах которой настроены застежки текстильные «Контакт».

Корсеты усилены металлическими планшетами, расположенными вертикально между основным материалом и планками из лент корсетных, нашитых с наружной стороны изделий.

Верхние и нижние срезы обработаны лентой эластичной отделочной.

Швы с изнаночной стороны стачаны на специальной машине.

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Конструкция корсета обеспечивает удобство пользования, надевания и снятия.

Корсет плотно прилегает к телу, не оказывая болезненного давления, не смещается вдоль тела и не ограничивает дыхательные движения брюшной полости.

Корсеты надеваются на хлопчатобумажное белье, в положении лежа, фиксируются спереди застежкой текстильной «Контакт». Поясничный отдел усиливается дополнительной накладкой, которая фиксируется на спинке изделия при помощи застежки текстильной «Контакт», затем крепиться спереди через шлевку металлическую на застежку текстильную «Контакт». Планшеты изделия должны быть расположены параллельно позвоночнику.

Реклинатор, прикрепленный к спинке корсета застежкой текстильной «Контакт», пропущенной через две шлевки металлические, пришитые сверху спинки корсета, фиксируется лямками, проходящими под мышечными впадинами и крепиться впереди застежкой текстильной «Контакт».

Изделия устойчивы к воздействию агрессивной биологической жидкости организма человека – поту. Не допускается соприкосновение с красящими веществами и растворителями. Корсеты необходимо стирать вручную, по мере загрязнения, с использованием растворов нейтральных моющих средств или раствором детского мыла. Изделия рекомендуется просушивать при комнатной температуре вдали от источников тепла.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входит:

- корсет – 1 шт.;
- памятка по пользованию – 1 экз.;
- упаковка – 1 шт.


5 ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделий - один месяцев со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит ремонт или замену корсета бесплатно.

Установленный срок службы изделий для детей – на протяжении времени медицинского назначения.

Установленный срок службы изделий для взрослых – не менее одного года.

Зам. директора

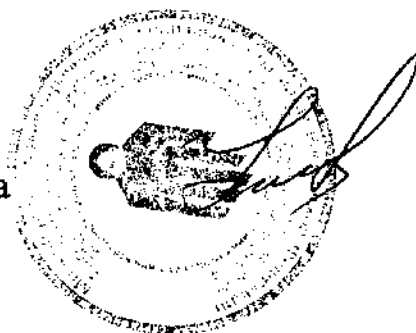

Г.А. Кибальченко

печатью 2
(два) ЛИСТОВ.

Заместитель
ФГУП «Рост
Минздравсо