

ФГУП «Ростовское ПрОП» Минздравсоцразвития России

Памятка по пользованию

Маска медицинская марлевая нестерильная

ТУ 9398-017-03151403-2010

1. Назначение

Маска медицинская марлевая нестерильная (далее маска) используется для фильтрации вдыхаемых и выдыхаемых частиц и защиты от вирусов и бактерий в воздухе при общении с больными, а также в сезоны массового распространения ОРВИ.

Маска предназначена для индивидуального пользования.

Маска предназначена для одноразового и многоразового использования.

2. Указания по эксплуатации

При эксплуатации маски потребитель должен строго соблюдать следующие указания:

- не допускается соприкосновение маски с острыми предметами, красящими веществами, растворителями;
- маска должна надежно закрепляться на лице потребителя, плотно закрывать рот и нос;
- следует не касаться закрепленной маски;
- отсыревшую или влажную маску следует заменять на новую, сухую;
- использованную в течение трех часов маску необходимо выбрасывать в отходы;
- для многоразового использования маски необходимо каждый раз проводить дезинфекцию кипячением в 2% содовом растворе в течение 15 минут с момента закипания;
- после дезинфекции маска многоразового пользования подлежит стирке, тщательному ополаскиванию и глажке с двух сторон.

3. Комплектность

В комплект входит:


- маска – 1 шт.;
- памятка по пользованию – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.

4. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие маски требованиям ТУ 9398-017-03151403-2010 при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок годности – шесть лет с момента изготовления.

Директор

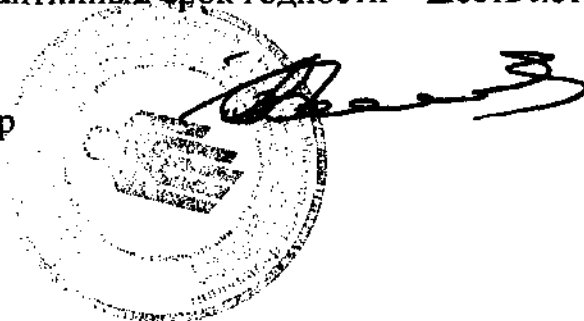

В.И. Трофимов