

ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Пояс ортопедический КРО-34

ТУ 9396-013-03151403-2009

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПОЯСА ОРТОПЕДИЧЕСКОГО КРО-34

Пояс ортопедический КРО-34, далее пояс, предназначен для фиксации и частичной разгрузки пояснично-крестцового отдела позвоночника при остеохондрозе, спондилолистезе, поднятии тяжестей, занятиях спортом.

Пояс является изделием индивидуального и массового изготовления, может использоваться в лечебных учреждениях, а также для реабилитации на дому в условиях повседневной жизни.

2 ОПИСАНИЕ ПОЯСА ОРТОПЕДИЧЕСКОГО КРО-34

Пояс изготавливается из кожи шорно-седельной юфть на подкладке из кожи хромовой для протезов или овчины меховой выделанной.

Фиксация пояса осуществляется капками с пряжками и штрипками. Капки с пряжками и штрипки крепятся к поясу с помощью застежек пустотелых «Хольнитен».

Заклепки плотно обтянуты, не должны иметь кромок и заусенцев.

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Конструкция изделия обеспечивает удобство пользования, надевания и снятия.

Пояс должен плотно прилегать к телу, не оказывая болезненного давления, не смещаясь вдоль тела и не ограничивая дыхательные движения брюшной полости.

Пояс надевается на хлопчатобумажное белье, фиксируется спереди капками с пряжками и штрипками.

Изделие устойчиво к воздействию агрессивной биологической жидкости организма человека – поту. Не допускается соприкосновение с красящими веществами и растворителями. Пояс необходимо протирать тряпкой, по мере загрязнения, с использованием растворов нейтральных моющих средств или раствором детского мыла. Изделие рекомендуется просушивать при комнатной температуре вдали от источников тепла, в расправленном виде.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входит:

- пояс ортопедический – 1 шт.;
- памятка по пользованию – 1 экз.;
- упаковка – 1 шт.

5 ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации пояса - три месяца со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит ремонт или замену пояса бесплатно.

Срок сохранности изделия в заводской упаковке – не менее шести месяцев.

Установленный срок службы изделия для взрослых – не менее одного года.

Зам. директора



Г.А. Кибальченко