

**ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

**ГОЛОВОДЕРЖАТЕЛЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КРО-35**

**ТУ 9396-054-55220088-01**

**1 НАЗНАЧЕНИЕ ГОЛОВОДЕРЖАТЕЛЯ**

Головодержатель пенополиуретановый КРО-35, далее головодержатель, предназначен для мягкой фиксации в среднем физиологическом положении, частичной разгрузки и ограничения движений в шейном отделе позвоночника в процессе восстановительного лечения.

Головодержатель назначается больным с дегенеративно-дистрофическими поражениями и неосложненными травматическими повреждениями шейного отдела позвоночника.

Головодержатель является изделием индивидуального изготовления и используется для детей и взрослых в центрах восстановительного лечения, учреждениях социальной защиты, а также для реабилитации на дому в условиях повседневной жизни.

**2 ОПИСАНИЕ ГОЛОВОДЕРЖАТЕЛЯ**

Головодержатель изготавливается из двухслойной пенополиуретановой гильзы, накладки, и обтянут трикотажным полотном.

Застежка головодержателя выполнена из ленты «Контакт».

**3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ**

Головодержатель надевается непосредственно на тело или хлопчатобумажную прокладку в положении стоя или сидя застежкой сзади.

При пользовании головодержателем его следует оберегать от промокания во избежание деформаций. Наружная оболочка (чехол) по мере необходимости подвергается стирке в теплой воде (40-45 °С) с применением моющих средств. Изделие рекомендуется просушивать при комнатной температуре вдали от источников тепла.

Не допускается контакта с растворителями, щелочами, красящими веществами, кислотами.

**4 КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект входит:

- головодержатель – 1шт;
- памятка по пользованию – 1шт.;

**5 ГАРАНТИЯ**

Гарантийный срок эксплуатации головодержателя - 6 месяцев со дня выдачи пациенту готового изделия. В течение этого срока, в случае поломки, предприятие-изготовитель производит ремонт или замену головодержателя бесплатно.

Средний срок сохранности головодержателя 3 месяца для детей и 6 месяцев для взрослых.

Зам. директора



Г.А. Кибальченко