

ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

**Распорка детская «Разводящая с манжетами» (по типу «Шины Виленского») ПИО-34
ТУ 9396-097-55220088-2009**

1 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗВОДЯЩЕЙ С МАНЖЕТАМИ

Распорка детская «Разводящая с манжетами» (по типу «Шины Виленского») ПИО-34, далее распорка, предназначена для фиксации и разведения бедер в тазобедренных суставах, при дисплазии у детей, врожденном вывихе головки бедра ребенка в возрасте от трех месяцев до восьми лет и при спастических параличах, парезах у детей и подростков.

Распорка является изделием индивидуального изготовления и может использоваться в лечебных учреждениях, а также для реабилитации на дому в условиях повседневной жизни.

2 ОПИСАНИЕ РАЗВОДЯЩЕЙ С МАНЖЕТАМИ

Распорка изготавливается из разводящей алюминиевой штанги, длина которой регулируется ограничительным винтом 354, соединенная через шарниры с двумя манжетами. Манжеты изготовлены из кожи шорно-седельной юфти с металлическими хомутами.

Фиксация манжет на нижней конечности ребенка осуществляется с помощью застежки текстильной «Контакт».

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

распорка надевается непосредственно на хлопчатобумажное белье в положении лежа, с застежкой спереди.

При пользовании распоркой ее следует оберегать от промокания во избежание деформаций. Не допускается соприкосновение с красящими веществами и растворителями. Протирать влажной тканью с использованием растворов нейтральных моющих средств. Изделие рекомендуется просушивать при комнатной температуре вдали от источников тепла.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входит:


- распорка – 1шт;
- памятка по пользованию – 1шт.;

5 ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации распорки – 12 месяцев со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит ремонт или замену распорки бесплатно.

Распорка обеспечивает срок эксплуатации на протяжении времени ее назначения.

Зам. директора

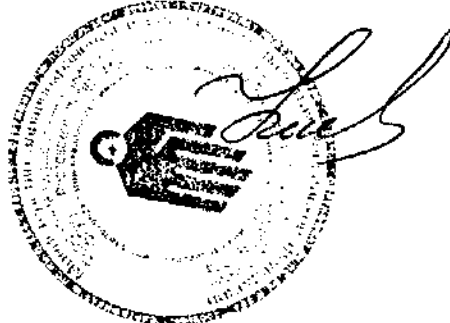

Г.А. Кибальченко